

CIRRUS G5



- Komfort og siddestabilitet i særklasse
- Unik og behagelig tiltfunktion som bidrager til stillingsændringer
- Utallige indstillingsmuligheder og tilpasninger som standard produkt

Cirrus G5 er en helt ny komfortkørestol. Den er udviklet til at dække brugerens behov for komfort og fleksibilitet hele dagen, ved aktivitet og ved hvile. Cirrus G5 tager samtidig hensyn til omsorgspersonalet ved blandt andet at reducere belastningen ved forflytning og stillingsændringer.

Ny, behagelig hovedstøtte, med indvendige stropper for regulering af form, giver ekstra god støtte både sideværts og i dybden.

Vinkelindstillelig ryg med indbyggede sidestøtter og blød polstring. Stropper for regulering af form sikrer den bedste, individuelle tilpasning. Omdrejningspunktet for ryggen bidrager til behagelig rygvinkelregulering uden "glide-effekt".

Vinkelindstillelig og ergonomisk udformet skubbebøjle (tilbehør), bidrager til rigtig arbejdsstilling og mindre belastning for ledsager.

Armlæn, som følger rygvinklen og støtter armene komfortabelt i alle positioner. Armlæne kan vippe op og kan eventuelt fjernes ved forflytning eller transport.

Tiltfunktionen med EI aktuator/motor i konstruktionen giver en tryk og behagelig tilting af kørestolen helt ned til 33°. Kombineret med rygvinklen på op til 35° giver dette mulighed for gode og varierede sidde- og hvilestillinger.



Komfort og stabilitet

Mange personer tilbringer meget tid i kørestolen hver eneste dag. Derfor er komfort vigtig. Sædeenheden har gode indstillingsmuligheder samt et nyt, behageligt og blødt stof. Armlæne følger ryggen, når denne lægges tilbage og giver optimal støtte. Tilsammen giver dette en komfortabel kørestol - en hvilestol på hjul.

Cirrus G5 har mange tilpasningsmuligheder og sikrer dermed en god, stabil siddestilling.

Brug af tilt- og rygvinkelregulering sikrer enkel og komfortabel stillingsændring i løbet af dagen.

Flere tilpasninger foregår uden brug af værktøj og kan selvfølgelig udføres mens personen sidder i kørestolen.

En god og behagelig siddestilling vil øge brugerens generelle trivsel og aktivitetsniveau.

En ny, vinkelindstillelig skubbebøjle (tilbehør), glidesæde, og et godt balanceret tilt, som håndteres med håndkontrol, samt udsvingbare og aftagelige benstøtter, er blandt de mange detaljer, som skaber en lettere og mere komfortabel hverdag for omsorgspersonalet.

IMPROVING PEOPLE'S LIVES - med Cirrus G5



Greb og håndtag har kontrastfarver og er enkle og ofte indlysende at bruge. Dette gør det enkelt at se, hvad der kan reguleres og hvordan det gøres.

Tydelige målskalaer forenkler individuel tilpasning af kørestolen, samt tilbagesættelse til standardpositioner ved genbrug.

Ved hjælp af et enkelt håndtag kan sædet trækkes frem eller skubbes tilbage for en enklere og mere tryk forflytning ind og ud af kørestolen. Ved at skubbe sædet tilbage kommer personen godt ind i kørestolen uden behov for ekstra løft.

Vinkelregulerbar benstøtte, som følger knæets naturlige omdrejningspunkt, er standard på Cirrus G5. Benstøtten reguleres trinløst.

Formstøbt sædepude giver god stabilitet og komfort. Plansæde, med fordybning til bækkenet, giver øget trykfordeling og stabilitet.

Fleksibilitet og kvalitet

Cirrus G5 har rigtig mange tilpasningsmuligheder i standard konfigurationen.

Veludstyret i standard versionen.

Cirrus G5 leveres i 6 forskellige sædebredder. Med et rigt udvalg af tilbehør fra Sunrise Medicals sortiment, imødekommer Cirrus G5 alle kørestolsbrugeres behov.

Høj kvalitet har været i fokus ved udviklingen af Cirrus G5 - fra materialevalg til tekniske løsninger. Vi har spurgt, hvad der er vigtigt for brugere, terapeuter og teknikere. Derfor har slutproduktet en kvalitet som møder brugerens behov for komfort og stabilitet, terapeutens behov for at kunne tilpasse kørestolen til den enkelte og hjælpemiddeldepoternes behov for et produkt med god kvalitet og fleksibilitet ved genbrug.

Kvalitet som varer længe, kombineret med gode genbrugsmuligheder, sparer miljøet og giver lavere levetidsomkostninger på produktet.



De fleste indstillinger udføres enkelt med brugeren siddende i kørestolen.

ET UNIKT TILT



Nyudviklet tiltfunktion sikrer et blødt og behageligt tilt. Hvis det ønskes kan tiltets vandring begrænses i forhold til brugerens behov.



Et rigtigt balancepunkt med optimal hjulplacering giver Cirrus G5 gode køreegenskaber, både for den, der skal skubbe kørestolen og for den, som eventuelt skal køre selv.

ARMLÆN SOM FØLGER RYGGEN



Armlænet følger ryggen i alle positioner og giver derfor optimal støtte og stabilitet ved stillingsændringer.


Armlænet kan justeres i højde, vinkel og dybde.

BENSTØTTEPROGRAM I SÆRKLASSE



Armlænet følger ryggen i alle positioner og giver derfor optimal støtte og stabilitet ved stillingsændringer. Armlænet kan justeres i højde, vinkel og dybde.

TRANSPORT I BIL

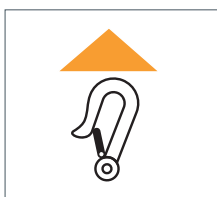


Med Sunrise Medicals righoldige og gennembrøvede benstøtteprogram vil Cirrus G5 altid kunne udstyres med den benstøtte, som passer den enkelte bruger bedst.

INDSTILLINGER OG JUSTERINGER



Greb og håndtag har kontrastfarver og er enkle og ofte selvforklarende i brug. Måleskalaer på reguleringspunkter giver en mere nøjagtig tilpasning. Manualer og monteringsanvisninger, som følger med produktet, har tydelige illustrationer som sikrer rigtig og tryk tilpasning.

FUNKTIONEL SÆDEPLADE

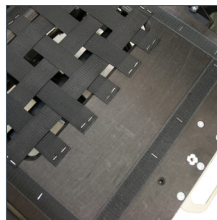

Cirrus G5 leveres med udskæring under sædeknuderne. Udskæringen bidrager til øget trykfordeling samt en mere stabil siddestilling. Glidesædet giver god hjælp ved forflytning, uden behov for tunge ekstråløft.

Bemærk:

Cirrus G5 kan leveres i mange forskellige udgaver. Brochure/Brugermanual kan derfor indeholde beskrivelse af funktioner som ikke er standard på dit produkt. Såfremt du er i tvivl om hvilke funktioner som er standard på dit produkt eller hvis du ønsker information om andre funktioner, er du velkommen til at tage kontakt til os.