

## Slut med manuelle vendinger

### Nem og blid håndtering af sengeliggende uden arbejdsskader

#### Skåner personalet for fysisk belastning og tunge løft

VENDLET fjerner behovet for manuel forflytning i sengen og er derfor et uundværligt værktøj til sikring af et sundt arbejdsmiljø.

#### Let at montere på de fleste plejesenge

Efter montering fungerer VENDLET som en integreret del af sengen. VENDLET kan også bruges med vekseltrykmadrasser og til inkontinente patienter.

#### Giver plejeren frihed og overblik til at fokusere på patientens behov

Den ensartede og rolige vending er behagelig for patienten, idet lagnet understøtter kroppen i hele længden. Plejeren bevarer overblikket og kan støtte patientens arme, ben eller hoved efter behov.

#### Sparer tid og ressourcer

VENDLET forenkler tilrettelæggelsen af den daglige pleje, idet plejeren i vidt omfang kan arbejde alene med patienten.

#### Sådan virker VENDLET

Træklagnet er viklet omkring 2 ruller - en på hver side af sengen. Begge ruller er forsynet med en motor.

Ved tryk på håndbetjeningen, strammes lagnet omkring rullen, og patienten flyttes i sengen eller vendes om på siden.



Vending og flytning



Pålægning af løftesejl



Påklædning og pleje



Håndteringen sker med lethed og værdighed. Dette giver plads til nærvær i plejen, hvilket øger personalets arbejdsglæde og patientens trivsel.



VENDLET skåner patienten for smerte fra 'spidse fingre' og pludselige ryk. Lagnet følger kroppen under hele vendingen og mindsker dermed risikoen for udvikling af decubitus.



Skal patienten sengevaskes, kan plejeren optimere arbejdsstillingen ved at sænke rullerne, trække patienten tæt mod sengekanten og justere sengens højde.

## VENDLET modeller

	VENDLET HC-2	VENDLET V4	VENDLET V4+
Max. brugervægt	200 kg	200 kg	400 kg
Vendefunktion	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Hævning og sænkning af ruller	Manuel	Elektrisk	Elektrisk
Krav til fri plads langs sengens sider	Min. 1 m	70 cm*	70 cm*
Brug af sikkerhedslåse	Manuel	Ingen	Ingen
Brug af sengeheste	Manuel	Manuel	Manuel

\* kun langs den ene side


## Teknisk data

Strømforsyning	Transformator
Mærkeeffekt	100 VA
Mærkespænding	Primær 230 Volt AC/50HZ Sekundær 27 Volt DC
Overensstemmelse	EU direktiv 93/42/EEC for medicinsk udstyr

Alle rettigheder forbeholdes.  
Copyright 2011 Vendlet ApS



VENDLET fastgøres til sengerammen og påvirker ikke sengens øvrige funktioner.

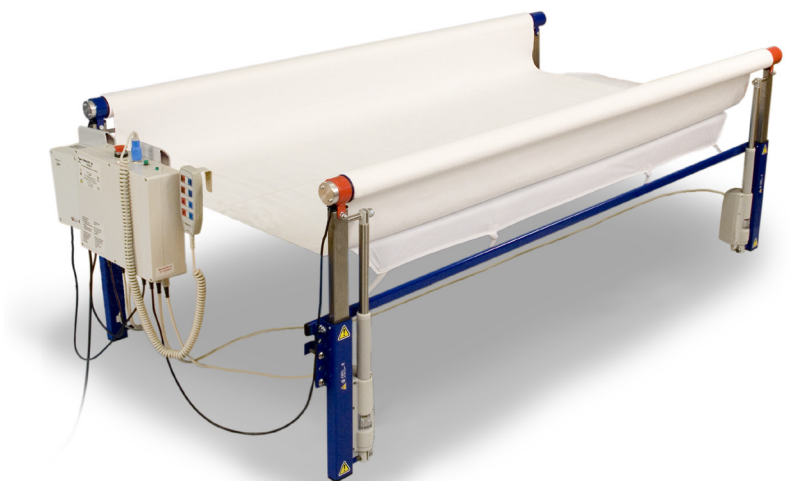

Vers. 2.3