

CAREPUR Lejringspuder – Semi-Fowler pude



CAREPUR Semi-Fowler pude er et positioneringshjælpemiddel til krop, torso og ekstremiteter til både decubitusprofylakse og støtte til decubitusbehandling.

Den multifunktionelle U-formede Semi-Fowler pude med en forhøjet midterdel, kan benyttes til forskellige dele af kroppen. Semi-Fowler puden anvendes primært med patienten i en rygliggende stilling. Her støttes hovedet sikkert, og skuldre/skulderblade aflastes. Denne stilling forhindrer en hyperekstension af hovedet.

Puden kan også benyttes i områder omkring underekstremiteterne. Ved at placere puden under knæene med sidevingerne under lårene i liggende stilling, sikrer den forhøjede midtersektion abduktion i knæområdet, hvilket trykaflaster hofteområdet. Ud fra denne beskrivelse kan puden også drejes 180°, så knæ fortsat adskilles, men underbenene og hæle nu aflastes.


Når puden anvendes, flytter polystyrenkuglerne inden i puden sig pga. trykbelastningen og tilpasser sig derved patientens anatomiske kropskontur. Den punktelastiske formning understøttes af strækbarheden i pudebetrækkets materiale, hvorved kontaktfladen udvides i de områder, hvor der er risiko for decubitus, hvilket fører til en trykreduktion og trykomfordeling. Dette reducerer risikoen for udvikling af tryksår eller støtter effektivt behandlingen af et eksisterende tryksår.

Produktspecifikation:

- Pudefyldet består af 100% polystyrenkugler (EPS) med små granulater
- Puden skal desinficeres ved aftørring
- Betræk af bi-elastisk polyamidstof (45%) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55%)
- Brandhæmmende – DIN EN ISO 12952 del 1+2
- Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, og er modstandsdygtig overfor blod og urin



CAREPUR Lejringspuder – Semi-Fowler pude

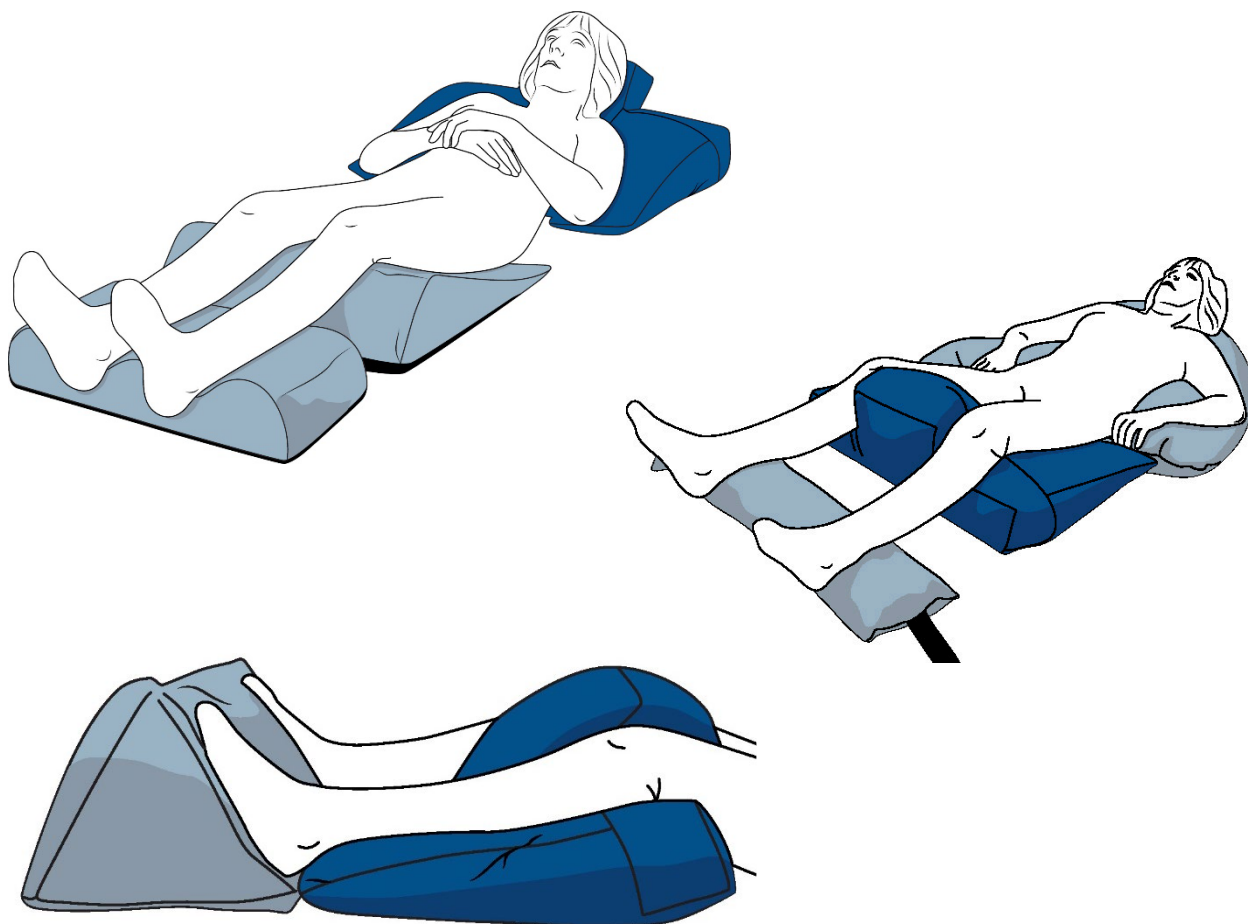

Varenavn	Varenr.	Str.	Mål (LxBxH)	Vægt	HMI-nr.
CAREPUR Semi-Fowler pude, ORANGE	P43797	S	50 x 35 x 15 cm	0,51 kg	136733
CAREPUR Semi-Fowler pude, BLÅ	P43798	M	65 x 50 x 20 cm	1,13 kg	136736



[CarePartner WebShop](#)

[Brugervejledning](#)