

Sikkerhedssystem til personer i seng / stol. *CE - mrk.*

Marts 2015 – Varegr. 9

Sikkerhedsselen forener sikkerhed, støtte og mulighed for bevægelse.

TIL SENG: MEDIUM ID nr.: 07/1980. Livvidde (liggende person) op til **ca. 86cm.**
- do - LARGE ID nr.: 07/1985. Livvidde (liggende person) op til **ca. 102cm.**
+ ekstra large udgave omkreds ca. 126cm. målene er med fuld overlap på velkroen.

Selen fastgøres til sengen med et snap lås system. Selen holder klienten i sengen i ryg - mave - eller sideleje. Selen har to indstillinger. **Fig. 3: Låst indstilling. Fig.: 4 "Løs indstilling"**. Ved "løs" indstilling kan personen dreje overkroppen fra side til side.

TIL KØRESTOL: MEDIUM-ID nr.: 07/1970 (livvidde ca. 75cm. v/1/1) - **og ca. 86cm. v/1/2 overlap på selen**), **LARGE** - ID nr.: 07/1975 (livvidde ca. 100cm. v/1/1) - **og ca. 110cm.-v/1/2 overlap på selen**). Man kan selv regulere velkro- overlappet for evt. tilpasning til brugeren. Selen fastgøres til kørestolens ryglæn, og bagefter på personen (eller i omvendt rækkefølge). Selen har to indstillinger. **Fig. 3: Låst indstilling. Fig. 4: "løs" indstilling**: Den siddende har mulighed for at dreje kroppen til siden, uden at kropsdelen slipper fastgørelsen til selve stolens ryglæn.

MATERIALE/RENGØRING: Polyester/bomuld. **Kan vaskes v/max. 60° C. Tumbles ved max. 40°C.**
NB: HUSK at lukke velkroen ved vask og tørring.

SENGE-SELE:

HMI nr.: 28993

MEDIUM - T2.

(ID - 07/1980)

Varenr: 08-28.994

HMI nr.: 28994

LARGE - T3.

(ID - 07/ 1985)

Large XL:

HMI: 70042.

STOLE-SELE:

Varenr: 08-28.995

HMI nr.: 28995

MEDIUM – T2.

(ID - 07/1970)

Varenr: 08-28.996

HMI nr. 28996

LARGE – T3.

(ID – 07/1975)

XL dim. kan fås.



FIG. 3

FIG. 4