

Sikkerhedssystem til personer i seng / stol. *CE - mrk.*

Sep. 11 - mappe afsnit 8.

Sikringssele forener sikkerhed, støtte,- og bevægelse.

TIL SENG: MEDIUM ID nr.: 07/1980. Livvidde (liggende person) op til ca. 75cm.
- do - LARGE ID nr.: 07/1985. Livvidde (liggende person) op til ca. 100cm.
De ca. 75 og 100cm. er med fuldt overlap på velkroen, med mulighed for regulering.

Selen fastgøres til sengen med et snap lås system. Selen holder klienten i sengen i ryg - mave - eller sideleje. Selen har to indstillinger. **Fig. 3: Låst indstilling. Fig.: 4 "Løs indstilling"**. I "løs" indstilling kan personen dreje kroppen fra side til side.

TIL KØRESTOL: MEDIUM-ID nr.: 07/1970 (livvidde ca. 75cm. v/1/1) - **og ca. 86cm. v/1/2 overlap på selen**), **LARGE** - ID nr.: 07/1975 (livvidde ca. 100cm. v/1/1) - **og ca. 110cm.-v/1/2 overlap på selen**). Man kan selv regulere velkro- overlappet for evt. tilpasning til brugeren. Selen fastgøres til kørestolens ryglæn, og bagefter på personen (eller i omvendt rækkefølge). Selen har to indstillinger. **Fig. 3: Låst indstilling. Fig. 4: "løs" indstilling**: Den siddende har mulighed for at dreje kroppen til siden, uden at kropsdelen slipper fastgørelsen til selve stolens ryglæn.

MATERIALE/RENGØRING: Polyester/bomuld. **Kan vaskes v/max. 60° C. Tumbles ved max. 40° C.** **NB: HUSK at lukke velkroen ved vask og tørring.**

SENGE-SELE:

varenr. 08-28.993

HMI nr.: 28993

MEDIUM - T2.

(ID - 07/1980)

Varenr: 08-28.994

HMI nr.: 28994

LARGE - T3.

(ID - 07/ 1985)

Spec. dimension fås

STOLE-SELE:

Varenr: 08-28.995

HMI nr.: 28995

MEDIUM – T2.

(ID - 07/1970)

Varenr: 08-28.996

HMI nr. 28996

LARGE – T3.

(ID – 07/1975)

Spec. dimension fås

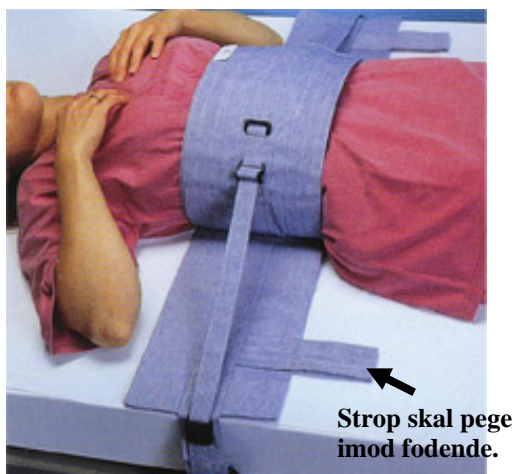


FIG. 3

FIG. 4