

CIRRUS 4


Indstilling af stolen

Oversigt over de mest almindelige indstillinger. Se den komplette oversigt i brugsanvisningen.

Benstøtter


Eleverbar

- Løsn fingerskruen (A)
- Indstil benstøtten til ønsket vinkel og stram fingerskruen

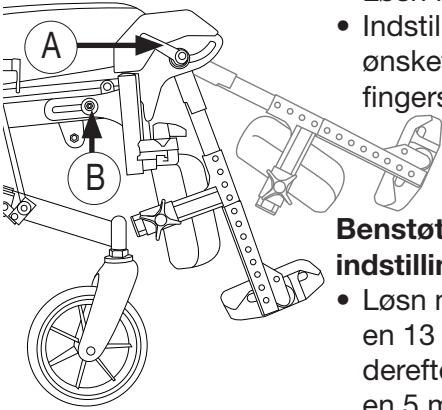

Benstøtteophæng – indstilling i dybde

- Løsn møtrikken (B) med en 13 mm fastnøgle, derefter skruen (B) med en 5 mm unbrakonøgle. Træk eller skub benstøtten til ønsket placering. Skru skruen i igen og derefter møtrikken på

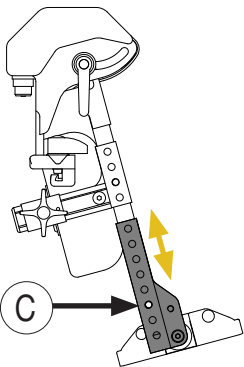


Fodpladens højde

- Tryk snaplåsen (C) ind i det firkantede rør samtidig med at fodpladen trækkes eller skubbes til ønsket højde

Vinkelindstilling af fodplade

- Løsn skruen (D) med en 5 mm unbrakonøgle
- Indstil til ønsket vinkel og stram skruen igen

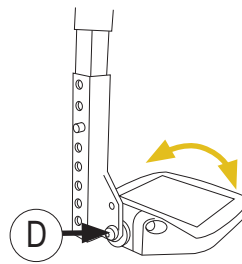

Indstilling af lægstøtte

Højdeindstilling

- Tryk snaplåsen (E) ind i det firkantede rør samtidig med, at lægstøtten trækkes eller skubbes til ønsket højde

Dybdeindstilling


- Løsn fingerskruen (F). Flyt lægstøtten til ønsket dybde og stram skruen igen

Vinkelindstilling

- Løsn fingerskruen (G). Drej lægstøtten til ønsket vinkel og stram skruen igen


Breddeindstilling

- Løsn fingerskruen (G). Skub eller træk lægstøtten til ønsket bredde og stram skruen igen

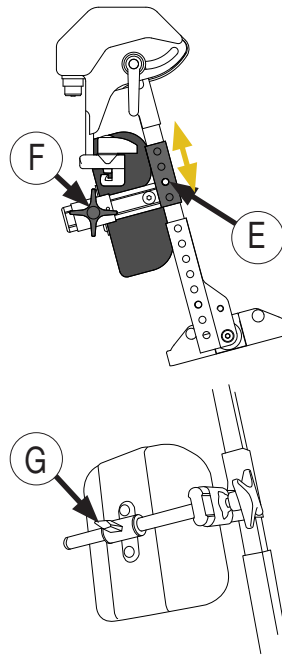


Balancepunkt

Balancepunktet indstilles ved at flytte drivhjulet til en anden position i positionsblokken. Positionsblokken har 3 huller.

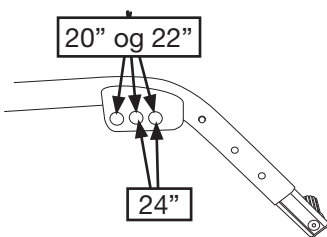


20" og 22" drivhjul kan monteres i alle 3 huller, mens 24" drivhjul kun kan monteres i de 2 bagerste huller.

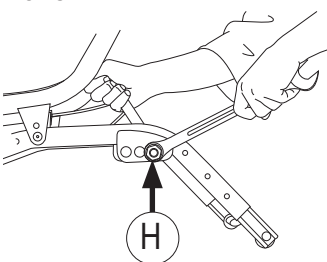

- Tag drivhjulet af
- Løsn hjulbøsningen ved at skru den udvendige møtrik (H) ud med en 24 mm fastnøgle. Hold igen på den indvendige møtrik med en 24 mm fastnøgle

- Flyt hjulbøsningen til det ønskede hul og stram møtrikken igen
- Sæt drivhjulet på

Bremser

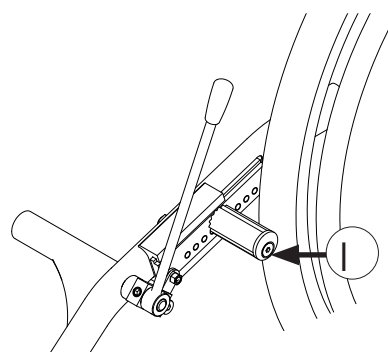


Indstilling af bremseklodsen ved mindre tilpasninger

- Løsn skruen (I) med en 4 mm unbrakonøgle
- Drej bremseklodsen så den står korrekt i forhold til dækket

Indstilling af bremseklodsen ved større tilpasninger f.eks. ved skift hjuldimension

- Skru skruen (I) ud. Flyt bremseklodsen til et nyt hul i "slæden" og stram skruen igen


Tipsikring/trædestang

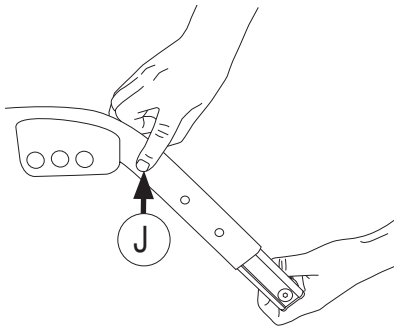

Indstil tipsikringen, når der er ændret på stolens balancepunkt.


- Tryk snaplåsen (J) ind når afstanden mellem tipsikringen og underlaget skal indstilles. Træk eller skub tipsikringen til den ønsket position
- Vær opmærksom på, at snaplåsen er i "hak"
- Maksimum afstand fra enden af tipsikringen til underlaget er 35 mm

Armlæns højde

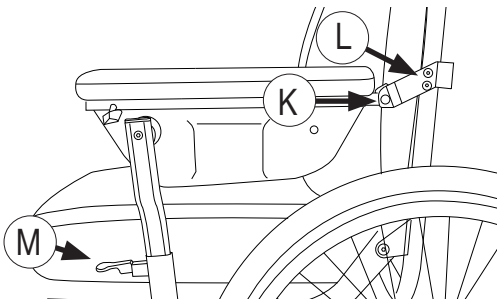

- Tryk ind på snaplåsen (K) for at løsne armlænet fra hængslet, der fæstner armlænet til rygrøret og træk armlænet ned
- Løsne skruerne (L) med en 4 mm unbrakonøgle for at løsne hængslet
- Skub armlæns-hængslet op eller ned til ønsket højde. Vær opmærksom på ikke at indstille armlæns-hængslet så langt ned, at armlænet kommer i konflikt med drivhjulet
- Stram skruerne igen og sæt armlænet på plads i fæstet
- Løsn grebet (M) og indstil højden fortil

Nakkestøtte

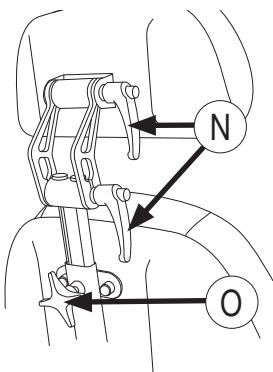


Indstilling i dybde

- Løsne grebene (N), foretag tilpasningen og stram grebene til igen

Indstilling i højde

- Løsn grebet (O), hæv eller sænk nakkestøtten til ønsket højde og stram grebet til igen


Sædedybde

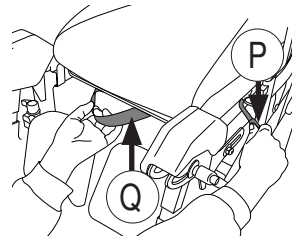

Anvend sædets glideskinner til at indstille sædedybden og for at få sædet længere frem ved forflytning.


- Sædet indstilles til vandret stilling
- Betjeningsgrebet (P) skubbes bagud, for at udløse sædemekanismen samtidig med, at sædet trækkes fremad eller skubbes bagud ved at holde i stroppen (Q) på sædet

Ryglæns højde

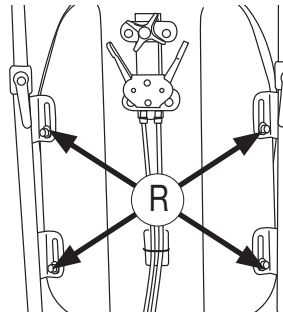


- Tag rygpuden af
- Fjern plastpropperne (R) over skruerne
- Løsn skruerne på indersiden af rygskallen med en 5 mm unbrakonøgle, mens der holdes igen på ydersiden med en 10 mm fastnøgle
- Hæv eller sænk rygskallen til ønsket højde
- Stram skruerne igen og sæt rygpuden på plads

Klappe ryglænet op / Fælde ned over sædet

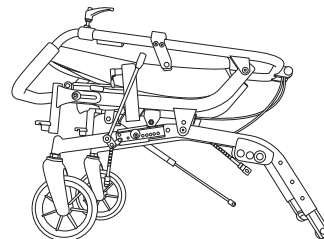

Læg Cirrus 4 sammen, så den fylder så lidt som muligt ved

- Tag armlænene af
- Tag benstøtterne af
- Tag evt. tilbehør af
- Tag skubbebøjlen af og vend den 180° rundt

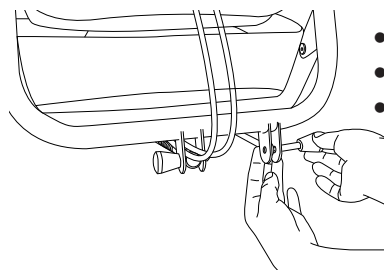

- Tag sædepuden af
- Tag drivhjulene af
- Fæld ryglænet ned over sædet

- Indstil ryglænet helt frem
- Træk bolten til gasfjederen og indstillingsmekanismen ud. Frigør gasfjederen og indstillingsmekanismen. Sæt bolten igen med det samme, så den ikke bliver væk
- Fæld ryglænet ned over sædet
- Vær opmærksom på, at wirerne hele tiden ligger mellem beslagene og over bolten, så de ikke går istrykker