



Silhouette tilslutning

Xen kan bruges direkte med visse høreapparat i T-pos. For optimal kompatibilitet anbefales det dog at bruge Silhouette.

Høreapparater i T-pos er følsomme overfor elektromagnetisk støj.

Løsning:

- Brug Silhouette
- Brug Xen direkte med høreapparater i M-pos

Xen kan utilsigtet aktivere høreapparater med auto-T-funktion.

Løsning:

- Brug Silhouette eller
- Få din forhandler til at slå auto-T-funktionen fra

Placeres bag øret ved siden af høreapparatet

Foretage, modtage og afslutte et opkald

Tryk for at foretage opkald
 Tryk for at besvare opkald
 Tryk for at afslutte opkald

Lydstyrkejustering og -forstærkning









Tryk for maksimal lydstyrkeforstærkning
 Tryk + 1-5 for niveau

921-32-301-00 Rev. A 0207




Xen

Xen



Tast	Under standby	Under samtale	I programmerings-/visningstilstand
	Besvar indkommende opkald, eller foretag et opkald.	Afslut opkald under samtale.	Tryk for at foretage et opkald under visning af telefonbogen eller opkalds-id-poster.
0-9	Indtast tal 0-9.	Send tonesignal på 0-9.	Indtast et tal fra 0-9, eller et bogstav.
*	Indtast *.	Send tonesignal på *.	Indtast *.
# 	Indtast # eller tryk og hold for tasturlåsning.	Send tonesignal på #.	Indtast #.
 R		Viderestilling mellem to telefonlinjer.	Nedpil under søgning.
	Se vis-nummer poster	Aktivér eksternt højttaler.	Oppil under søgning.
OK MENU	Åbn konfigurationsmenu, eller bekræft en handling.	Åbn menuen Intern, og udfør viderestilling.	Bekræft en handling.
	Genkaldsliste.		Angiv tidstilpasset pause i telefonbogsposterne.
 Esc		Mute/afbryd mikrofonen.	Annullér en handling.
	Hurtig åbning af menuen RINGETONE.	Juster modtagerlydstyrke.	
	Aktivér telefonbog.	Øg lydstyrken, og søg i telefonbogen. Send tonesignal.	Gem numre på displayet i telefonbogen.

Xen Quick Guide


Tilslut strøm

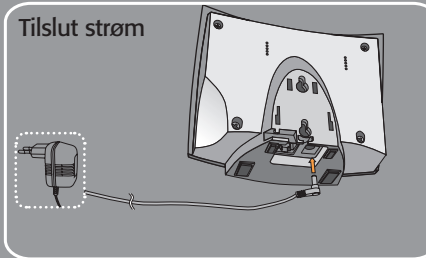

Tilslut telefonledning

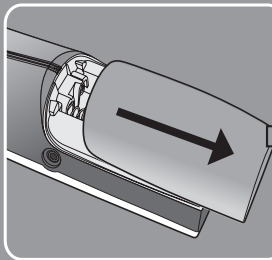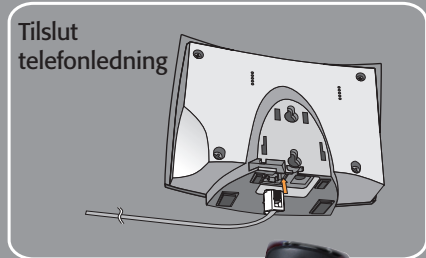

Batterier

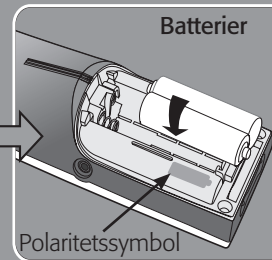

Indikator for ladning (rød)

