

DK Kort udgave af brugsanvisning: M2 Multi-Tip bade-/toiletstol.
Medfølgende brugsanvisning skal altid læses!

Vær opmærksom på følgende

NØDSTOP



Ved nødstilfælde kan stolens elektriske system frakobles ved at holde den røde "Stop"-knap på håndbetjeningen inde til den bipper, hvorefter to lamper lyser.

Stoppet deaktiveres ved at holde samme røde "Stop" knap inde indtil lamperne slukker.



NØDFIR

Hvis sænkeknappen på håndbetjeningen ikke kan sænke stolen. Hold knappen med den røde pil (nødfir-knappen) på håndbetjeningen inde til stolen automatisk er sænket. NB! Der går ca. 5 sekunder før stolen sænkes, efter den har "bippet" 5 gange.

NB! Når nødfir-knappen holdes nede blinker strøm-dioden.

NULSTILLING AF SYSTEMET

Hvis alle lamperne på håndbetjeningen blinker, kan det skyldes en systemfejl. Hold først "stop"-knappen nede på håndbetjeningen til de to lamper ved piletasterne på håndbetjeningen lyser og hold dernæst nødfir knappen på håndbetjeningen inde til stolen automatisk er sænket helt i bund. Nu er stolens system genstartet. NB! Der går ca. 5 sekunder før stolen sænkes, efter den har "bippet" 5 gange.




ADVARSEL ⚠




Ved betjening af stolen skal brugerens hænder placeres i skødet, såfremt brugeren ikke selv kan holde fast i armlænerne.



Man må ikke bade/bruse mens stolen oplades.

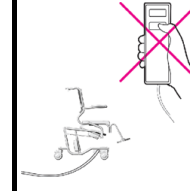

Man må ikke bruge håndbetjeningen, når stolen er til opladning.

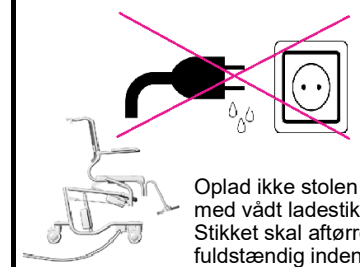

Oplad ikke stolen med vådt ladestik. Stikket skal aftørres fuldstændig inden opladning.

Batteri og opladning




Det er muligt at tjekke tilbageværende strøm ved batteri-symbolerne (1, 2, 3) i toppen af håndbetjeningen. Når den når til (2 eller 1), skal stolen oplades. Ved opladning blinker strøm-symbolet (4) indtil batteriet er fuld opladet, hvor det lyser konstant. NB! Stolen kan ikke bruges ved ladning.


Brug af retningsfast hjul / Låsning af hjul

Lettere kørsel med retningsfast hjul. Det højre forreste hjul er retningsfast. Når hjulet er låst, vil dette hjul kun køre lige ud.

BEMÆRK: Alle hjul skal låses, før sædet justeres op i højden.

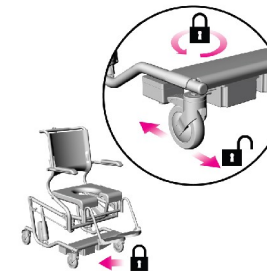

Låsning af hjul

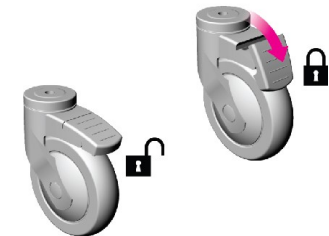

HMN a/s,
Midtager 22,
2605 Brøndby,
Danmark

Tlf. +45 43962400
E-mail info@hmn.dk www.hmn.dk

