


Kontrol af Løft & Sædetilt:


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

Løfte-mekanisme & sædetilt-funktion er elektriske. Strømforsyning kommer fra et 24 volt batteri (NiMh) med en kapacitet på 1,4 Ah, svarende til 25-30 løft, når batteriet er fuldt opladet.

Ved tryk på knapperne på håndbetjeningen aktiveres henholdsvis løfte- og tiltfunktion. Så snart knappen slippes, standser bevægelsen.

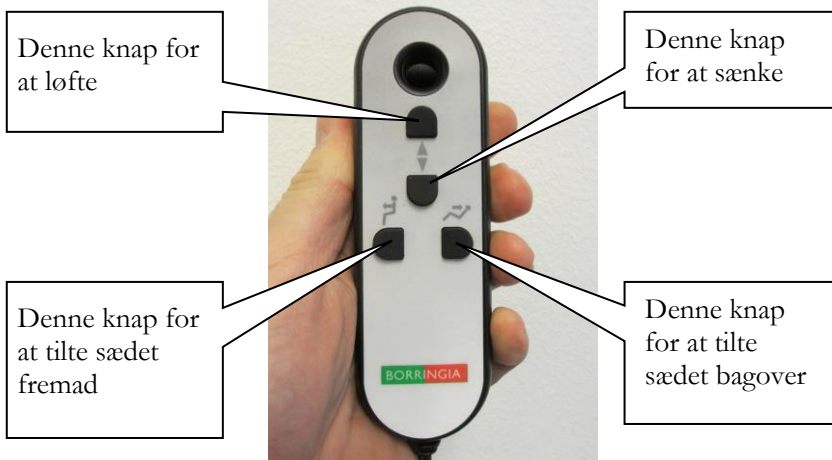




Fodhvilerne:

1. For at lette aftagning af fodhvilerne er der ingen greb eller håndtag, som skal aktiveres. Træk opad.
2. For at påsætte fodhviler placeres denne (som vist på billede 2) over fodhvilerholderen. Pres nedad, indtil fodhvileren "klikker på plads".
3. Fodpladernes højde kan justeres ved at løse fingerskruen. Fodpladernes vinkel kan indstilles med Unbraconøglen, som leveres med stolen.

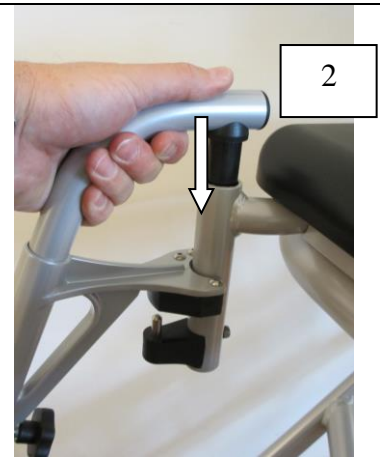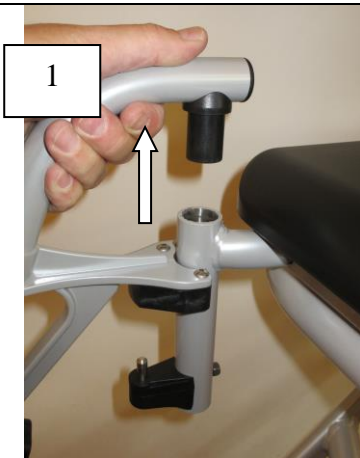

Aftagning og Påsætning af Sæde for Rengøring:

1. Træk opad i forkanten af sædet. Herved kan sædet fjernes, sådan at både sæde og sæderamme kan rengøres.
2. For at sætte sædet på igen, holdes dette i en vinkel som vist på billede 1. Herefter skubbes sædet bagud.
3. Pres nedad på sædet, indtil det "klikker på plads".

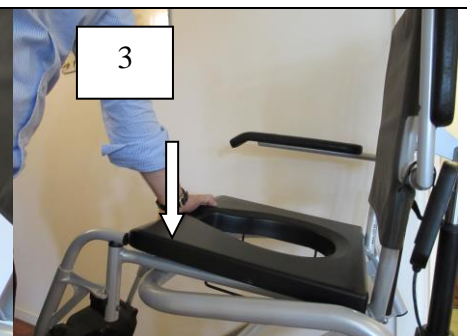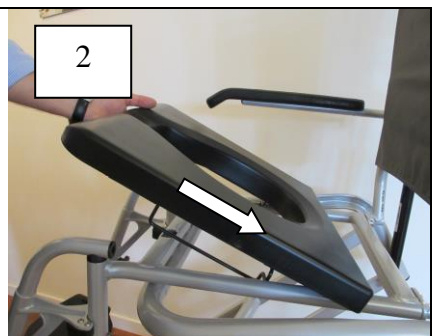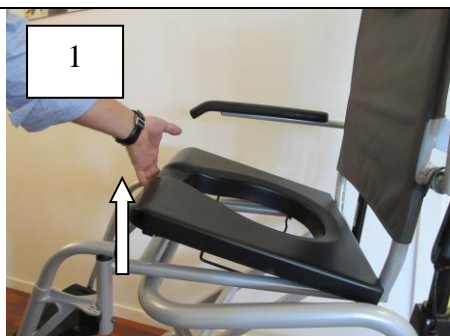


Batteri & Opladning:

Rise IIS-130 er udstyret med et 24 volt batteri (NiMh) med en kapacitet på 1,4 Ah. Når batteriet er fuldt opladet, har det kapacitet til at foretage 25 – 30 løft. Batteri og styreboks er udstyret med flere signal- og sikkerhedsfunktioner, som forhindrer, at du løber tør for strøm under en forflytning:

- a. Når batteriet er afladet så meget, at der er tilbageværende kapacitet til ca. er 5 fulde løft, udsender det en ”Biplyd,” når der trykkes på håndbetjeningen. Dette er signal om, at ladning bør foretages.
 - b. Anvendes batteriet fortsat uden at blive ladet op, vil elektronikken af sikkerhedshensyn på et tidspunkt kun tillade bevægelse nedad. Dette er signal om, at ladning bør foretages.
 - c. Når batteriet er stærkt afladet, vil elektronikken af sikkerhedshensyn helt blokere for løfte- & tilt-funktionerne.
 - d. All batterier mister kapacitet ved lave temperaturer, dvs. ved 0° Celsius og koldere. Hvis du har ladet din Rise IIS-130 eller batteriet ligge f.eks. i bilen i koldt vejr, kan det være nødvendigt at oplade den inden brug.
 - e. Normal arbejdstemperatur bør ligge imellem 0-40° Celsius
1. Træk batteriet ud af elektronik-boksen
 2. Skub batteriet ind i ladestationen og drej det med uret, indtil de indbyggede magneter låser batteriet på plads. Så længe den grønne lampe blinker, pågår ladning. Når den grønne lampe lyser permanent er batteriet fuldt opladet. Den gule lampe tændes, når ladestationen er forbundet til stikkontakten.

Lad aldrig batteriet i et vådrum! Placér laderen i et tørt rum!

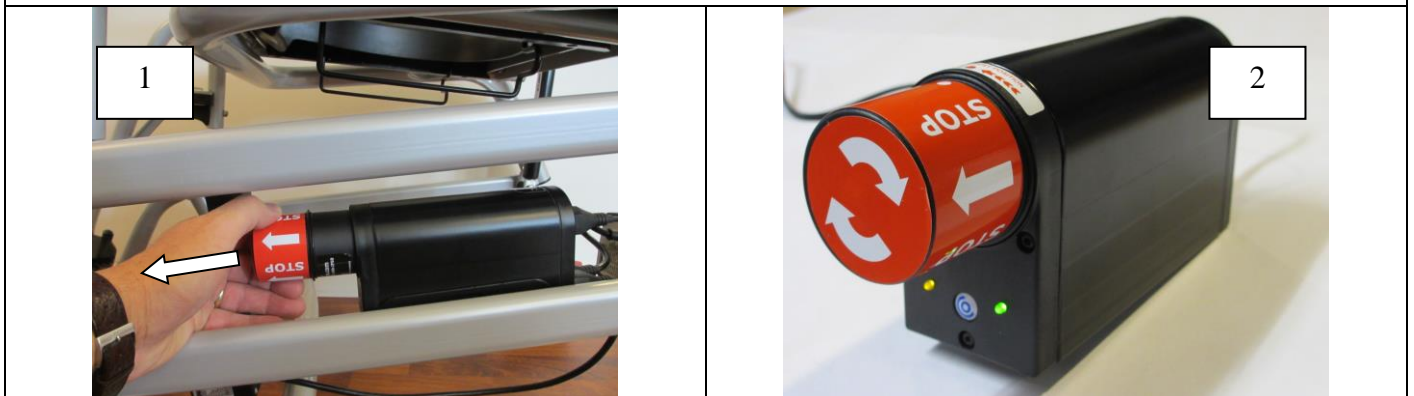

Nød-Stop:

Det aftagelige batteri på Rise IIS-130 fungerer også som ”Nød-Stop” i den – usandsynlige – situation at Rise IIS-130 forsætter løftebevægelse, efter at knapperne på håndbetjeningen er sluppet.

Ved at trække batteriet ud af elektronikboksen stoppes al aktivitet. Nød-Stoppet frigøres igen ved at skubbe batteriet ind i elektronikboksen og dreje det med uret, indtil de indbyggede magneter låser batteriet på plads.

Rengøring:

Anvend en klud vredet op i vand evt. tilsat rengørings- eller opvaskemiddel. Tør efter med en klud. Kalk fjernes ved at sprøjte stolen med eddike. Lad eddiken virke i 2-3 timer og skyld efter med vand. Rise IIS-130 kan rengøres med egnede desinfektionsmidler som f.eks. Virkon®

Brug **ALDRIG** syre eller opløsningsmidler til rengøring

For grundig rengøring kan Rise IIS-130 vaskes i vaskeautomater Stolen tåler 90° Celsius i 1 minut eller 85° Celsius i 5 minutter. (NB: Batteri **SKAL** være isat under rengøring)

Toiletsædet kan tages af for rengøring. Sædet tåler temperaturer op til 70° Celsius og kan derfor **ikke** autoklaveres. Sædet kan tåle vask ved 85° Celsius, dog **maximalt i 5 minutter**

Smøring:

Ca. en gang om måneden bør stemplerne på gasfjedrene og stemplet på aktuator(er) smøres med lidt Vaseline.