



LivetSomSenior

Hjælpemidler til en lettere hverdag

Sådan kommer du hurtigt i gang



1. Pak alle delene ud af den medfølgende emballage
2. Start med at montere benene på undersiden. De skal danne et kryds, og derefter fastgøres med de fem medfølgende skruer
3. Når benene er forsvarligt fastgøres skrues ryglænet ligeledes fast på undersiden ved hjælp af de medfølgende skruer
4. Indstil derefter højden på alle fire ben, så de har den ønskede højde. Det er vigtigt, at alle ben er indstillet til samme højde.