


## Brugsvejledning fodhviler model 01051

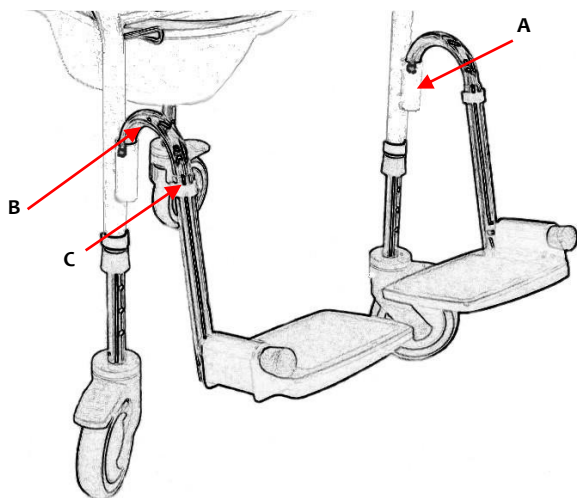

Et fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhviler (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er påsvejet stolens forben. I hver side af beslaget er en slidse, som fodhvilerens "knopper" glider ned i og derved låser fodhvileren for sidedrej.



Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.

2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, **løftes** fodhvileren - nemmest i krumningen (B) - godt én cm lodret. Herved glider fodhvilerens "knopper" op af slidserne, og fodhvileren kan nu drejes til siden.
3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at **fjerne** dens låseclip (C) og derefter **trække** eller **skubbe** fodhvilerens inderrør til den ønskede længde. **SÆT** fodhvilerens låseclip på plads igen efter indstillingen.
4. Fodhvilerne kan forsynes med et lægbånd (model 01052) eller ankelbespændinger (model 01052-A) fremstillet i skai (med velcrolukning til at **stramme** eller **slække**) samt en udelt polstret fodplade (model 01055-PL) til med velcrotape at fastgøre oven på de to plast fodplader. Fodhvilerne kan efter ønske leveres **længere** eller **kortere**, hvis brugeren har ekstraordinært lange eller korte ben.



Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.

dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at **ERGOTip X EL**, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182.

dan  
rehab a/s

**ERGOTip X EL** HMI-nr. 89883

(IP X6 klassificeret)

BRUGSVEJLEDNING



**OPLAD STOLENS BATTERI FØR IBRUGTAGNING.**



**ERGOTip X EL** skal anvendes på et vandret underlag – stolen må **aldrig** bruges på skrånende underlag.

HVIS stolen anvendes til **patienttransport** gælder følgende forholdsregler:


- a. Stolen må IKKE være fremadklippet
- b. Stolen skal være i LAVESTE position
- c. Udvis største forsigtighed ved kørsel over fx dørtrin o. lign.
- d. Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem. Opbevar brugsvejledningen sammen med stolen.

**Max. belastning: 200 kg.**

**ERGOTip X EL** er CE-mærket, testet og godkendt i henhold til ISO/EN 12182:2012.

### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Ved usædvanlige lyde og/ eller evt. ujævn motorgang **STANDES** tipningen. Kontakt evt. en fagmand eller forhandleren/ producenten. Rengøring foretages med ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud. Armlæn, ryglæn, sæde og hjul kontrolleres med jævne mellemrum – efterspændes eventuelt – og holdes fri for hår m.m. for at bevare den optimale køreevne.

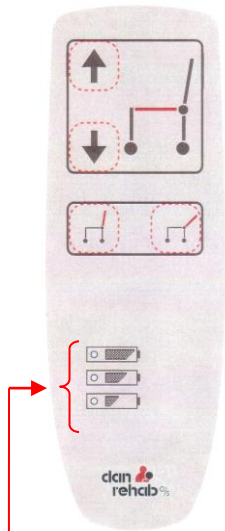

Indikatorer for batteriniveau

#### HVORDAN TIPPES STOLEN BAGUD:

Tryk på håndbetjeningsboksens højre tast i den **nederste** række knapper, **tip** stolen til den ønskede siddeposition. **Slip** tasten:

**STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.**

**FØR** tipning påses, at vippebeslaget bag på sædet er vippet ned, så en isat spand ikke falder ud ved tipningen.

#### HVORDAN TIPPES STOLEN FREMAD:

Tryk på håndbetjeningsboksens venstre tast i den **nederste** række knapper, **tip** stolen til den ønskede siddeposition. **Slip** tasten igen.

**STOLEN ER NU FASTLÅST I DENNE STILLING.**

Ved brugers ind-/udstigning i/fra stolen samt ved tipning **SKAL** det sikres, at stolens hjul er aflåst, og at hjulenes bremsepedaler **IKKE** "peger" ind under stolen!

#### HVORDAN INDSTILLES SÆDEHØJDEN:

Tryk på den **øverste** af tasterne i **øverste** firkant på håndbetjeningen, og **hæv** stolen til den ønskede højde. **Slip** tasten igen:

**STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.**




**STANDS ØJEBLIKKELIGT, HVIS STOLEN KØRER SKÆVT OP! Konsultér fejlsøgningsskemaet på [www.danrehab.dk](http://www.danrehab.dk) eller ring til Teknisk Support på tlf. 4023 3553.**

Tryk på den **nederste** af de to taster i den **øverste** firkant på håndbetjeningen for at **sænke** stolen til en ønsket sædehøjde. **Slip** tasten igen: **STOLENS POSITION ER NU FASTLÅST.**


Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare.

**STÅ ALDRIG PÅ FODHVLERNES FODPLADER!**

Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, hvis forhjulene ikke er låst, og hvis bremsepedalerne ikke peger væk fra stolen.

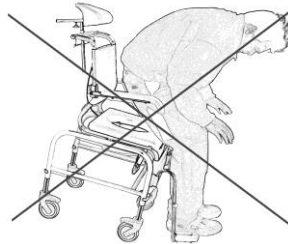


**OPLADNING KAN SKE ENTEN EKSTERNT** - dvs. ved at fjerne batteriboksen fra stolen:

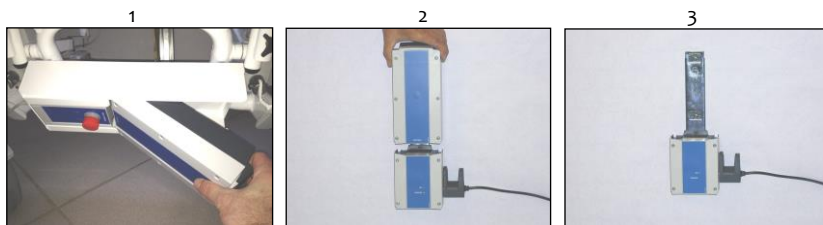

1. Fjern batteriboksen fra stolen ved at trække i håndtaget i batteriboksens højre side.

- Sæt batteriboksen i skinnen på batteriladeren (OBS! Xtra udstyr). Pæren lyser **gult** under opladning. Når opladning ikke længere er påkrævet, vil pæren lyse **grønt**.
- Hvis man har tilkøbt en oplader (med den sorte ledningholder), kan den evt. skrues fast på en væg, eller hvor det måtte være mest belejligt. Oplad batteriet **SENEST**, når indikatorerne for batteriniveaet skifter til det nederste af de tre niveauer. **EFTER OPLADNING SÆTTES BATTERIET I SKINNEN PÅ STOLEN: TRYK LET MED VENSTRE HÅND PÅ BATTERIETS FORSIDE, OG SKUB TIL VENSTRE MED HØJRE HÅND, INDTIL ET KLIK HØRES.** Vi anbefaler i øvrigt, at man anskaffer sig en **extra** batteriboks, som så kan sidde i batteriladeren indtil brug – på den måde har man altid mindst én batteriboks klar til brug.

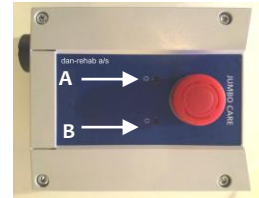

**NØDSTOP:** Tryk på den røde knap på styreboksen. Drej knappen til **højre** for at ophæve nødstopet.

**NØDFIR:** Tryk let med fx en kuglepen i hullet ved **A** for at **hæve** stolen. Tryk let i hullet **B** for at **sænke** stolen.

**ELLER OPLADNING KAN FORETAGES PÅ STOLEN** - uden at fjerne batteriboksen fra stolen:



- Fjern proppen **A** ved at trække den ud af stolens ladestik **B**.
- Indsæt det runde stik **C** fra den **medfølgende** lader i stolens ladestik **B**. Sæt laderens anden ende **D** i en almindelig stikkontakt. Under opladning vil laderens lille pære lyse **gult**. Når opladning ikke længere er påkrævet, vil pæren lyse **grønt**. Indsæt prop **A** i stolens ladestik **B** igen, når opladningen er slut.

**OBS! En fuldstændig tømt batteriboks kan IKKE genoplades!**



**Opladning må ikke foretages i vådrum, eller hvis stolen er våd eller med en bruger siddende i stolen.**

**OBS! Ved rengøring af stolen skal motorernes stempler være kørt HELT ind i "huset".**

**Hvis stolen er udstyret med et hjul med retningsbremse (grøn bremsepedal):**

Tryk pedalen ned, og hjulet vil automatisk været låst for sidedrej (der høres en klik-lyd). Skub pedalen op igen, når retningsbremse ikke er ønsket længere.

**EXTRA TILBEHØR:** Se [www.danrehab.dk](http://www.danrehab.dk)