

Tjek først:

Sørg for, at:

- Stolen er bremsset med kørestolens bremses (fig. 1).
- E-Drive er deaktiveret (figur 2). (Frigear – stolen kan bruges uden motor)
Det gule håndtag på begge sider peger opad/bagud.
- Batteriet er tilstrækkeligt opladet.
Batteristatus.m vist på joystickdisplayet og -styringen(batteriindikatorlampe).
- Antitipperne er godt justeret (se brugervejledning).
- Dækkene har nok luft.



OBS:

- Undgå, at kablerne sidder i spænd, når sidebeskytterne fjernes eller flyttes på kørestolen.

Ud at køre:

1. Aktiver E-Drive ved at skubbe de gule håndtag fremad (fig. 2). E-Drive er aktiveret.
2. Start E-drive:
Joystick:
Tryk på den gule kontakt op til position 1 (fig. 3).
Displayet lyser.
3. Parkeringsbremserne løsnes på begge hjul (fig. 1).

Slukke:

- Slå E-drev fra:
Joystick:
Tryk den gule kontakt ned til position 0 (fig. 3).
Displayet slukkes.



OBS:

- Når E-Drive ikke er i brug i 10 minutter, lukker systemet automatisk ned. (Kan ændres i programmering).



Fig... 1 parkeringsbremse



Fig... 2 Slå slå til/fra



Fig... 3 Joystick: Fastlæg hastigheden , og tænd/sluk for den

Hurtig i gang med E-Drive

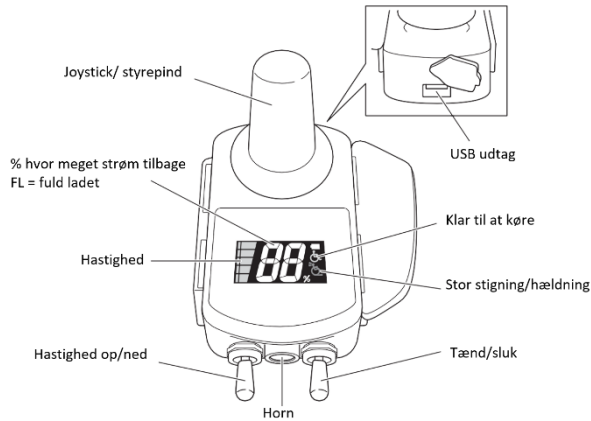


Fig... 4 Joystick/funktioner

Fig... 5 Oplad batteri i stolen eller tag batteri ud og oplad

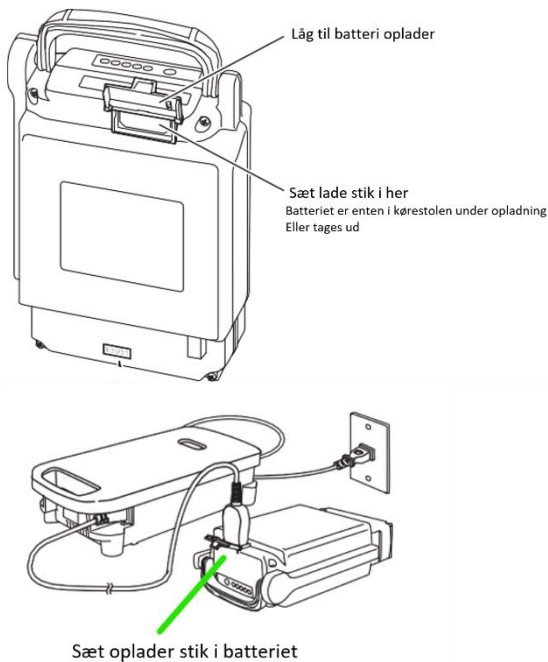


Fig... 6 – sæt oplader stik i batteriet

Køre:

Joystick:

- Styr kørestolen ved hjælp af joysticket/styrepind.
- Den sorte kontakt bestemmer hastigheden: Op er hurtigere, ned er langsommere (Figur 3).



OBS:

- Hvis der lyder et "kort bip" 4xun der kørslen, er batterikapaciteten for lav. Oplad batteriet.



Tip:

- Joysticket kan indstilles i henhold til dine ønsker – skal din indstilling ændres bedes du kontakte Decon Mobility.



OBS:

- Står der **C1** i displayet, er det fordi motor er koblet fra – kobl motor til, se figur 2.

Opladningsinstruktion Li-ion batteri:

- Sluk for E-Drive på joystick (gule knap)
- Batteriet kan oplades i kørestolen eller tages ud.
- Hvis du vil fjerne batteriet, skal du trække håndtaget op og trække batteriet lodret opad (fig.5).
- Sæt opladeren til batteriet (fig. 6)
- Tilslut batteriopladeren til stikkontakten.

Transport:



Advarsel:

- Brug kun passende fastgørelsespunkter på kørestolen.
- Sluk altid E-Drive under transport.

Den komplette brugervejledning kan findes på www.deconmobility.dk

Mail: mft@decon.dk

Web: www.deconmobility.dk

decon mobility
Hjælpe midler & motorer til kørestole

Gavnøvej 13
8930 Randers
Mob: +45 22434270



Tjek først:

Sørg for, at:

- Stolen er bremsset med kørestolens bremses (fig. 1).
- E-Drive er deaktiveret (figur 2). (Frigear – stolen kan bruges uden motor)
Det gule håndtag på begge sider peger opad/bagud.
- Batteriet er tilstrækkeligt opladet.
Batteristatus.m vist på joystickdisplayet og -styringen(batteriindikatorlampe).
- Antitipperne er godt justeret (se brugervejledning).
- Dækkene har nok luft.



OBS:

- Undgå, at kablerne sidder i spænd, når sidebeskytterne fjernes eller flyttes på kørestolen.

Ud at køre:

1. Aktiver E-Drive ved at skubbe de gule håndtag fremad (fig. 2). E-Drive er aktiveret.
2. Start E-drive:
Joystick:
Tryk på den gule kontakt op til position 1 (fig. 3).
Displayet lyser.
3. Parkeringsbremserne løsnes på begge hjul (fig. 1).

Slukke:

- Slå E-drev fra:
Joystick:
Tryk den gule kontakt ned til position 0 (fig. 3).
Displayet slukkes.



OBS:

- Når E-Drive ikke er i brug i 10 minutter, lukker systemet automatisk ned. (Kan ændres i programmering).



Fig... 1 parkeringsbremse



Fig... 2 Slå slå til/fra



Fig... 3 Joystick: Fastlæg hastigheden, og tænd/sluk for den

Hurtig i gang med E-Drive

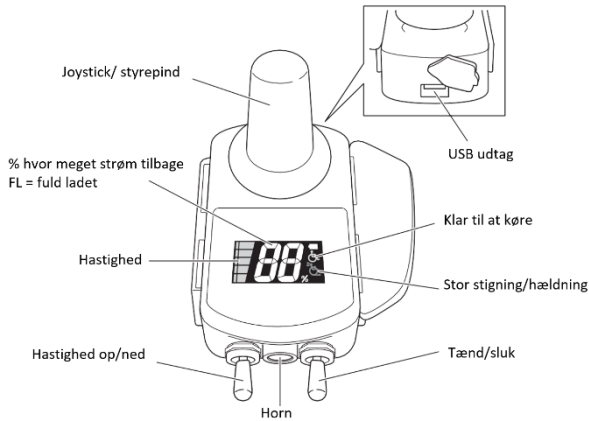


Fig... 4 Joystick/funktioner

Køre:

Joystick:

- Styr kørestolen ved hjælp af joysticket/styrepind.
- Den sorte kontakt bestemmer hastigheden: Op er hurtigere, ned er langsommere (Figur 3).



OBS:

- Hvis der lyder et "kort bip" 4xun der kørslen, er batterikapaciteten for lav. Oplad batteriet.



Tip:

- Joysticket kan indstilles i henhold til dine ønsker – skal din indstilling ændres bedes du kontakte Decon Mobility.



OBS:

- Står der **C1** i displayet, er det fordi motor er koblet fra – kobl motor til, se figur 2.

Fig... 5 Fjern batteri



Opladningsinstruktion:

- Sluk for E-Drive på joystick (gule knap)
- Hvis du vil fjerne batteriet, skal du trykke på den gule udløserknap på batteriet og trække batteriet lodret opad (fig.5).
- Sæt batteriet i opladeren (se Bilag 1.- opladning af NimH batteri)
- Tilslut batteriopladeren til stikkontakten.

Transport:



Advarsel:

- Brug kun passende fastgørelsespunkter på kørestolen.
- Sluk altid E-Drive under transport.

Den komplette brugervejledning kan findes på www.deconmobility.dk

Mail: mft@decon.dk

Web: www.deconmobility.dk

decon mobility
Hjælpe midler & motorer til kørestole


Gavnøvej 13
8930 Randers
Mob: +45 22434270



Batteri opladning E-Drive og E-Move, NIMH Batteri

Batteriet har indbygget computer, der følger hvordan og hvor ofte det oplades.

1. Oplad batteriet når det trænger – oplader slår selv fra. Opladningstid er 3-4 timer.
2. For at holde på kvaliteten af batteriet, skal det sommetider tømmes helt for strøm og lades op igen. – Det holder batteriet selv styr på. Når det trænger vil lampen ved REFRESH knappen på opladeren lyse orange.

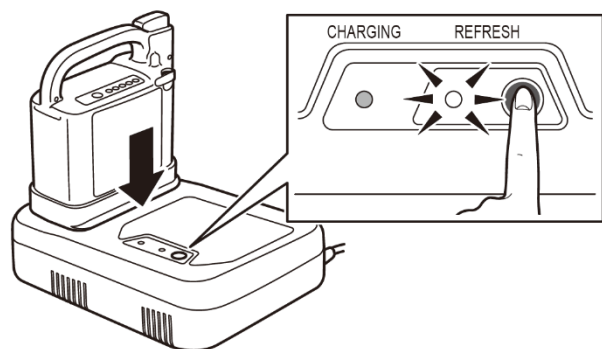

Når den orange lampe lyser på opladeren, så **TRYK** på **REFRESH** knappen.
- Batteriet tømmes for strøm og lades helt op igen - tager ca. 10 timer.
Det er for at holde på kvaliteten af batteriet

OBS – man kan godt oplade batteriet selvom man ikke trykker på REFRESH knappen, så er det bare vigtigt at man gør det næste gang den lyser – for at holde på kapaciteten/kvaliteten af batteriet.