

E-Move

Knappen til højre, når man sidder i stolen, er tænd/sluk
Knappen til venstre, når man sidder i stolen, er mode/program 1/2



Tænd/Sluk

Når man tænder lyser knappen grøn.
Knapperne blinker for at vise hvor meget strøm der er på. Du kan køre med det samme.
E-move slukker selv/standby efter 10min. uden brug



Program 1/2 – Mode knap

Når man tænder lyser knappen blå.

Program 1 - lampen lyser blå.

– motorhjælp lavet typisk til indendørs brug, mellem hjælp.

Program 2 – lampen lyser ikke.

– motorhjælp lavet typisk til udendørs brug, mere hjælp.

Alle indstillinger kan ændres via computer:

Motorhjælp, hastighed, sensibilitet i drivring, retningsstabilitet, hvor langt kører stolen på et tag/skub mm.



E-Move

Kontakt:
Martin Fog Thomsen
Telefon: 22434270
Mail: mft@decon.dk
Web: www.deconmobility.dk