

MADE IN  
EUROPE



Vores produkter og  
råvarer er produceret i  
Europa

Vælg kvalitet, spar  
penge og skån miljøet.

# (DK) Brugervejledning

27\_20230202\_DK

## Master Skjold



Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
○ MC 001-5005	30752	Master Skjold - S	5744001971260
○ MC 001-5010	30753	Master Skjold - M	5744001971277
○ MC 001-5015	30754	Master Skjold - L	5744001971284

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 24

The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



# Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

## **MDR (EU) 2017/745:**

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

## **Erklærede formål for produktet:**

Produktet fjerner friktionen fra kørestolens dæk under forflytning og bruges til at afskærme dækket, så bruger ikke hænger fast i gummi ved forflytning eller får beskidte bukser. Skal monteres og fjernes ved hver forflytning.

## **Anvendelse af produktet:**

Produktet placeres på dækket inden forflytning og fjernes igen efter.

## **Advarsel:**

Sikker altid at produktets bredde passer til dækkets bredde, inden det påføres.

## **Risikovurdering:**

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

## **Kendskab til produktet/forflytning:**

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

## **Levetid:**

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Produkter bør efterses jævnligt, og hvis overfladen er defekte eller i stykker, bør produktet kasseres.

## **Garanti:**

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

## **Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:**

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



# Brugervejledning - Master Skjold

## Valg af størrelse:



1. Størrelse af Master Skjold vælges ud fra dækkets bredde.



2. Master Skjold monteres let på dækket. Skjoldet må ikke glide på dækket og skal ikke presses ned over dækket. I så fald vælges en mindre/større variant.

## Montering og brug:



3. Placer kørestolen langs sengekanten.



4. Monter Master Skjold på kørestolsdækket, hvor bagdelen vil ramme dækket.



5. Bruger kan nu forflytte sig ugeneret over dækkets gummibelægning.



6. Fjern Master Skjold efter brug, da den ellers vil kunne sætte sig fast i bremsen eller flække.

# Brugervejledning - Master Skjold

## Tekniske specifikationer

### Materialer:

ABS

Varenummer - Navn	Størrelse dæk bredde:	Max. Brugervægt:
MC 001-5005 Master Skjold - S	max. 25 mm	135 kg
MC 001-5010 Master Skjold - M	max. 31 mm	135 kg
MC 001-5015 Master Skjold - L	max. 33 mm	135 kg

## ADVARSLER



Sørg for, at alle relevante bremses er låst, inden forflytning foretages.



### CE-mærkning:

Produktet er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



### Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 135 kg.



### Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



### Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



### Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



### Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt, og hvis overfladen er defekt eller i stykker, bør produktet kasseres.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer  
Quick Guide mm.,  
se [www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)

