


Liko Originalsejl Høj Ryg, mod. 20, 21

Brugsanvisning

7DK160136-01

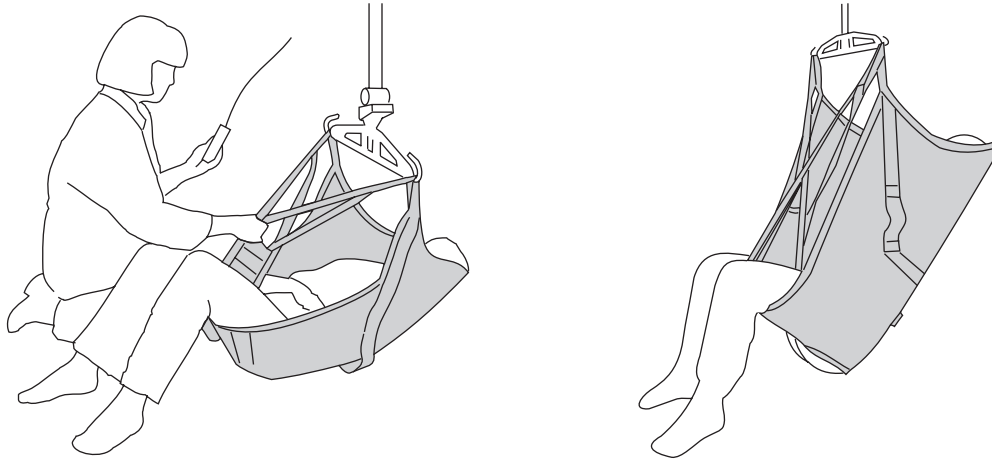

Liko Originalsejl Høj Ryg

Liko Originalsejl Høj Ryg er et løftesejl, som brugeren ikke sidder på. Derfor er det meget let at lægge på og tage af. Originalsejl Høj Ryg er designet til at tilpasse sig brugeren uden individuelle indstillinger. Et rigtigt afprøvet og grundigt påsat løftesejl giver brugeren en god tryghedsfølelse og stor komfort.

Liko Originalsejl Høj Ryg giver støtte til hele kroppen og en noget tilbagelænet siddestilling, hvilket passer godt til brugere med nedsat kropsstabilitet. Til større vidde af løftesejlet kan en kombination med Liko Universalåg 670 Twin være et godt valg.

Liko Originalsejl Høj Ryg anbefales ved løft til eller fra gulv.

Liko Originalsejl Høj Ryg findes i syv forskellige størrelser. Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse for at opnå den største komfort og sikkerhed. Et for stort løftesejl øger risikoen for, at brugeren glider ud, mens et for lille løftesejl bliver snævert i skridtet, hvilket kan give ubehag.

Liko Originalsejl Høj Ryg findes i syv forskellige materialer. Da brugeren sædvanligvis ikke bliver siddende i løftesejlet efter løftet, anbefaler vi udførelsen i polyester, som er meget slidstærkt og

let at arbejde med, da det har lav friktion. Let at lægge og tage af.

Liko Originalsejl Høj Ryg fås også i bomuld og i polyesternetvæv, hvis løftesejlet efterlades under brugeren i stolen efter løftet eller hvis der ganske enkelt ønskes et mere luftigt alternativ.

Til kar- og brusebad fås en udførelse i plastbehandlet netvæv, som vandet kan trænge igennem, og som kan aftørres. Det tørrer hurtigere og virker ikke koldt på samme måde som et gennemblødt tekstilsejl.

Liko Originalsejl Høj Ryg findes med benstøtte i flere forskellige udførelser:

- Benstøtte med afstivende indlæg er den mest gængse udførelse. Det giver stor komfort, udjævner tryk og forhindrer, at benstøtten folder under lårene.
- Enkelt stof uden afstivning i benstøtterne gør løftesejlet fleksibelt og nemt at anvende.
- Benstøtte med blød polstring (syntetisk fåreskind) fås til personer, der er særlig følsomme overfor tryk.

Løftestropperne er fremstillet af slidstærk polyester og er dermed meget sikre.


△ er en advarselstrekant til situationer, hvor du skal være særlig opmærksom.

I brugsanvisningen kaldes den, der løftes, for brugeren, og den, der hjælper, for medhjælperen.

△ Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse. Brugsanvisninger kan downloades gratis på www.liko.com.



Liko Originalsejl Høj Ryg

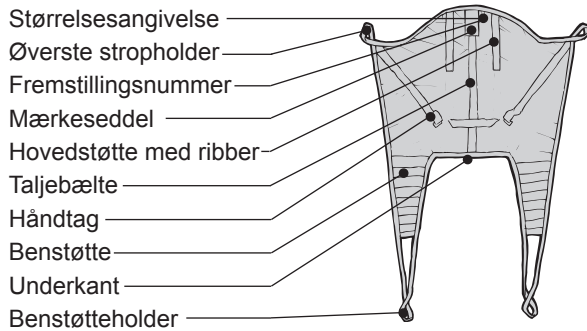


△Tænk på!

- Om der er behov for én eller flere hjælpere, bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftesituationen inden løft, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- På trods af at Likos løfteåg er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Det er vigtigt, inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt ordentligt, at kontrollere at stropperne er korrekt hængt på løfteåget.
- Løft aldrig brugeren højere fra underlaget end nødvendigt for løftets gennemførelse.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Check at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste under arbejdsmomentet.

Løft fra siddende stilling


Ifølge de ergonomiske principper anbefales det, at der er to medhjælpere til at lægge løftesejlet på. Normalt er det nødvendigt, at brugeren bøjer sig fremover, når sejlet fastgøres, og så er det vigtigt, at der står en medhjælper foran brugeren for at forhindre, at denne falder forover.

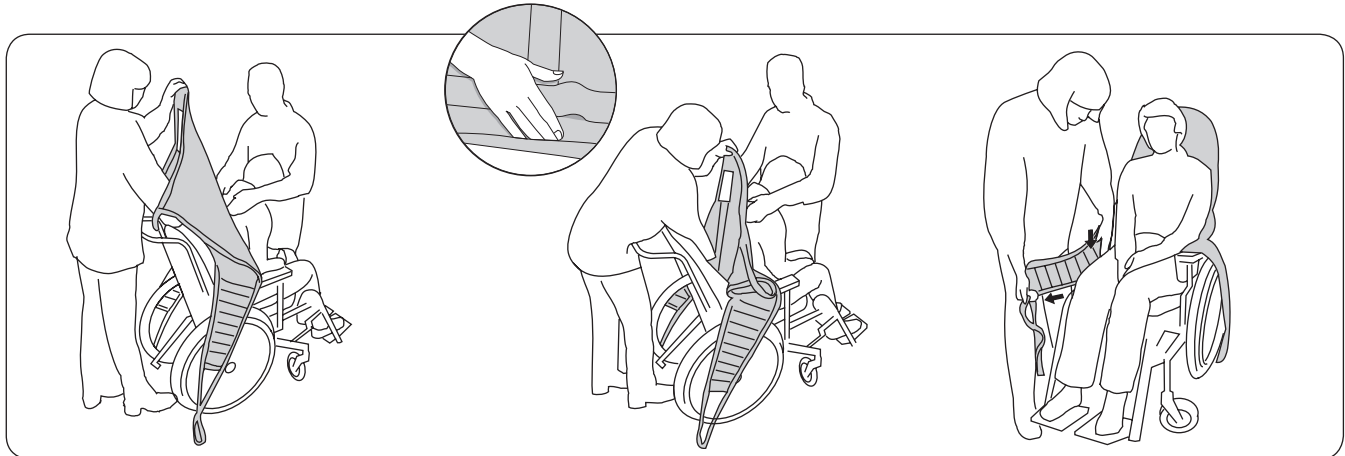

Placer løftesejlet bag brugerens ryg. Mærkesedlen placeres udad. Bøj underkanten rundt om fingerspidserne for lettere at styre løftesejlet på plads.

Med håndfladen trykkes løftesejlets underkant ned til brugerens haleben. **Det er meget vigtigt.** Det er lettere at lægge sejlet rigtigt på, hvis brugeren bøjer sig lidt fremover.

Træk løftesejlets benstøtte ud og ned langs det yderste af lårene. **Tips!** Med din håndflade mellem kroppen og løftesejlet, fører du benstøttens nedre kantebånd ned til sædet. Træk samtidig benstøtten fremad med den anden hånd for at strække den ud.

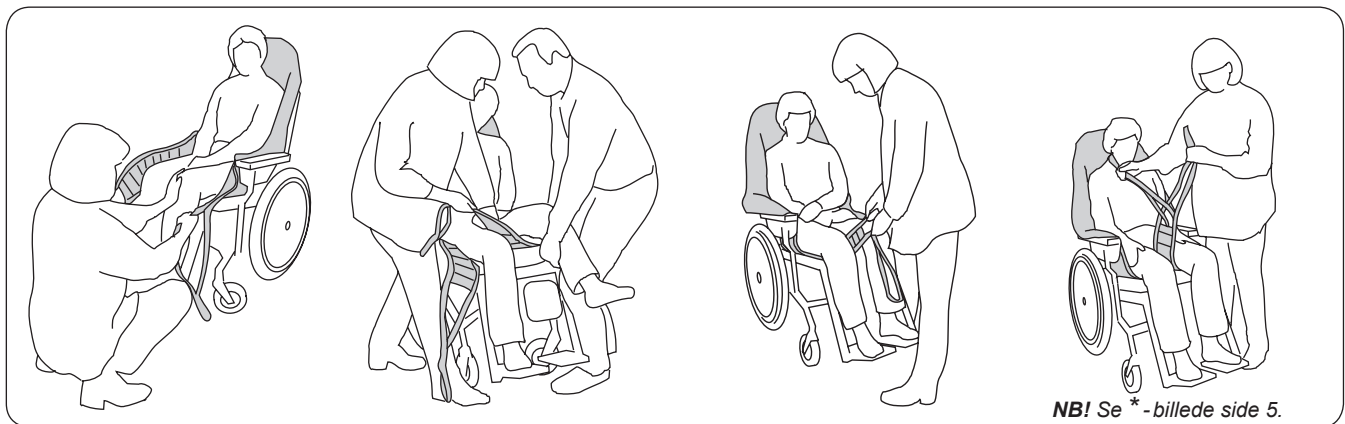

Tips! Med et let tryk på brugerens knæ kan man trække benstøtten frem, så eventuelle folder bagtil rettes ud. Kontrollér, at begge benstøtter når lige langt frem.


Før løftesejlets benstøtte ind under hvert lår. Sørg for, at stoffet ligger glat under lårbenet, og at den når ordentligt rundt om benet.

Benstøtten anbringes normalvis sådan, at den ene benstøtte trækkes igennem den anden, inden påsætning på løfteåget. Hæng de øverste båndstropper på løfteåget og hæng derefter benstøttens stropholdere på.

NB! Se *-billede side 5.

Løft fra liggende stilling

Tænk på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævnings og sænkning.

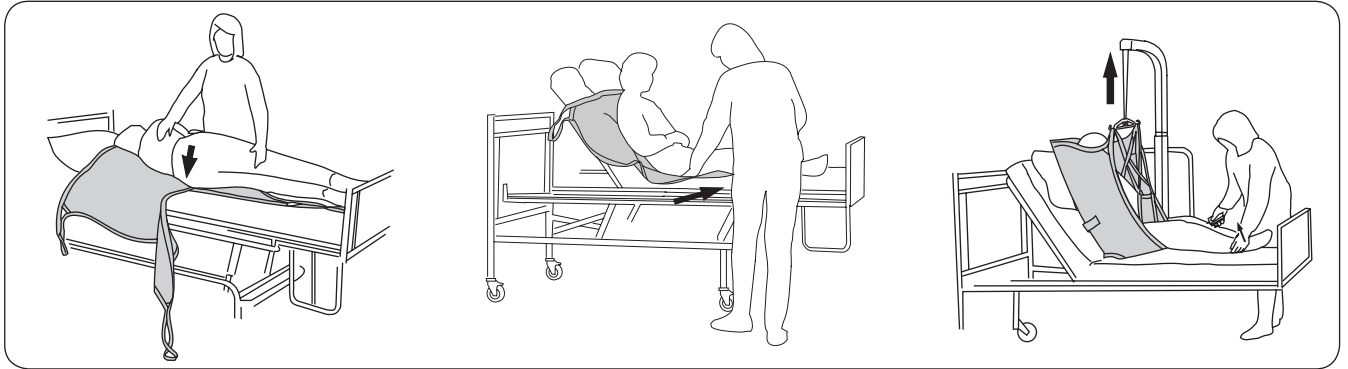

Vend brugeren mod dig selv for at undgå, at denne falder ud af sengen. Placer løftesejlets kant så langt ind under brugeren som muligt og med underkanten **i niveau med halebenet**. Fold løftesejlet et par gange, så taljebåndet er i niveau med brugerens ryggrad, når brugeren forsigtigt vendes om. Træk forsigtigt løftesejlet ud på den anden side. Rejs rygstøtten op.

Læg benstøtten på plads under låret. Det gøres nemmest, hvis brugeren bøjer knæene. Sørg for, at stoffet ligger glat, og at det når ordentligt rundt om benene. Benstøtten kan sættes på forskellige måder (se side 5).


Placer eventuelt en lille pude bag brugerens hoved. Hæng først de øverste båndstropper på løfteåget og derefter de nederste. Løft.

Alternativ placering af løftesejlet: Rejs sengens rygstøtte op bag brugeren. Læg løftesejlet på sengen med mærkesedlen nedad. Før løftesejlet ned bag brugerens ryg, så langt at underkanten **når ned til halebenet**. Placeringen bliver nemmere, hvis brugeren bøjer sig frem.

Løft fra gulv

Her beskrives løft fra gulv med Likos mobilflifte Golvo. Samme teknik gælder også ved løft med øvrige mobilflifte fra Liko. Naturligvis kan man også udmærket foretage løft fra gulv med Likos stationære lifte.

Tips! En pude under brugerens hoved føles behageligt!

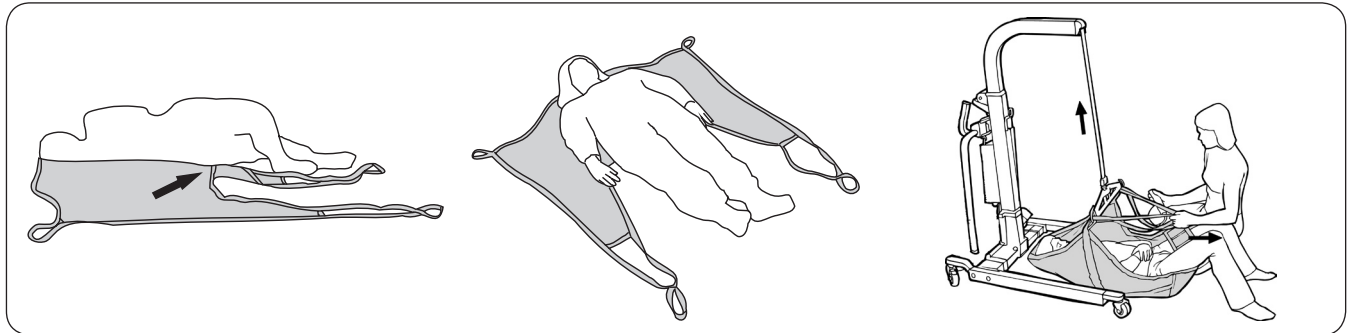


Vend brugeren forsigtigt ud til siden og placer løftesejlets kant så langt inde under brugeren som muligt og med underkanten **i niveau med halebenet**. Fold løftesejlet et par gange, så taljebåndet er i niveau med brugerens ryggrad, når brugeren vendes forsigtigt om.

Vend brugeren forsigtigt om på den anden side og træk løftesejlet ud. Kontrollér, at løftesejlet ligger symmetrisk under brugeren – justér placeringen. Placer benstøtten under hvert lår.


Ret benstøtten til under brugerens ben. NB! Hold benstøtten væk fra skridtet for at forhindre ubehag for brugeren.

Δ Mobilfliften skal være låst, når man løfter med brugerens hoved mod liften.

Løft til gulv

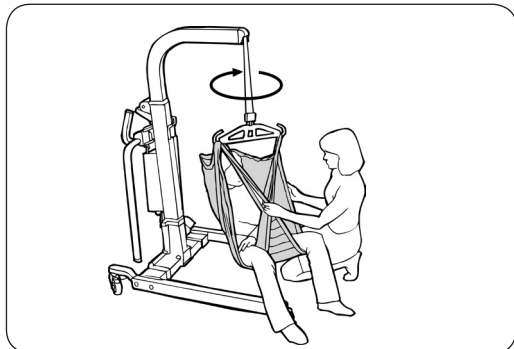


Når brugeren løftes op fra gulvet, kan man dreje denne lidt for at give mere plads til hovedet.

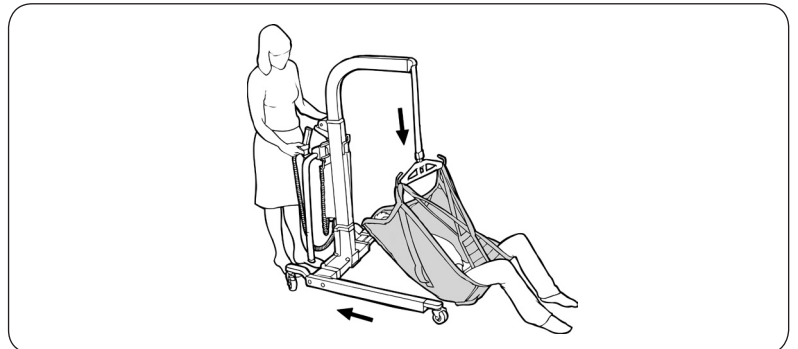

Ved løft til gulv skal liftens hjul ikke være låst. Når brugeren berører gulvet, trækkes liften bagud for at give plads til hovedet. **Tips!** Hvis løftet sker til en tynd gymnastikmatte, kan liften køres inde under denne matte, der fungerer som et blødt beskyttende lag mellem liften og brugeren.

Løft til kørestol

Ved placering i kørestol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkelig langt tilbage i kørestolen for at sidde godt. Det kan gøres på flere måder.

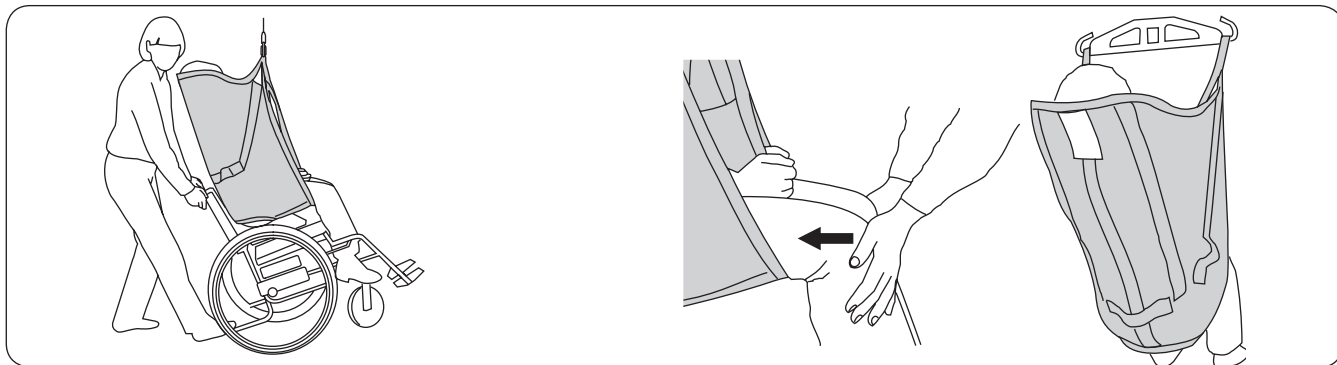

For at gøre placeringen i kørestolen mere smidig, kan man skubbe stolen skråt bagud under sænkningen. Lad bagdelen glide ned langs ryglænet det sidste stykke. Kontrollér kørestolens indstilling med foden på antitip.

En alternativ metode er at trykke let på brugerens knæ under sænkningen, så bagdelen trykkes ind mod kørestolens ryg. Hvis der er håndtag på løftesejlet, kan man styre med disse. **△ For stor belastning på håndtagene kan resultere i, at løftesejlet brister. Løft ikke i håndtagene!**

Sådan fjernes løftesejlet

Vi anbefaler, at løftesejlet fjernes efter løftet. Hvis man alligevel ønsker at efterlade løftesejlet i stolen efter løftet, anbefaler vi et løftesejl i bomuld eller polyester netvæv.




Fjern benstøtterne forsigtigt. Det sker mest skånsomt ved at trække stropperne ud under benstøttens stofdel.

Fjern løftesejlet ved at trække den forsigtigt opad.

Løft til liggende stilling

Tænk på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævnning og sænkning.

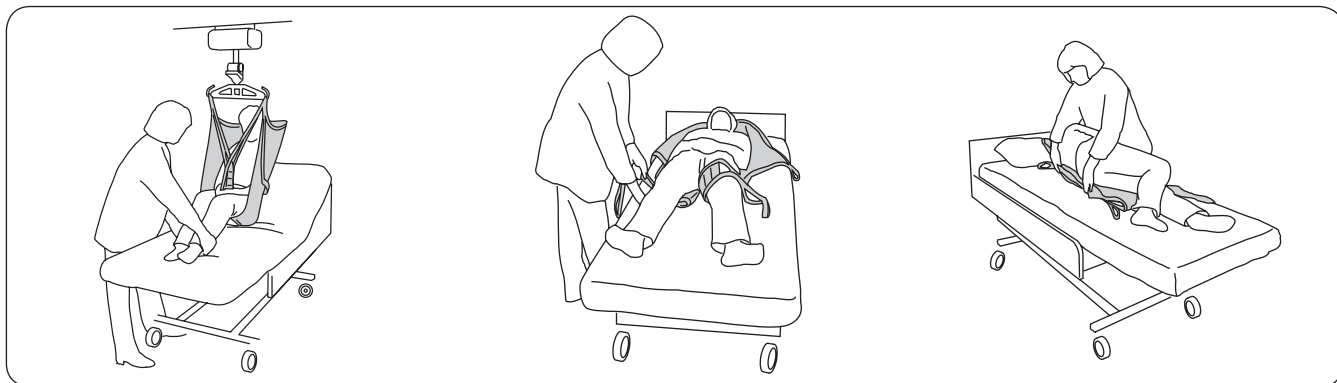


Før brugeren ind over sengen og rejs rygstøtten op for at gøre det mest behageligt for brugeren. Sænk brugeren ned til sengen. Læg rygstøtten ned.

Benstøtten fjernes ved, at man trækker stropperne ud under stofdelen.

Vend brugeren forsigtigt ud til siden og rul løftesejlet ind under denne. Vend brugeren forsigtigt om på ryggen og træk løftesejlet forsigtigt væk.
Alternativ. Fjern løftesejlet ved forsigtigt at trække den opad med brugeren i siddende stilling.

Oversigt over Liko Originalsejl Høj Ryg, mod. 20, 21

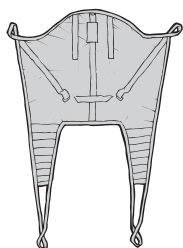

Produkt	Art. Nr.	Størrelse	Personvægt*
Liko Originalsejl Høj Ryg	3520 -- 3	XS Extra Small	10-20 kg
Liko Originalsejl Høj Ryg	3520 -- 4	S Small (børn)	20-30 kg
Liko Originalsejl Høj Ryg	3521 -- 5	MS Medium Slim (lille voksen)	30-50 kg
Liko Originalsejl Høj Ryg	3520 -- 5	M Medium	40-80 kg
Liko Originalsejl Høj Ryg	3520 -- 6	L Large	70-120 kg
Liko Originalsejl Høj Ryg	3520 -- 7	XL Extra Large	120-200 kg
Liko Originalsejl Høj Ryg	3520 -- 8	XXL Extra Extra Large	200-300 kg

* NB! Den angivne personvægt er kun vejledende - afvigelser kan forekomme.

For stor størrelse medfører risiko for, at personen glider ud, for lille størrelse kan medføre, at benstøtten skærer ind i skridtet og giver ubehag.

Likos løftesejl er godkendt til en vægt på maks. 200 kg eller mere, se produktmærkningen.

3520 -- 5

1 Polyester 2 Bomuld 3 Polyester netvæv 4 Plastbehandlet netvæv, der kan aftørres, også med sprit.

0 Uden afstivning eller polstring
 1 Afstivet benstøtte
 2 Benstøtte polstret med syntetisk fåreskind
 6 Afstivet benstøtte og rygdel (kun visse størrelser)

Bestillingseksempel: Varenr. 3520115

Liko Originalsejl, polyester, afstivet benstøtte, medium. Høj Ryg

Vaskeanvisning: Tørretumbling frarådes.

Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkeseddel inden vask!

Anbefalede kombinationer
 Liko Originalsejl Høj Ryg
 og Likos løfteåg:

	Miniåg 220	Small åg 350	Universalåg 350	Standard 450	Universalåg 450	Universalåg 670 *	Bredt åg 670	Univ. 670 Twin	Firpunktsbøjle	Krydsåg 450	Krydsåg 670	Sidebøjler + Universalåg 450	Sidebøjler + Universalåg 670
Originalsejl Høj Ryg, XS	2	1	+1	1	1	4	3	3	1	1	3	2	
Originalsejl Høj Ryg, S	2	1	1	1	1	4	3	3	1	1	3	2	
Originalsejl Høj Ryg, MS	3	2	2	1	1	3	3	3	1	1	2	2	
Originalsejl Høj Ryg, M	3	2	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	
Originalsejl Høj Ryg, L	3	3	3	1	1	2	1	+1	1	3	1	1	
Originalsejl Høj Ryg, XL	4	3	3	2	2	2	1	1	2	3	1	1	
Originalsejl Høj Ryg, XXL	4	4	4	4	3	2	2	2	2	4	1	2	

Forklaring:
 +1 Bedst
 1 Anbefales
 2 Acceptabelt
 3 Frarådes
 4 U hensigtsmæssigt

* Benstøtterne skal overlape hinanden under benene, ikke krydses foran kroppen.

CE Medicinteknisk klasse I produkt

Liko Originalsejl Høj Ryg er afprøvet af et godkendt testinstitut og opfylder alle krav ifølge MDD klasse I-produkter, den opfylder alle krav jf. den harmoniserede standard EN ISO 10535.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

⚠️ Vigtigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og lifttilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformerede personale bør anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadiget lifttilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.

Liko

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
 SE-975 92 Luleå
 Sweden
 info@liko.se

Forhandler i Danmark:

Botved Plejeudstyr A/S
 Nørrelundvej 5
 2730 Herlev
 Tilf: 80373737
 Fax: 70203737
 info@botved.dk

