

CE

# BRUGSANVISNING FOR

dan  
rehab a/s

13-15 messingvej  
dk-8940 randers sv

tel. (+45) 8644 7355  
fax (+45) 8644 7770

info@danrehab.dk  
www.danrehab.dk

**MAJ** (HMI-nr. 02780)

**JULIE** (HMI-nr. 01771)



## RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE:

Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter toiletforhøjerer spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud. **Nylongjord, teleskopben, sæde, gummidupper og låseclips** efterses med jævne mellemrum.

**Udskift** ødelagte (eller slidte) dele: **HELLERE ÉN GANG FOR MEGET END ÉN FOR LIDT !**



BELAST IKKE armlæn eller ryglæn (=låg) med hele kropsvægten – stående ved side af, foran eller bag toiletforhøjeren – da en evt. tipningsfare derved kan opstå.

1. Fjern teleskopbenenes **låseclips** (A).
2. Træk forhøjereens **teleskopben** (B) ud (eller skub dem ind) således, at det svarer til den ønskede forhøjelse af toiletet - dog IKKE så højt, at brugeren ikke støtter fladt med fødderne på gulvet.
3. Isæt låseclipsene igen. Sørg for, at de er skubbet HELT i bund i hullerne i stellet.
4. Slå sædet på toiletkummen op.
5. Placér toiletforhøjeren over **toiletkummen**.
6. Alt efter forhøjelsens omfang anvendes en **stænkskærm** (C).
7. **JULIE** og **MAJ** kan også anvendes som fritstående toiletstol, hvis en spand bruges i stedet for en stænkskærm. En **nylongjord** (D) fungerer som støtte for låget på toiletforhøjeren.
8. Hvis gulvet omkring toiletkummen er skævt eller ujævnt, kan ét af teleskopbenene forsynes med en **stilleskrue**.

Vi – **dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV** – erklærer på eget ansvar, at **JULIE** og **MAJ** er i overensstemmelse med European Standard EN 1441 (1997) i henhold til bestemmelserne i EU Direktiv 93/ 24 EEC.