

# ASK 2

(HMI-nr. 22572)





### Hvordan indstilles sædehøjden:


1. Træk låseclipsen (A) ud – ét ben ad gangen.
2. Træk/ skub benet ud/ ind i den ønskede længde.
3. Sæt låseclipsen i igen.

Vær omhyggelig med, at den er skubbet ordentligt på plads.



### Ved sidelæns forflytning:

1. Slå stolens armlæn (B) for at lette forflytningen.
2. Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen.
3. Til urolige brugere anbefales en armlænslås, så armlænet ikke utilsigtet slås op igen.

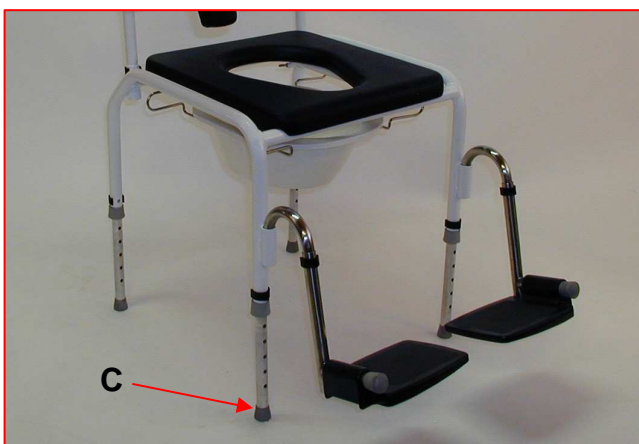

### Ved ind- og udstigning:

1. Sørg altid for, at stolen står sikkert på gulvet – at den har en god balance, FØR brugeren tager plads.
2. På meget skæve gulve kan det være nødvendigt at forsyne ét af benene med en stilleskrue (C).

(Som standard leveres stolen med fire teleskopben med skridhæmmende gummidupsko.)

**Ved toiletbrug:**

- A. Stolen placeres hen over toiletkummen – sørg for, at stolen står stabilt. Afhængigt af den indstillede sædehøjde kan stolen efter skøn forsynes med en stænkskærm.

**eller**

- B. Stolen placeres efter ønske, og en spand eller et bækken placeres i bækken-gliderne under sædet. (Bækkengliderne er indstillelige i bredden og kan tilpasses stort enhver type bækken eller spand.).

**Ved badebrug:**

1. Stolen placeres, hvor brusebadningen/ afvaskningen skal finde sted - sørg for, at stolen står stabilt.
2. Ryglænsbøjlen (og med denne armlænene) kan evt. tages helt af for at lette afvaskningen:



- a. Fjern de to låseclips (D) bagpå stolen (i sædehøjde), som holder ryglænsbøjlen på plads.
- b. Efter vask genplaceres ryglænsbøjlen, og de to låseclips isættes igen.
- c. Stolen kan forsynes med et polstret oversæde uden toiletåbning, som lægges oven på stolens toiletsæde. Herved sidder brugeren måske mere behageligt og under alle omstændigheder mere oprejst.

**SE BRUGSVEJLEDNING FOR FODHVILERE PÅ SIDSTE SIDE.**

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

**Dupskoene** efterses med jævne mellemrum og **udskiftes** eventuelt – hvis de er slidte, SKAL de udskiftes for at bevare deres skridhæmmende egenskaber.


## EXTRA TILBEHØR:

ALBUESTOP til montering på armlæn med skålformet PUR-pude  
AMPUTATIONSSTØTTE med polstret pude, h/v  
ARMLÆN med skålformet (hemi-) armpude i PUR, h/v  
ARMLÆN, som øger stolens indvendige bredde med 2.5 cm, h/v  
ARMLÆN, som øger stolens indvendige bredde med 5 cm, h/v  
ARMLÆN, som er sænket (reducerer sæde-armlæn afstanden), h/v  
ARMLÆNSLÅS (mod utilsigtet opklapning af armlæn)  
BORD, nedfældeligt, indstilleligt (incl. armlæn med beslag)  
ELEVERBAR BENHVILER m/ PUR-støtte, højre ben  
ELEVERBAR BENHVILER m/ PUR-støtte, venstre ben  
FODHVILERE, længdeindst. svingbare, aftagelige  
FODPLADE, polstret, udelt  
HÆL-/ LÆGSTØTTE til fodhvilere  
OVERSÆDE, polstret, uden rørclips  
OVERSÆDE, polstret, med fire rørclips  
SIDEØTTE, polstret pude, indstillelig  
SIDEØTTE, PUR-pude, indstillelig  
SIKKERHEDSBØJLE, indstillelig i tre positioner  
SPAND  
SPANDELÅG (til model 01111-SP)  
SÆDEPUDE uden toiletåbning  
SÆDEPUDE med toiletåbning

MODEL 01041-AS  
MODEL 22572-AKH/ -AKV  
MODEL 01041-HH/ -HV  
MODEL 01041-XBH/ -XBV  
MODEL 01041-XBH5/ -XBV5  
MODEL 01041-FH/ -FV  
MODEL 01043  
MODEL ERGO-B  
MODEL 01056-H  
MODEL 01056-V  
MODEL 01055  
MODEL 01055-PL  
MODEL 01052  
MODEL 01042  
MODEL 01042-ET2  
MODEL ERGO-SI  
MODEL ERGO-SIP  
MODEL 22572-SB  
MODEL 01111-SP  
MODEL 01111-SPL  
MODEL 12370  
MODEL 01858

**ANDET ØNSKET TILBEHØR FREMSTILLES EFTER OPGAVER.**

## FODHVILERE MODEL 01055

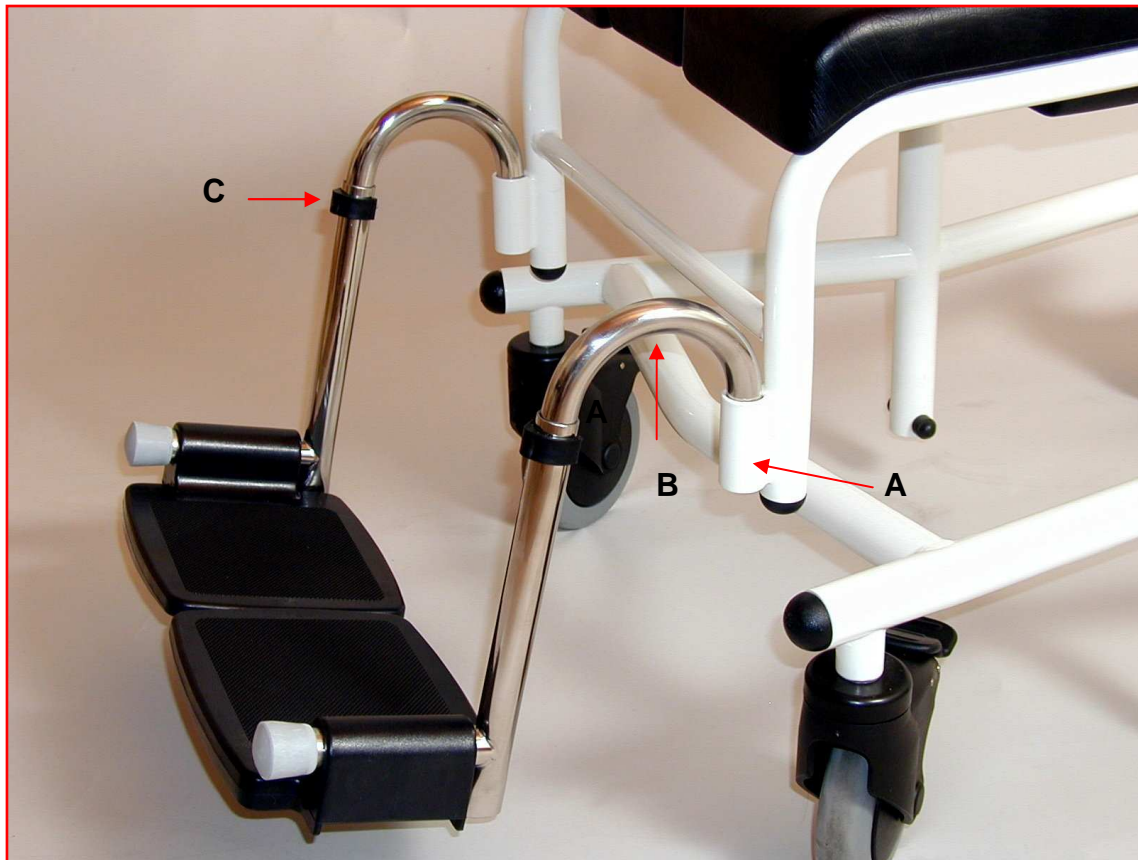

Hvert fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere til højre henholdsvis venstre fod.

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er påsvejet stolens forben. I beslaget er indsvejet en tværstang, som passer til fodhvilerens slidser og derved låser for sidedrej. *Disse slidser kan i øvrigt have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, FØR de monteres på stolen.*
2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, løftes fodhvileren (*nærmest i krumningen (B)*) cirka én cm lodret: Herved glider de omtalte slidser fri af tværstangen, og fodhvileren kan nu drejes (eller tages helt af).
3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclip (C), trække (eller skubbe) fodhvilerens inderrør til den ønskede længde og derefter sætte dens låseclip på plads igen.
4. Fodhvilerne kan også forsynes med et indstilleligt lægbånd MODEL **01052**. Det er fremstillet i skai med velcrolukning til at stramme eller slække.

**OBS ! Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.**

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at ASK 2, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182

Filnavn: ASK 2 brugsanvisning  
Bibliotek: C:\Documents and Settings\lars\Skrivebord\BRUGSANVISNINGER  
ASK  
Skabelon: C:\Documents and Settings\lars\Application  
Data\Microsoft\Skabeloner\Normal.dot  
Titel: BRUGSANVISNING fodhvilere model 01055  
Emne:  
Forfatter: lars  
Nøgleord:  
Kommentarer:  
Oprettelsesdato: 2-06-2010 09:04:00  
Versionsnummer: 4  
Senest gemt: 2-06-2010 09:27:00  
Senest gemt af: lars  
Redigeringstid: 10 minutter  
Senest udskrevet: 2-06-2010 09:30:00  
Ved seneste fulde udskrift  
Sider: 5  
Ord: 846 (ca.)  
Tegn: 5.163 (ca.)