


# Brugsanvisning Iltflaskeholder Til Troja/Olympos




## Montering: (Troja)

- 1) Sæt karabinhagen på stelkrogen <sup>(A)</sup> i venstre side - se billede 1+2
- 2) Gør det samme i højre side
- 3) Læg iltflasken i holderen og stram snoren

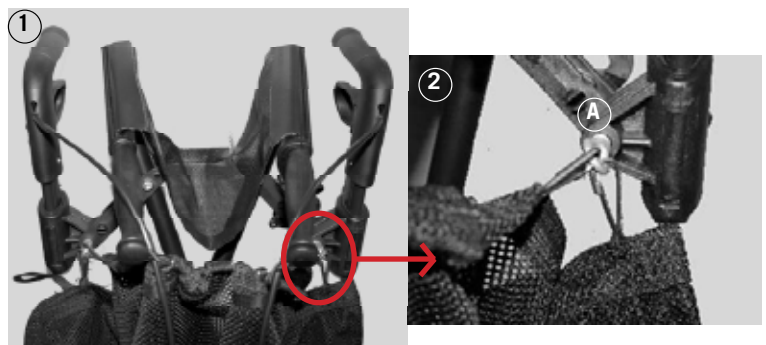

## Montering: (Olympos)

- 1) Fjern elastikken fra venstre stelkrog <sup>(A)</sup>  
- se billede 3+4
- 2) Sæt karabinhagen på stelkrogen <sup>(A)</sup>
- 3) Sæt elastikken tilbage på stelkrogen <sup>(A)</sup>  
- se billede 5
- 4) Gør det samme i højre side
- 5) Læg iltflasken i holderen og stram snoren

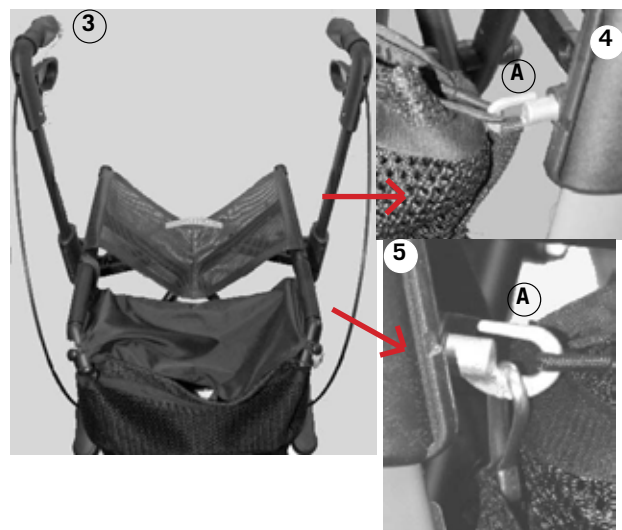

**Maks. vægt for iltflaske: 5 kg.**