



Dansk Høreteknik

...lyd giver liv!

Brugervejledning

Shake Awake Jumbo 901

Vibratovækkeur



Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901.


Vågn op om morgenen uden at vække naboen! Læg vibratoren under hovedpuden og bliv vækket lydløst, men effektivt. Vibratoren har hele 2 meter ledning. Snooze-knappen lyser ved alarm, så du kan se, hvor du skal trykke for at slukke. Vil du hellere vågne til et almindeligt alarm signal, er det også muligt. Volumen og tonen kan reguleres. Uret har store tal, så du klart og tydeligt kan se, hvad klokken er.

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse	4
Forside	4
Bagside	5
Anvendelse	6
Tilslutning	6
Indstilling af uret	6
Indstilling af alarm	6
Snooze	6
Sluk for alarm	6
Dimmer	6
Volume	6
Tone	7
Vibrationer	7
Batteri	7
Rengøring	7
Fejlsøgning	7
Garanti	8


Beskrivelse

FORSIDE

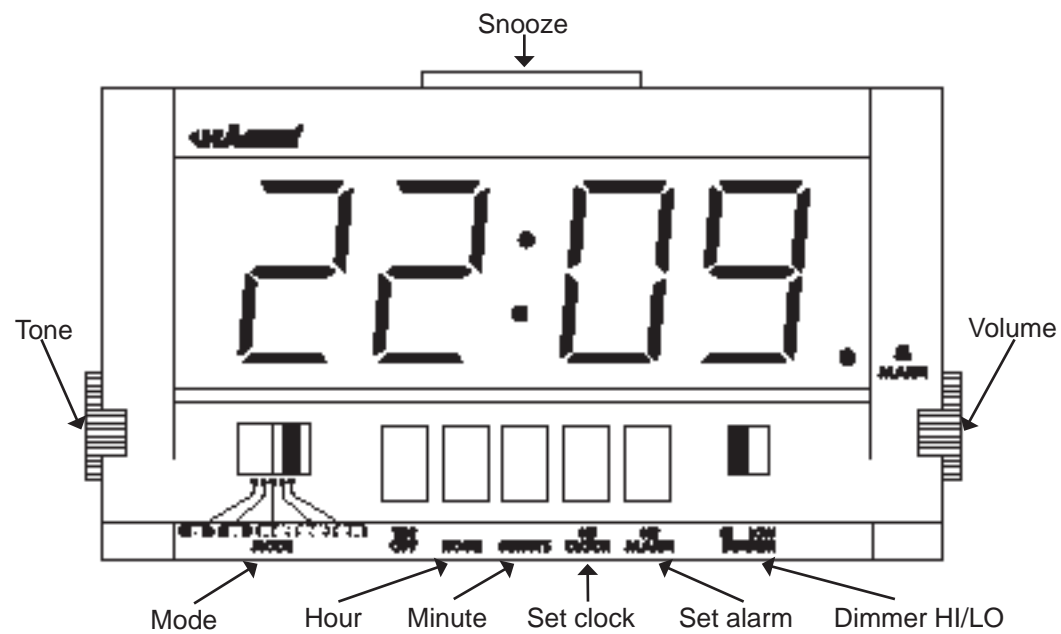

Beskrivelse

BAGSIDE

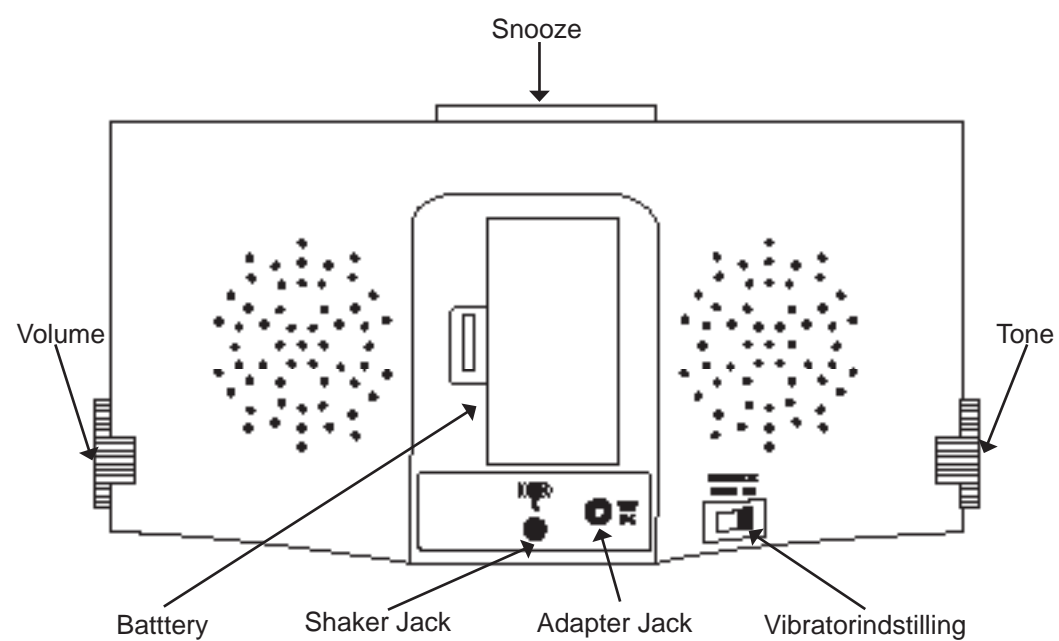

Anvendelse

Tilslutning

Begynd med at slutte ledningen fra netadapteren til udgangen på bagsiden. Isæt derefter netadapteren i en almindelig stikkontakt. Tallene i displayet lyser. Du kan isætte et 9V batteri som sikkerhed, hvis strømmen går (batterirummet er under dækslet på bagsiden). Ved strømafbrydelse vil uret ikke miste tid, selvom tallene slukker. Så snart strømmen kommer tilbage, viser uret korrekt tid igen. Slut vibratoren til udgangen på bagsiden. Placér vibratoren under f.eks. hovedpuden.

Indstilling af uret

Tryk på og hold SET CLOCK knappen nede. Tryk på HOUR (time) og MIN (minut) indtil uret viser korrekt tid. Slip derefter SET CLOCK.

Indstilling af alarm

Tryk på og hold SET ALARM knappen nede. Tryk på HOUR (time) og MIN (minut) indtil uret viser korrekt tidspunkt. Slip derefter SET ALARM. Vælg typen af vækning med MODE-vælgeren. Du kan vælge imellem følgende:

- AUDIO – lydsignal + lysende snooze-knap
- SHAKER – shaker + lysende snooze-knap
- LAMP – kun lysende snooze-knap
- OFF – alt slukket

Snooze

God til dem der vil ligge lidt længere. Tryk på SNOOZE og alarmen slukker, men går i gang igen efter 9 minutter.

Sluk for alarm

Flyt MODE-vælgeren til OFF (længst til venstre).

Dimmer

Med denne knap justerer du, hvor meget tallene skal lyse.

Volume

Drej på denne knap for at justere lydstyrken for alarmsignalet.

Anvendelse

Tone

Drej på denne knap for at justere på tonehøjden for alarmsignalet.

Vibrationer

Der kan på bagsiden vælges mellem 2 typer vibrationer.

Batteri

Batteri er ikke nødvendigt for funktionen, men med isat batteri slipper du for at stille uret igen efter strømafbrydelse. Vælger du at isætte et batteri, bør det være et 9V Alkaline batteri. Kontroller batteriet mindst en gang om året. Gamle batterier kan lække, og det ødelækker dit vækkeur.

Rengøring

Vækkeuret kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler. Placér ikke vækkeuret i stærkt sollys. Uret er til indendørs brug og bør derfor ikke udsættes for fugt eller ekstreme temperaturer.

Fejlsøgning

Ingen tal i displayet

Kontroller at adapteren er tilsluttet udgangen på bagsiden af apparatet. Kontroller at adapteren sidder i en fungerende stikkontakt. Kontroller evt. stikkontakten med en fungerende lampe. Fungerer uret stadig ikke - gå videre til GARANTI.

Vibratoren virker ikke

Kontroller at vibratoren er tilsluttet udgangen på bagsiden af apparatet. Kontroller at MODE-vælgeren står i SHAKER-position. Indstil til en vækning om 2 minutter for at se om vibratoren så virker. Fungerer vibratoren stadig ikke - gå videre til GARANTI.

Alarmen lyder ikke

Kontroller at MODE-vælgeren står i position AUDIO. Indstil en vækning for at se om alarmen går i gang. Justér lydstyrken med VOLUME. Fungerer alarmen stadig ikke – gå videre til GARANTI.

Garanti

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler