

### Placer puden rigtigt:

De to ventiler og håndtaget skal altid placeres frem. Vær opmærksom på følgende når du monterer betrækket – eksempelvis efter vask:

Placer puden, så de to ventiler vender frem

Til hjælp ved montering af betrækket, er puden, samt betrækket mærket med FRONT (frem)

### Hvordan justeres puden:

Meridian puden har 2 separate kamre. Det bagerste kammer der justeres via højre ventil, og det forreste kammer, der justeres via venstre ventil.

1. Åben for begge ventiler, uden at sidde på puden, så vil puden fyldes med luft.
2. Luk for begge ventiler.
3. Sid ned på puden. Korrigér evt. siddestillingen hvis brugeren sidder asymmetrisk.
4. Åben for højre ventil (det bagerste kammer) og lad luften sive ud, luk for ventilen straks inden lufttrykket er aftaget.
5. Åben for venstre ventil (det forreste kammer) og lad luften langsomt sive ud, til brugeren får optimal trykaflastning og positionering.
6. Luk for ventilen.

OBS. Dette er en generel instruktion. Hver enkelt bruger er unik og har behov for individuel indstilling.

### Tilpasning af Varilite puder:

For yderligere at modvirke fremadglidning i puden, kan der placeres en kile eller wave kile mellem betræk og pude under pudens forkant.

### Rengøring, reparation og vedligeholdelse:

Det anbefales at betrækket aftages, maskinvaskes ved 60 °C og lufttørres. **Det er muligt at vaske betrækket på op til 80° C i op til 10 minutter. Det er muligt at tørretumble betrækket. Hvis betræk tørretumbles og vaskes på op til 80 °C må der forventes en kortere levetid på betrækket.** Husk at lukke lynlåsen før vask, for at undgå at stoffet sætter sig fast i lynlåsen. Puden tørres af med en hårdt opvredet klud, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. OBS! vær opmærksom på at ventilerne skal være lukkede inden du rengør puden. Vær sikker på at alle dele er helt tørre, inden du samler puden efter rengøring. Hvis puden punkterer, kan et reparationskit bestilles hos din leverandør eller repareres hos TA service A/S. Kombinationen af luft og skum, giver puden en lang levetid. For yderligere at forlænge pudens levetid, skal ventilerne åbnes for at fylde puden med luft. Optimalt hver nat og som minimum 2 gange om ugen. Hvis puden ikke automatisk fyldes med luft når ventilerne har været åbnet eksempelvis natten over, pust da puden op manuelt.

Garanti: Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl på puden og betrækket gældende fra leveringsdatoen.

## Fordybning i din Varilite pude.

Efter kort tids brug, vil der opstå en lille fordybning, selv når puden er fyldt med luft, ved sacral ischial området, i din Meridian eller Evolution pude fra Varilite.

Det betyder IKKE at puden er punkteret, brugt forkert eller er i stykker. Varilite puderne består af en kombination af luft og forskellige former for skum, og er designet så der opstår en fordybning i sacral ischial området.

## Hvorfor sker det?

Det bløde skum, ved sacral ischial området, giver mindre tryk på pudens faste betræk, når puden fyldes med luft, end det omkringliggende fastere skum.

Pudens blå faste betræk er lavet i et materiale der strækkes i 4 retninger og fremhæver fordybningen.

## Hvorfor er dette ikke noget problem.

Der er stadig luft i det bløde skum ved sacral ischial området. Luften er med til at bære vægten i puden og sørge for en god trykfordeling.

Skummets opgave er at beholde luften hvor der er brug for den og bevare pudens form.

Hvis der opstår denne form for fordybning på en pude der alene er lavet af skum, er der god grund til bekymring. Fordybningen vil indikere at der er opstået et permanent tryk i pudens skum og at skummet har "sat sig".

Teknologien bag Varilites puder, hvor de bedste egenskaber fra luft og skum er kombineret, forhindrer et permanent tryk i at opstå.

Tak fordi du valgte VARILITE

Vi ved du vil blive tilfreds med kvalitet, komfort og design af dit Varilite produkt. Varilite siddesystemer giver god trykaflastning, stabilitet og positionering.

Hvis du ønsker yderligere information om Varilite produkterne, besøg vores hjemmeside [www.ta-service.dk](http://www.ta-service.dk).

OBS! Hvis der er behov for at puden skal desinficeres, kontakt TA. Service for særlig vejledning.

Med venlig hilsen

*Et liv i bevægelse!*

**TA**  
SERVICE

Orupgade 32B, 4640 Faxe.  
Tlf. +45 56 72 57 77

[www.ta-service.dk](http://www.ta-service.dk)