



BRUGERMANUAL
VELA LATIN 400

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	3
SIKKERHED	3
REKLAMATIONSRET	4
UDPAKNING AF STOLEN	4
VEDLIGEHOLD AF VELA Latin	4
BRUGERMANUAL	6
TEKNISK DATA	8

INDLEDNING

Kære Kunde

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Latin 400. Vi er sikre på, at den bliver til daglig glæde for dig. Brugermanualen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligeholdelse, tekniske data mv.

Denne brugermanual omhandler VELA Latin 400.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den skal altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual skal altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs website: www.vela.eu

Har du spørgsmål, kan du kontakte VELAs distributør i dit land.

Du kan ligeledes finde information om VELA Latin 400 på VELAs website: www.vela.eu

Sikkerhed

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler.

Stolen er produceret af **VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark.**

Formålet med VELA Latin 400 er en indendørs stol til siddende personer.

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret jf. købeloven. Dette gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker. VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slitage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

UDPÅKNING AF STOLEN

VELA Latin leveres i en papemballage, der er udviklet med hensyn til miljøet og med brugervenligheden i fokus.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. Du må ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:

- VELA Latin 400 monteret med evt. ekstra tilbehør
- Denne brugermanual

VEDLIGEHOLDELSE AF VELA Latin 400

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Latin 400 for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde de aftagelige dele.

Hjul

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester etc.

Stel

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Polster

Betrækket er lavet af 100% Trevira CS fra Kvadrat. Har du en VELA Tango 400 ErgnomiPlus model, så er midten af i sæde og ryg polstret emd 100% polyester fra Gabriel.

Det skal blot vedligeholdes med støvsugning og en hårdt opvredet klud i vand. Sørg for at fjerne evt. pletter hurtigst muligt.

Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud med lidt vand. Kan pletten ikke komme af, så forsøg med noget mild opvaskemiddel.

Hvis pletten er tørret ind børstes først overskydende af det spildte væk med hånden eller en børste. Dernæst støvsuges pletten. Herefter rengøres pletten med varmt vand, evt efterfølgende sæbevand.

Det er vigtigt at efterrengøre med rent vand.

Behandling af vanskelige pletter

Pletfjerningsmidler skal "arbejdes ind i stoffet" med en ren, fugtig og absorberende klud.

ADVARSEL!

Vær forsigtig med brug af opløsningsmidler idet disse kan opløse underliggende polstermaterialer.

Disse råd er alene anbefalinger og kan ikke garantere at pletter fjernes 100%. Vi anbefaler i alle tilfælde at tage kontakt til et professionelt renseri, især ved større pletter og/eller grundig rengøring.

Evt. indkøbt incontibetræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram

BRUGERMANUAL VELA Latin 400

Højderegulering af sædet

Højden på VELA Latin 400 justeres ved at trykke på højdereguleringsknappen, som er placeret på højre siden under sædet.

Udskiftning af gasfjederen må kun ske af en tekniker fra VELA eller af en uddannet person indenfor dette felt.



HØJDEREGULERING
Under sædet i højre side

Multi-Dynamic™ sæde og ryg

Sæde og ryg kan bevæge sig dynamisk. Du skal trykke på knappen i venstre side under sædet. Hvis man ønsker at låse stolen i en bestemt position, gøres dette ved at trykke knappen ind.

Når man skal tilbage fra en låst position, så skal man trykke på knappen og samtidigt læne ryggen lidt tilbage.



MULTI-DYNAMIC™ FUNKTION
Under sædet i venstre side

Justering af Multi-Dynamic™ funktionen

Føles Multi-Dynamic™ funktionen for let, eller for stram, så kan fjedrene justeres ved at stramme/løse håndskruen under sædet.



JUSTERING AF MULTI-DYNAMIC™
Juster håndskruen under sædet

Sædedybde

Sædedybden flyttes ved at trykke på sædedybdeknappen i højre siden nedenunder sædet (den lille). Når man trykker på den reguleres sædedybden i flere intervaller ved at man skubber sædet enten fremaf eller bagud.



SÆDEDYBDE
Tryk på knappen under sædet i højre side



ARMLÆNSHØJDE

Brug knappen under armlænsputen

Armlænsbredden justeres ved at løsne skrueerne under sædet (bagved armlænsstangen). Husk at spænde den fast igen, når den har nået den ønskede bredde.

Armlæns højden justeres ved at løsne løfte på knappen under armlænsputen. Herefter kan du flytte armlænet til den ønskede højde.



ARMLÆNSLÆNGDE

Skub let til armlænsputen

Armlæns længden justeres ved at skubbe let til armlænsputen.



RYGVINKLING

Venstre håndskruer bagpå stolen

Rygvinkling

Ryggen kan vinkles ved at skrue på den venstre håndskruer på rygbøjlen.



RYGHØJDE

Højre håndskruer bagpå stolen

Ryghøjde

Ryghøjden justeres ved at løsne håndskruen til højre på rygbøjlen.

TEKNISK DATA

	VELA Latin 400
Højderegulering	Gas, 360N
Sæde (D x B)	48 x 45 cm
Sædevinkling	-7°/+5°
Sædedybde	34 cm - 48 cm
Ryg (H x B)	38 cm x 35 cm standard (50 cm x 38 cm høj model)
Rygvinkling	-7° / +8°
Nakkestøtte	16 cm x 28 cm
Siddehøjde	46-66 cm
5-fods aluminiums stel	Blank
Kapacitet	155 kg
Hmi-nr	47430