

# Brugsanvisning


## Gåstokke til selvafkortning

### Indstilling:

Indstil gåstokken til den ønskede højde

- 1) Skær af der hvor den ønskede højde nås
- 2) Sørg for at der ikke er nogen skarpe kanter
- 3) Sæt dupskoen på

### Vedligeholdelse:

Kontrollér regelmæssigt gåstokken og dupsko  for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- eller med ikke ætsende desinfektionsmidler såsom hospitalssprit og lignende

**Maks. brugervægt: 127 kg.**

