


Monteringsvejledning

Ji Knækpedal

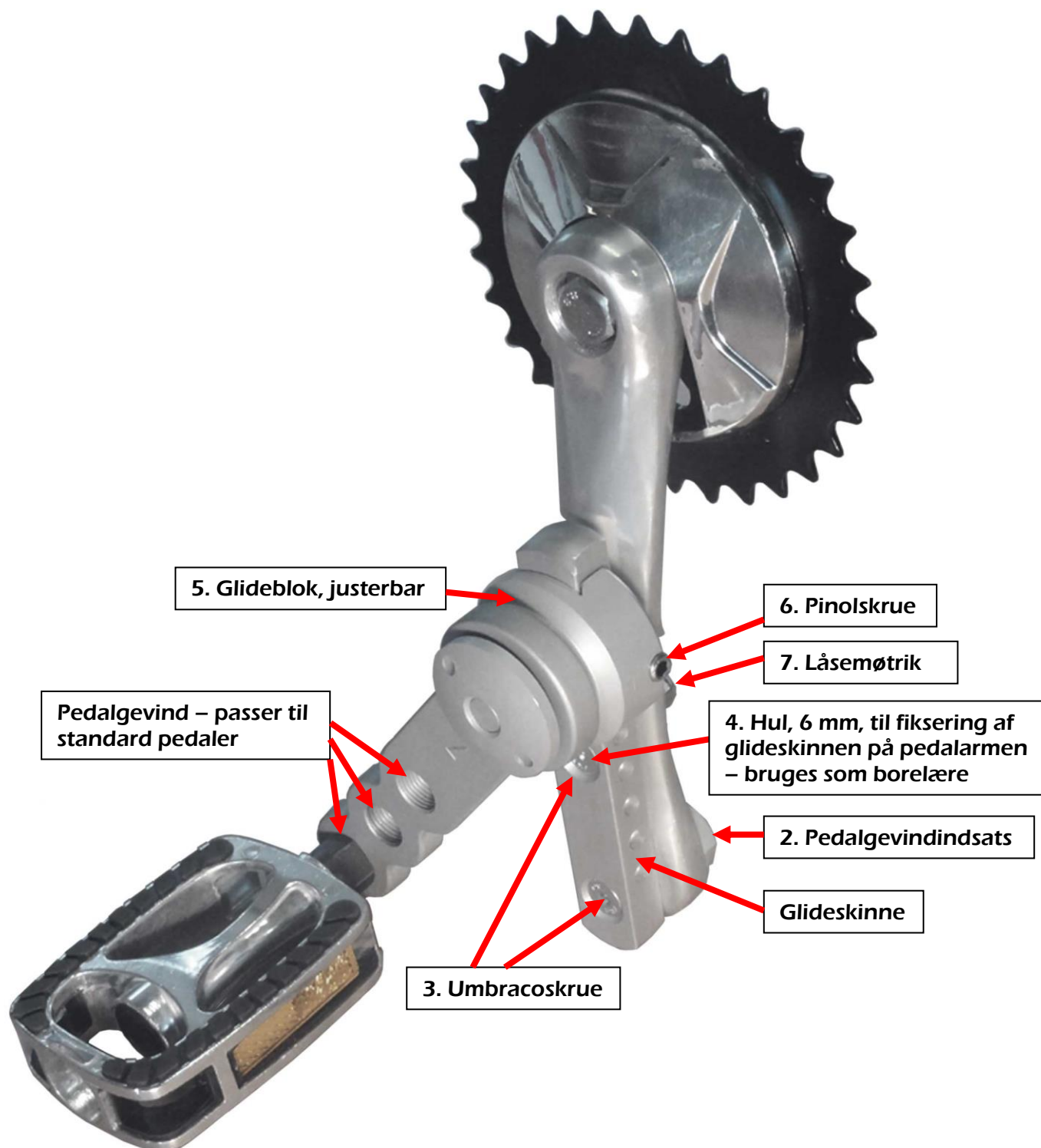

Jørn Iversen Rødekro ApS

Hydevadvej 48, 6230 Rødekro

Tlf. 74 66 92 42 – e-mail: iversen@ji.dk

www.ji.dk

Anbefalet værktøj

Gaffel/ringnøgle 10 mm
 Metalbor 6 mm (og boremaskine)
 Metalsav
 Skruestik (ikke absolut nødvendig, men letter arbejdet når der skal bores hul i pedalarmen)

1. Skru pedalen af den originale pedalarm.

3. Læg glideskinnen langs med pedalarmen, så det nederste hul passer med pedalgevindindsatsen.
 Fastgør glideskinnen i pedalarmen ved at skrue umbracoskruen ind i pedalgevindindsatsen. Spænd ikke skruen alt for meget – glideskinnen skal kunne bevæges.

5. Glideblokken med knækpedalarmen monteres på glideskinnen (se nr. 5).
 Fikses i ønsket position med pinolskruen (se nr. 6).

Monteringssættet indeholder:

1 knækpedalarm
 1 glideskinne
 1 pedalgevindindsats
 2 umbracoskruer 6x40 mm
 2 spændskiver
 2 selvåsende møtrikker
 1 umbraconøgle 4 mm

2. Monter pedalgevindindsatsen i pedalarmen (se nr. 2).

4. Glideskinnen lægges parallelt med pedalarmen.
 Brug hullet i glideskinnen (se nr. 4) som borelære for at bore et 6 mm hul i pedalarmen. Har du en skruestik, kan pedalarmen spændes fast heri når hullet skal bores.
 Umbracoskruen sættes i hullet og fastspændes med 6 mm selvåsende møtrik – husk spændeskiven (se nr. 7).
 Den del af skruen, der stikker ud fra møtrikken, saves af.
 Efterspænd umbracoskruen, der er skruet ind i pedalgevindindsatsen.
 Den del af umbracoskruen, der stikker ud igennem pedalgevindindsatsen, saves af.

6. Monter pedalen i knækpedalarmen. Der er 3 huller at vælge imellem.

Er du i tvivl...

Så ring til vores teknikere – de kan sikkert hjælpe dig.
 Telefon 74 66 92 42 – telefonerne er åbne mellem 08.00 og 16.00.