


## Brugsanvisning Rygbøjle



### Montering:

- 1) Placér rygbøjlen som vist på billedet, således hullerne på rygbøjlen passer i knopperne på håndtaget.
- 2) Tryk derefter rygbøjlen ned, indtil den er låst
- 3) Skub låseknappen mod håndtaget, for at sikre at rygbøjlen er låst

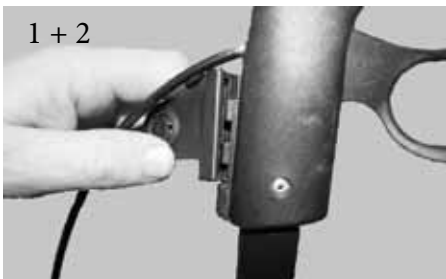

### Justering:

- 1) Justér rygbøjlen til den ønskede længde, ved at dreje på rygbøjleens justeringshjul



### Demontering:

- 1) Tryk låseknappen bagud, og træk derefter rygbøjlen opad

