

# MEMOdayplanner

Varenr: 402 701



**ABILIA**

GEWA AB | FALCK IGEL

# **Innholdsfortegnelse**

<b>Beskrivelse .....</b>	<b>3</b>
<b>MEMOdayplanner leveres med.....</b>	<b>3</b>
<b>Montering .....</b>	<b>3</b>
<b>Tavlens bakside.....</b>	<b>4</b>
Innstilling av lysstyrke .....	4
Visning av tid som søyle eller lyspunkt.....	5
Blinkende lampe ved alarm .....	5
Digital visning av tid.....	5
<b>Å stille klokken .....</b>	<b>6</b>
Slik stiller du klokken .....	6
<b>Alarminnstilling.....</b>	<b>7</b>
Slik stiller du inn alarmer .....	7
Kvittering av alarm.....	8
Sjekk av alarminnstillinger .....	8
Slette alarmer .....	8
Å velge bort blinkende lampe ved alarm .....	9
<b>Alarm utgang – viderekobling av alarm .....</b>	<b>9</b>
<b>Endring av tid for dag og natt .....</b>	<b>10</b>
<b>Tilbehør .....</b>	<b>10</b>
<b>Tekniske spesifikasjoner .....</b>	<b>11</b>
Utgang til viderekobling av alarm .....	11
<b>Vedlikehold.....</b>	<b>11</b>
Lagring.....	11
<b>Sikkerhet .....</b>	<b>12</b>

## Beskrivelse

MEMOdayplanner er en stasjonær døgntavle for brukere som har behov for å strukturere dagen og gjøre den mest mulig forutsigbar, ved at man kan feste på symboler, magneter, bilder, klistremerker, farget teip og fargekoder for å planlegge dagen. Whiteboardtusj kan også brukes.

Til venstre på tavla vises dagen fra kl. 0700 til kl. 2300 med røde lys. Til høyre vises natten fra kl. 2300 til 0700 med blå lys. På MEMOdayplanner kan man stille inn en alarm for hvert kvarter slik at bruker blir varslet når et tidspunkt med aktivitet inntreffer.

Alarm kan viderekobles til ringeklokke, personsøker eller (mobil)telefon.

Se vedlagte idèhefte for nyttige tips til bruk av MEMOdayplanner!

## MEMOdayplanner leveres med


Utstyrspakke, V.nr. 402705:

- Whiteboard-tusj
- Magnetisk tavletørker
- Magneter med farger
- Symboler
- Skruer/murplugger
- En boks rensmiddel for whiteboardtavler
- Idèhefte

## Montering

MEMOdayplanner festes til veggen med de medfølgende skruer. Sett støpselet i stikkontakten. Tavlen må hele tiden være tilkoplest strømmettet. Dersom strømmen blir borte, vil klokken fortsette å gå, men lyssøylen vil ikke lyse før strømtilførselen er tilbake. MEMOdayplanner innstiller seg da automatisk på rett tid.

## Tavlens bakside

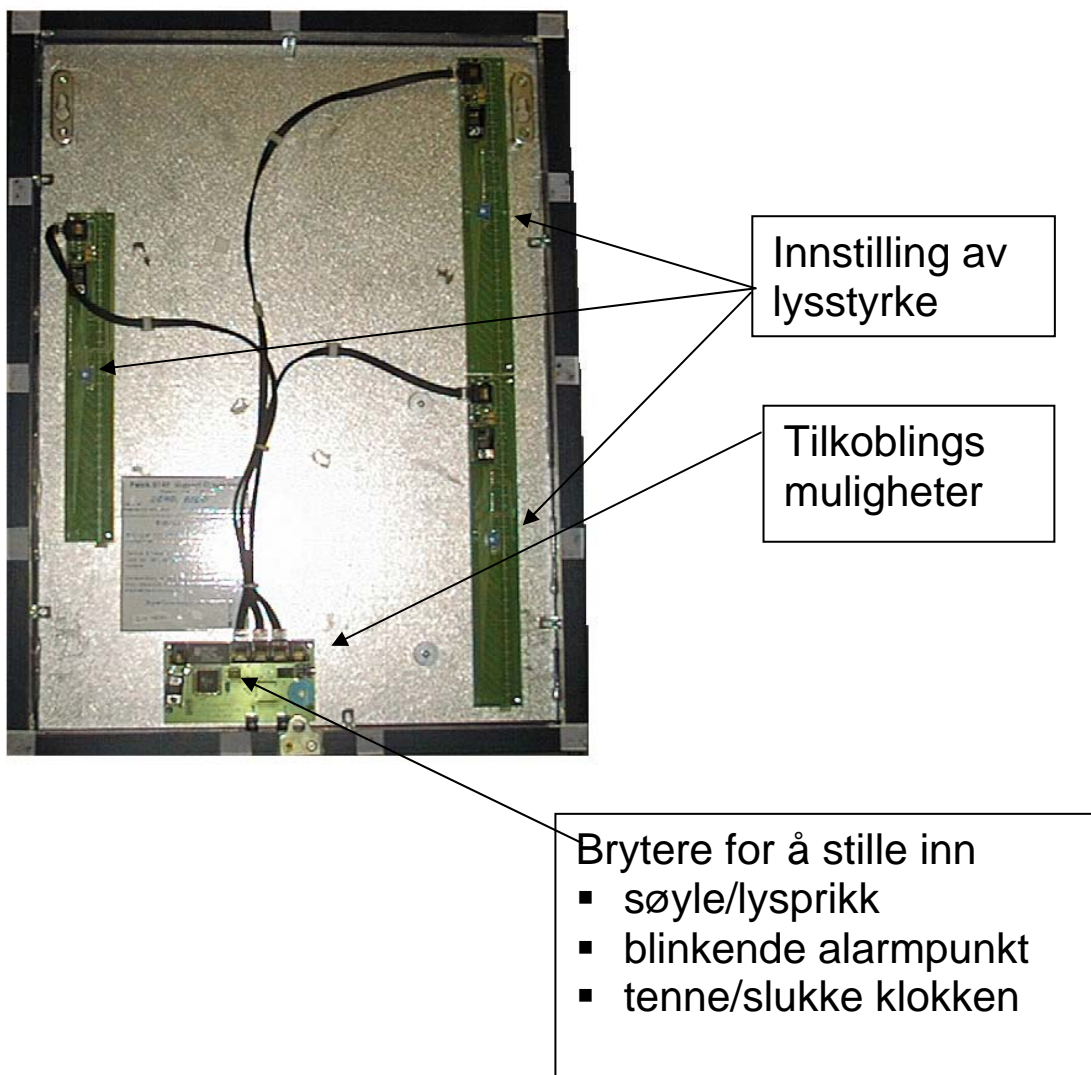


### **Innstilling av lysstyrke**

Det er mulig å regulere lysstyrken til lampene på MEMOdayplanner. Lysstyrken kan reguleres individuelt for dag og natt. Dette gjøres med en liten skrutrekker på innstillingsskruene som finnes midt på hvert av de tre kretskortene som har lamper på seg.

## Visning av tid som søyle eller lyspunkt

Ved hjelp av en lysende søyle som tømmes med ett lys hvert kvarter eller et lysende punkt som flytter seg nedover, kan man se hvor man er på dagen. Disse to funksjonene - søyle eller lysende punkt - er valgfrie og kan stilles inn med bryter nr. 1 på tavlas bakside.

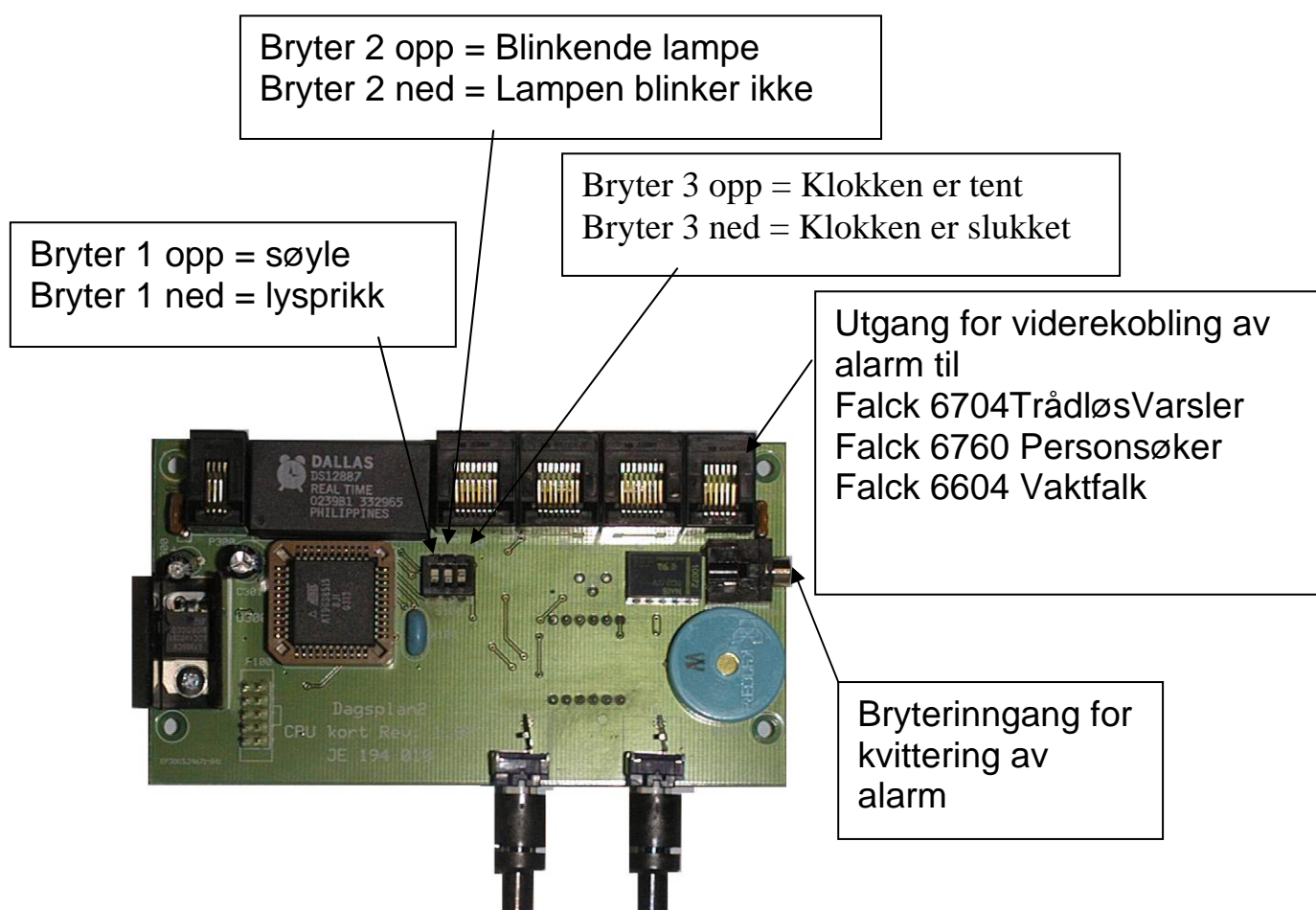

## Blinkende lampe ved alarm

Med bryter 2 aktiverer/deaktiverer du denne funksjonen.

## Digital visning av tid


Nederst på MEMOdayplanner er det en digital klokke. Man kan velge om den skal vises eller ikke ved å stille på bryter nr.3 på baksiden av tavlen.

## Å stille klokken

Å stille klokken er spesielt aktuelt i forbindelse med overgang mellom sommer og vintertid. Det kan også være aktuelt dersom man ønsker å endre på tid for hva som er definert som natt og dag på MEMOdayplanner. Se eget avsnitt ”Endring av tid for dag og natt”.

### Slik stiller du klokken

- Hold inne TID knappen i 2 sekunder for å gå inn i tidsinnstilling. ”Timer” blinker
- Juster oppover ved å trykke på ALARM knappen. Ved å holde knappen inne i mer enn 0,8 sek vil timene løpe.
- Trykk på TID for å gå over til minutter. Juster ved å trykke på ALARM knappen. Ved å holde knappen inne i mer enn 0,8 sek vil minuttene løpe.
- Gå ut av tidsinnstilling ved å holde inne TID knappen i 2 sekunder (automatisk time out etter 1 minutt)

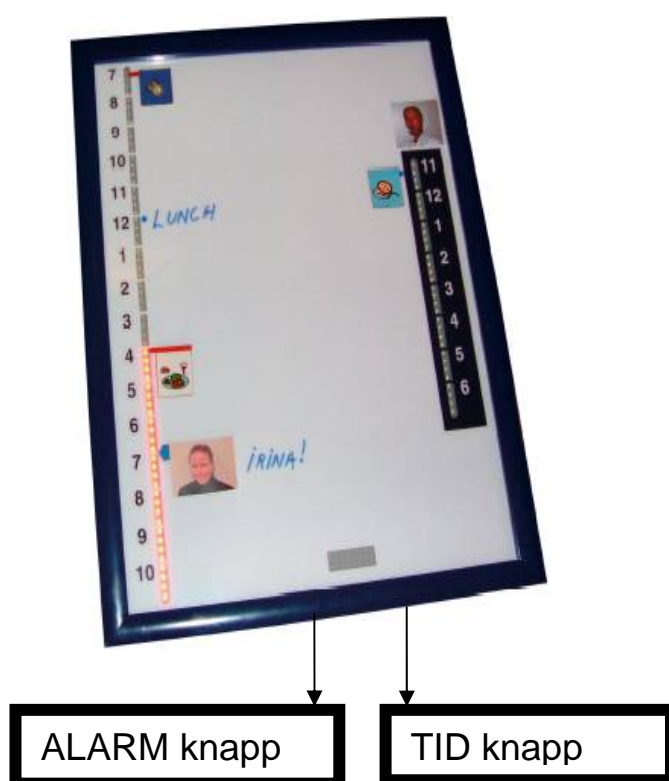

## **Alarminnstilling**

MEMOdayplanner har mulighet for alarm hvert kvarter hele døgnet. Alarmen presenteres i form av lyd og ved at lysprikken på aktuelt tidspunkt blinker. Alle alarmer er daglige, dvs. de kommer igjen hver dag.

### **Slik stiller du inn alarmer**

- For å komme inn i programmeringsmodus trykkes og holdes ALARM bryter i 2 sek. Etter disse 2 sek. slukker alle lysdioder i søylene unntatt de som allerede er innstilt med alarm. Disse vil lyse fast.
- Øvre lysdiode (kl. 0700) er den første som kan innstilles. Ved trykk på TID går markøren ”inn” på kl 0700. Står markøren på et felt hvor alarm ikke er satt blinker den med rolig tempo. Står den på et felt med satt alarm blinker den raskere. Bryteren ALARM trykkes for å veksle mellom alarm av eller på. Når man setter en alarm vil man få et pip og lampen blinker raskere. Displayet (klokken) er alltid tent i programmeringsmodus.
- Bryteren TID trykkes for å gå til neste lysdiode som det kan stilles alarm på, og alarmstatus vises tilsvarende for denne.
- Forrige lysdiode vil vise valgt alarm innstilling (lys av = ingen alarm, lys på = alarm aktivert). Maksimum 96 alarmer kan settes (en for hver lysdiode).
- Ved å holde TID inne i mer enn 0,8 sek vil markøren løpe.
- For å gå ut av programmeringsmodus trykkes ALARM bryter i 2 sek. Dersom ikke bryteren trykkes i løpet av 1 minutt går MEMOdayplanner automatisk ut av programmeringsmodus.

## **Kvittering av alarm**

- Når det kommer en alarm vil alarmlyden vare i 15 sekunder. Alarmen kan kvitteres på tre ulike måter:
- Automatisk. Vent i 15 sekunder og alarmen slås automatisk av.
- Det er også mulig for bruker å kvittere alarmen før det har gått 15 sekunder. Da må det kobles på en egen kvitteringsbryter. Bryteren kan være en hvilken som helst bryter med 3,5mm mono kontakt på. Eksempelvis kan man bruke en Jelly Bean bryter. Bryteren plugges inn på baksiden av MEMOdayplanner som vist på bilde 2.
- I tillegg kan alarmen kvitteres ved å trykke på ALARM knappen.

## **Sjekk av alarminnstillinger**

Innstilte alarmpunkter vises ikke i normalposisjon (brukermodus). For å se innstilte alarmtider må ALARM knappen holdes inne i 2 sekunder (programmeringsmodus). Gå ut igjen ved å trykke samme knapp i nye 2 sekunder.

## **Slette alarmer**

For å slette enkelt alarmer benyttes samme fremgangsmåten som for å sette en alarm. Se avsnitt om Alarminnstilling over.

Man kan også slette *alle* alarmer på en gang:

- Gå inn i programmeringsmodus ved å trykke og holde ALARM bryter i 2 sek.
- Trykk og hold begge brytere inne i 1 sek. Da høres en kvitteringstone på 2 sekunder og alle alarmer er slettet.
- Gå ut av programmeringsmodus igjen ved å trykke ALARM bryter i 2 sek (eller vent i 1 minutt så går MEMOdayplanner automatisk over i Brukermodus).



## **Å velge bort blinkende lampe ved alarm**

Noen brukere foretrekker at lampen for aktuelt tidspunkt ikke skal blinke samtidig som alarmlyden kommer. Denne funksjonen kan deaktiveres med en bryter på baksiden av MEMOdayplanner. Se bilde på side 5 (bryter nr.2).

## **Alarm utgang – viderekobling av alarm**

I noen tilfeller kan det være ønskelig å få alarm andre steder i leiligheten slik at brukeren får melding umiddelbart når et tidspunkt med alarm inntreffer. Da vil brukeren kunne gå til MEMOdayplanner for å få informasjon. MEMOdayplanner har mulighet for tilkobling av:

- Falck 6704 Trådløs Varsler. Denne består av en sender som kobles til utgangen bak på MEMOdayplanner (se bilde på side 5) og en mottager som plasseres i et annet rom. Det er mulig å ha mottagere i flere rom. Rekkevidde opp til 50m.
- Falck 6760 Personsøker. Denne består av en sender som kobles til utgangen bak på MEMOdayplanner (se bilde side 5) og en mottager som brukeren kan ta med seg. Rekkevidde opp til 200-300m.

## **Endring av tid for dag og natt**

Normalt er MEMOdayplanner satt opp til å vise dagen mellom 7 om morgenen og 23 om kvelden. Natten er fra 23 om kvelden til 7 om morgenen. Det er mulig å endre dette ved å sette på én av tre magnetremser med ulikt trykk (se under Tilbehør).

Eksempel : Man ønsker å definere dagen til å begynne kl.8 og slutte kl.24. Tilsvarende er natten da fra 24 til 8.

- Klipp til aktuell magnetremse (med tall eller visning av analoge klokkesymboler) slik at kl.8 om morgenen fysisk kommer der hvor det står 7 på tavlen)
- Er tidsangivelsen uvesentlig informasjon så brukes de hvite magnetstripene for å skjule dette på tavlen.
- Gjør tilsvarende for natten
- Still klokken på MEMOdayplanner en time tilbake i forhold til korrekt tid.

## **Tilbehør**

- Stor tilretteleggingspakke til MEMOdayplanner
- Liten tilretteleggingspakke til MEMOdayplanner
- JellyBean bryter sort, For kvittering av alarm (finnes i flere farger)
- Falck 6704 Trådløs Varsler, For viderekobling av alarm
- Falck 6760 Personsøker, For viderekobling av alarm

Se ytterligere beskrivelse i Idèheftet.

## Tekniske spesifikasjoner

Størrelse (hxbxd): ..... 612 x 462 x 40 mm


Vekt: ..... 5 kg

Strømforsyning ..... 12VDC/0.8A (medfølger)

Bruk kun original strømforsyning!

## Utgang til viderekobling av alarm

Utgangen bak på MEMOdayplanner er en normalt åpen, lukkende, spenningsfri relè utgang. Selve kontakten er en 6 pins modularkontakt. Relèet er aktivt i 2 sek.

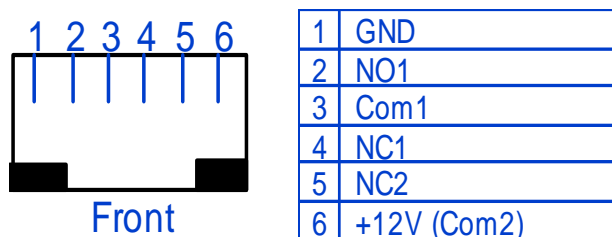

## Vedlikehold

Tavlen rengjøres til vanlig med magnetisk tavletørker. Kan også rengjøres med whiteboardrens, dersom tusjen blir særlig vanskelig å fjerne. Bruk kun whiteboardtusj!

## Lagring

Tavla bør lagres liggende, tørt og frostfritt.

## Sikkerhet

Rensemiddel er skadelig ved innånding, hudkontakt og svelging. Oppbevares på et sikkert sted. Ved direktekontakt, skyl grundig med vann. Ved svelging: Ring lege eller giftinformasjonssentralen, tlf 22 59 13 00.

Falck Igel har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifisering er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument.

Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Falck Igel AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

---

Det er ikke tilladt at kopiere denne brukerveiledning uten skriftlig tilladelse fra FI Danmark Aps.

Har du problemer med hjelpemidlet, ring (+45) 70 22 98 08.

---

**FI Danmark Aps**  
Frydenborgvej 27 N  
3400 Hillerød  
Tlf (+45) 70 22 98 08  
Fax (+45) 48249808

**Norge**  
**Falck Igel AS**  
Buvikveien 22  
4950 Risør  
Tlf (+47) 37 14 94 50  
Fax (+47) 37 14 94 70

**post@fidanmark.dk**  
**www.fidanmark.dk**

---