

Varilite Reflex automatisk justerbart siddesystem.

Denne vejledning forklarer hvordan man benytter og vedligeholder Varilite automatisk justerbart siddesystem.

OBS! VIGTIGT: Den medfølgende røde prop skal IKKE benyttes når puden er i brug.

Vigtig information for brugere og hjælpere: Gem venligst denne manual for fremtidig reference. Hvis du ikke forstår denne manual eller du har nogen spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte TA Service på telefon nummer 56 72 57 77 eller mail: ta.service@ta.service.dk.

ADVARSEL

Når sæde eller ryg forandres på en kørestol, kan det være nødvendigt at kontakte en terapeut eller en professionel siddestillingskyndig for at få justeret din kørestol og siddestilling optimalt. Da selv små justeringer eller ændringer kan have stor betydning for din siddestilling.

Når puden i din kørestol udskiftes bør du jævnligt undersøge om du får nogle røde mærker eller andre indikationer på tryk, specielt omkring de benede områder på bagdelen. Kontakt din terapeut eller anden siddestillingskyndig omgående hvis der opstår nogen form for rødme.

Hvordan bruges puden og ventilsystemet:

Det indbyggede ventilsystem lukker automatisk luft ud af puden når du sætter dig på den. Ventilsystemet justerer puden automatisk så du synker ned i puden og modvirker at du ikke sidder igennem.

Når der ikke siddes på puden bliver den automatisk fyldt med luft.

1. Læg den luftfyldte pude i kørestolen.
2. Forflyt dig over i kørestolen. Sæt dig godt tilrette i kørestolen med bagdelen så langt tilbage i stolen som du kan.
3. Du vil nu synke cirka 5 cm ned i puden indtil den korrekte luftmængde er lukket ud af puden.

Vedligeholdelse:

Varilite puder og betræk er designet til passe sammen, brug derfor altid kun det originale Varilitebetræk. Betrækket beskytter puden mod punktering, smuds og gløder etc.

Varilite puden må aldrig udsættes for skarpe eller spidse genstande, da den så vil punktere.

Udsæt aldrig din Varilite pude i ekstrem varme eller direkte solskin i længere perioder.

Rengøring:

Puden kan rengøres med en fugtig klud.

Det anbefales at betrækket aftages, maskinvaskes ved max 60 °C og lufttørres. **Det er muligt at vaske betrækket på op til 80° C i op til 10 minutter. Det er muligt at tørretumble betrækket. Hvis betræk tørretumbles og vaskes på op til 80 °C må der forventes en kortere levetid på betrækket.**

Visuelt check for punktering:

1. Pudens skal være fyldt med luft.
2. Tag betrækket af.
3. Efterse pudens for synlig punktering.
4. Hvis pudens er punkteret må du ikke sidde på pudens. Kontakt din terapeut eller TA Service for at få lappet eller udskiftet pudens.
5. Hvis der ikke er synlig punktering skal du lave en "kartest". Se næste for instruktion.

Kartest check for punktering:

1. Fyld vask eller badekar med nok vand til at du kan få pudens under vand.
2. Pudens skal være fyldt med luft
3. Betrækket tages af.
4. Sæt den medfølgende røde prop i åbningen bagtil på pudens.
5. Tryk pudens under vand.
6. Hvis pudens er punkteret, vil du se luft bobler fra det sted hvor pudens er punkteret.
7. Kontakt din terapeut eller TA Service for at få pudens lappet eller udskiftet.

Garanti: Der ydes 2 års garanti mod fabriktionsfejl på pudens og betrækket gældende fra leveringsdatoen.

Tak fordi du valgte VARILITE

Vi ved du vil blive tilfreds med kvalitet, komfort og design af dit Varilite produkt. Varilite siddesystemer giver god trykaflastning, stabilitet og positionering.

Hvis du ønsker yderligere information om Varilite produkterne, besøg vores hjemmeside www.ta-service.dk.

OBS! Hvis der er behov for at pudens skal desinficeres, kontakt TA. Service for særlig vejledning.

Med venlig hilsen

Et liv i bevægelse!

TA
SERVICE

Orupgade 32B, 4640 Faxe.

Tlf. +45 56 72 57 77

www.ta-service.dk

TA. SERVICE A/S
ØMARKSGÅRDEN
ORUPGADE 32 B, ORUP
DK-4640 FAXE

TELEFON +45 56 72 57 77
TELEFAX +45 56 72 57 76
BANK: DANSKE BANK
KONTO : 4905-3532070031

GIRO 860-33 59
PBS 02440032
CVR-nr. 16068985