




BRUGSANVISNING Telefonadapter

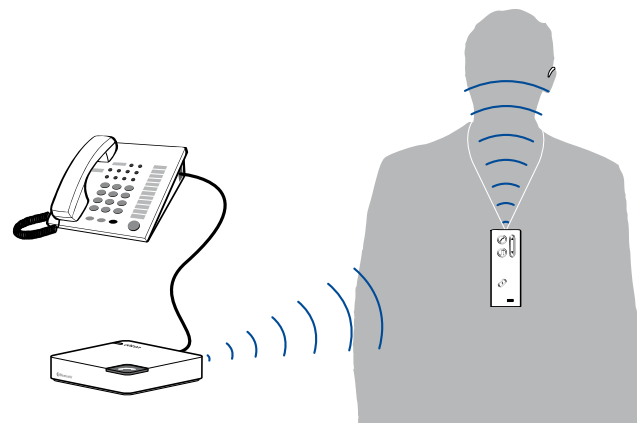

INTRODUKTION


Telefonadapteren sender trådløst telefonsamtalerne fra en fastnettelefon til dine høreapparater via en Streamer.

Både udgående og indgående opkald videresendes. Under en telefonsamtale fungerer høreapparaterne som små hovedtelefoner og med Streameren, kan der tales i telefon håndfrit.

Kontroller, at telefonadapteren er forbundet korrekt til både telefonlinjen og til stikkontakten. Se installationsguiden. Denne guide forklarer, hvordan Streameren bruges til telefonsamtaler.

Telefonadapteren har en rækkevidde på ca. 10 meter fra Streameren.

STREAMER

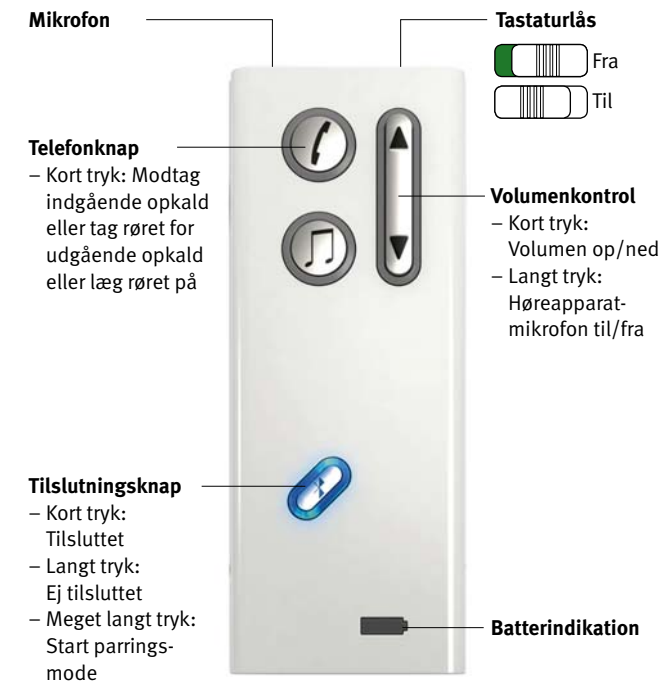

Telefonopkald kan modtages, også når tastaturet er låst!

INDGÅENDE OPKALD

Inden du taler

Streamereren skal bæres om halsen. Kontrollér, at Tilslutnings-funktionen på Streameren er slået til. Du skal befinde dig inden for en afstand på op til 10 m fra telefonadapteren. Statusindikatoren på adapteren skal lyse konstant rødt.

Indgående opkald

Du hører en ringetone i dine høreapparater, og den grønne ring om telefonknappen blinker.

Besvar opkald

Tryk kort på telefonknappen på Streameren.

Streamereren modtager opkaldet og den grønne ring skifter til konstant lys. Du modtager nu opkaldet direkte i høreapparaterne. Tal normalt, som om personen sidder lige foran dig.

Den røde statusindikator på telefonadapteren blinker under opkaldet.

Læg på

Tryk kort på telefonknappen på Streameren. Streameren afbryder opkaldet, og den grønne ring slukker.

Den røde lampe på telefonadapteren skifter til konstant rødt lys.



UDGÅENDE OPKALD

Foretag opkald

Tryk kort på telefonknappen på Streameren (eller tryk kort på telefonadapterens røde knap).

Du hører en klartone i høreapparaterne. Ringen om Streamerens telefonknap lyser grønt.

Løft røret af telefonen (eller tryk opkald på en trådløs telefon), og tryk det ønskede telefonnummer. Læg røret på igen (eller tryk afslut opkald på en trådløs telefon).

Den røde lampe på telefonadapteren blinker under opkaldet.

Læg på

Tryk kort på telefonknappen på Streameren. Streameren afbryder opkaldet, og den grønne ring slukker.

Den røde lampe på telefonadapteren skifter til konstant rødt lys.

Kontrollér, at den trådløse telefon er slukket igen, eller røret er lagt på!



VOLUMEN

Brug volumenknappen på Streamer til at justere lydniveauet i høreapparaterne. Tryk kort på op eller ned for at ændre.

Gentag kort tryk ved yderligere justeringer.

Streamereren husker det indstillede niveau til næste telefonsamtale.

Bemærk: Lydniveauet for din stemme bliver automatisk justeret af Streameren, men du bør altid tale højt og tydeligt i Streamerens mikrofon.



TIPS

HØR KUN TELEFONLYDEN

Første gang Streameren bruges med telefonen, er høreapparaternes mikrofoner tændt.

Høreapparaternes mikrofoner kan slukkes ved et langt tryk (2 sekunder) på enten volumen op eller ned.

Et lang tryk vil tænde mikrofonerne igen.



2 sek.

Bemærk: Denne indstilling huskes af Streameren til næste telefonopkald.

For yderligere oplysninger se brugsanvisningen for Streameren

For flere tips og oplysninger se: www.oticon.dk/connectline