

MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

01_20230725_DK


Master Glide Transfer



MC 004-1012



MC 004-1000

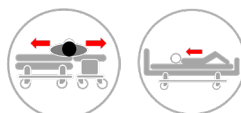

-
-

Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 004-1012	129464	Master Glide Transfer - L	5744001972649
MC 004-1000	54133	Master Glide Transfer Board - M	5744001972632

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 18

The Original Nordic Human Handling Concept



Developed & Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet kan benyttes ved planforflytning af brugere mellem 2 lejer. Brug af nylon og et stiklagen under bruger anbefales.

Anvendelse af produktet:

Boardet placeres halvt under brugeren. Brugeren glides ovenpå boardet over på den modsatte seng. Nylon bør anvendes, hvis forflytningen vurderes tung eller ved brugere, der er i risiko for at pådrage sig shear skader.

Advarsel:

Boardet bør ikke anvendes over større ikke-understøttede afstande end det, som er anført på boardet.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for

den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning. Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet er defekt, har brudte overflader eller ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssig og forsvarlig forflytning kan udføres, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Glide Transfer

Montering og brug af Master Glide Transfer Board:



1. Vend bruger let til siden. Hvis muligt benyt et lagen.



2. Placerer Master Glide Transfer Board fra hovedet og ned til hoftepartiet. Vær opmærksom på, at hovedet er understøttet af boardet.



3. Hvis bruger er tung eller, hvis forflytningen er tung, bør et glidestykke placeres mellem boardet og lagnet.



4. Placer modtager-sengen 2-5 cm lavere end sengen, som brugeren ligger på. Husk at låse alle bremseser.



5. Bruger bøjer sine ben. Hjælperne henholdsvis trækker og skubber bruger i et roligt tempo over på modtager-sengen. Bruger opfordres til selv at flytte fødderne med over.



6. Boardet fjernes og nylonstykket trækkes ud mod sig selv/madrassen. Lagnet rettes ud under bruger eller fjernes.

Brugervejledning - Master Glide Transfer

Tekniske specifikationer

Materialer:

PE

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Håndtag:	Max. Brugervægt:
MC 004-1000 Master Glide Transfer Board - M	L 90 x B 70 x H 0,5 cm	12	160 kg
MC 004-1012 Master Glide Transfer - L	L 120 x B 60 x H 0,5 cm	10	160 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Max 20 cm afstand mellem understøttelsesfladerne i forbindelse med forflytning.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 160 kg.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.



Find os på:



master-care.dk