

## Vedligeholdelse og rengøring

Kredsløbsdiagram og funktionstestkrav fås på anmodning.

Pumpehuset bør rengøres efter hver bruger. Afbryd altid pumpen ved kontakten inden rengøring.

Gør pumpen rent med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Tør pumpen efter med en ren klud, inden den tages i brug.

- ❗ Må ikke nedsænkes i væske, og ikke autoklaveres.
- ❗ Der er ingen dele i pumpen der kan repareres af brugeren. Medicinsk udstyr må kun repareres af en autoriseret forhandler.

### Tekniske data

|                   |   |
|-------------------|---|
| Model             | Plexus CF302                                  |
| Spænding          | ~230 V  |
| Strøm             | 0,05 A  |
| Forbrug           | 10 W  |
| Overstrømssikring | 1A – 250/125 V                                |
| Frekvens          | 50 Hz   |
| Driftstemperatur  | 15° C – 32° C                                 |
| Klassificering    | 93/42/EEC, Klasse 1 – IEC 601-1, IEC 601-1-2. |



- ❗ Pumpen bør ikke bruges på operationsstuer, når brandfarlige narkoseblandinger med luft, O2 eller N2O er i brug.

Ved fejl kontaktes kundeservice:

Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry  
Telefon: 87 88 73 00  
Fax: 87 88 73 19  
info@alurehab.dk

Autoriseret CE repræsentant  
(Europa)  
  
INVATECH GmbH & Co.  
Wandsbeker Königstraße 27-29  
D 22041 Hamburg  
Tyskland

## Brugsanvisning

# SofCare vedligeholdelsepumpe CF302

Fylde- og vedligeholdelsepumpe,  
med komfortcontrol



Vare nr. 80-10331  
HMI nr. 54640

Jun11 -10


## Brugsanvisning SofCare vedligeholdelsespumpe CF302

- i** Luftterapi kan ikke anbefales, hvor rygsøjlels stabilitet er af afgørende betydning.


Pumpen er fremstillet alene til brug i forbindelse med Sof•Care statiske luftmadrasser. CF302 pumpen kompenserer automatisk for eventuelt manglende luftmængde, og holder det indstillede tryk.

### Tilslutning

1. Madrassen placeres oven på den eksisterende madras. Kræng antitryk madrassens stropper ned over hjørnerne på sovemadrassen. Brugeren lægges på den lufttomme madras.
2. Anbring pumpen uden på sengens gavl eller sengeramme, eller stående på gulvet.

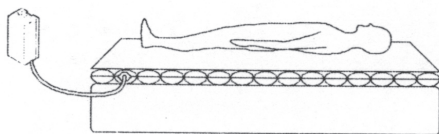

- i** Pumpen må ikke anbringes i brugerens seng, i berøring med brugeren eller under lagner og/eller afdækninger.

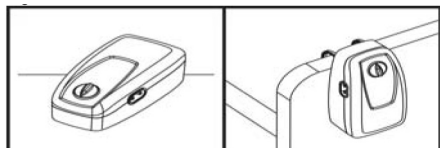

3. Gummislangen tilsluttes studsene på pumpens side. Gummislangens skrueåbning tilsluttes madrassens ventil.
4. Pumpen er forsynet med en komfortkontrol, baseret på brugerens vægt (billede).

- Lav indstilling Blødere madras, lav kropsvægt
- Høj indstilling Hårdere madras, høj kropsvægt




Indstilling med viseren i lodret stilling modsvarer en brugervægt på ca. 80 kg.

- i** Når fasthed/blødhed justeres, skal håndtesten altid udføres efter ca. en time.

5. Pumpens ledning sættes i stikkontakten og der tændes for strømmen (230 V) på on/off knappen. Pumpen starter, og vil fylde Sof-Care madrassen med luft på ca. 40 minutter. Et sikkerhedstjek med flad hånd, som vist på illustrationen (hånd testen) udføres altid efter fyldning. Der skal være 2-4 fingerbredders luft mellem bruger og bundmadrassen.

- i** Hvis pumpen har været i gang i mere end 2 timer med komfortkon-

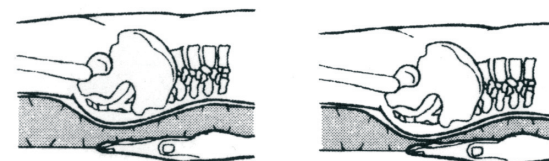

Korrekt indstillet

trollen på højeste indstilling, og man ved manuel kontrol stadig kan føle brugerens krop, fungerer pumpen ikke korrekt og Alu Rehab's kundeservice eller konsulent kontaktes.

### Hjertemassage (CPR-kardiopulmonal genoplivning)

Sikringsdækslet afskrues og ventilen rykkes ud. Madrassen tømmes på 10 sekunder.

