

Brugermanual

Vicair® Academy puder

Introduktion

Tak fordi du har valgt en **Vicair® Academy** pude. Vi er sikker på, at du hurtigt vil lære at sætte pris på dens enkle udførelse, pålidelighed og effektive virkning.

Det brede udvalg af **Vicair® Academy** benytter sig af **Vicair® Technology™**, en unik og innovativ metode, der giver en dynamisk siddeflade og støtte ved hjælp af flere hundrede små, trekantede, luftfyldte celler kaldet Softcells™. Disse fleksible celler har en lav friktions-overflade, glider let mod hinanden og former sig derfor let efter kroppens konturer. Konceptet giver en optimal kombination af trykaflastning, støtte og stabilitet, samtidig med at shear og friktion minimeres.

Denne brugermanual gælder for følgende **Vicair® Academy** puder:

Twin 6 og **Twin 10**

Positioner Plus 6 og **Positioner Plus 10**

Adjuster 6 og **Adjuster 10**

Vector 6, **Vector 10** og **Vector Junior**

Bemærk: Der er påsyet et hvidt mærke på bagsiden af inderbetrækket med indikation af model, størrelse, HMI-nr. og serienr.

Før du tager din nye **Vicair® Academy** pude i brug, bør du læse følgende enkle og vigtige anvisninger, så du kan føle dig sikker og få fuldt udbytte af puden.

Kontroller pudens størrelse

Kontroller at puden har den rigtige størrelse til brugeren og kørestolen.

Vicair® Academy puderne leveres i følgende standard størrelser: (bredde x dybde)

| Størrelse | Bredde x dybde | Twin | Positioner Plus | Adjuster | Vector | Vector junior (små celler) |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 3540 | 35x40 | X | X | X | X | 25 x 25 |
| 4040 | 40x40 | X | X | X | X | 30 x 30 |
| 4045 | 40x45 | X | X | X | X | 35 x 35 |
| 4050 | 40x50 | X | X | X | X | |
| 4343 | 43x43 | X | X | X | X | |
| 4540 | 45x40 | X | X | X | X | |
| 4545 | 45x45 | X | X | X | X | |
| 4550 | 45x50 | X | X | X | X | |
| 5045 | 50x45 | X | X | X | X | |
| 5050 | 50x50 | X | X | X | X | |

Bredde: Pudens skal passe til kørestolens sædebredde. Hvis kørestolen er monteret med armlæn eller



Yes, you can.®

tøjbeskyttere, kan puden være 2 cm bredere. Sørg for at puden ikke kommer i klemme i egerne.

Dybde: Pudens skal passe til kørestolens sædedybde eller være op til 2,5 cm længere. Hvis puden er mere end 2,5 cm længere end kørestolens sæde, anbefales det at montere en fast bund under puden mellem pude og yderbetræk.

Bemærk: Lad din terapeut vejlede dig mht. hvilken pude, der passer dig bedst.

Bemærk: For specialstørrelser kontakt venligst Invacare A/S

Montering af yderbetræk

Din **Vicair® Academy** pude leveres med standardbetræk eller inkontinensbetræk. Begge betræk har skridsikker bund og velcrostriber for at sikre positionering af puden i kørestolen. Begge betræk er strækbare i alle retninger.

Bemærk: Betrækket skal benyttes sammen med puden. For at puden skal fungere optimalt, skal der altid være monteret yderbetræk på puden.

Før du tager puden i brug første gang, fjernes den klare plast fra såvel pude som betræk. Lynbetrækket op og monter dette på puden. Sørg for at puden vender rigtigt i forhold til indikationsmærkatens på betrækket.

Bemærk: Den blå løkke, der er monteret bagerst på puden skal passe i tilsvarende hul i betrækket.

Bemærk: Luk forsigtigt lynlåsen og sørg for ikke at beskadige det inderste betræk.

Justering af fyldningsgraden

Alle **Vicair® Academy** puder har afhængig af størrelse og model sin egen specielle fyldningsgrad; et mål for, hvor mange SoftCells™ puderne indeholder. Antallet og størrelsen af kamrene varierer fra pude til pude. Det er muligt at ændre fyldningsgraden ved blot at fjerne nogle celler eller lægge flere i de forskellige kamre og derved tilpasse puden til den enkelte brugers behov. Fyldningsgraden før pudens tilpasses fremgår af det hvide mærke syet på hjørnet af inderbetrækket.

Bemærk: Ændring af pudens fyldningsgrad bør kun udføres af autoriseret personale.

Beskrivelse af forskellige Academy puder

Puderne **Twin 6** og **Twin 10** er opdelt i 2 lige store kamre med lavere fyldningsgrad i det bagerste kammer. Denne facon hjælper til en stabil og korrekt siddestilling, hindrer fremadskridning og giver god trykafledning under sædekuderne.

Puderne **Positioner 6** og **Positioner 10** har samme opdeling som **Twin** og derudover 2 sidekamre, der yder større sidestabilitet og hindrer udadrotation.

Puderne **Adjuster 6** og **Adjuster 10** er udviklet til at yde optimal støtte eller korrigerende ved asymmetrisk kroppsfacon. Den er desuden velegnet, hvis man ønsker at gå i kørestolen frem med det ene ben.

Puderne **Vector 6** og **Vector 10** giver øget støtte og positionering pga. 2 indbyggede højder af kamrene. De 2 sidekamre giver stabilitet til bækkenet og hindrer udadrotation af benene. Abduktionskilen hindrer



Yes, you can.®

indadrotation og "styrrer" benene. Pudene modvirker fremadskridning.

Vicair Vector findes også i en Junior udgave i størrelserne 25x25cm, 30x30cm og 35x35cm. Pudene er 9 cm høj, fyldt med Baby Softcells™ og har samme funktion som **Vicair Vector**. Blot tilpasset Junior størrelse. Alle Academypuder har max brugervægt 250 kg, dog **Vicair Vector Junior** max 100 kg.

Sørg for at brugeren ikke sidder igennem pudene

Vicair® Academy pudene er designet således, at risikoen for at sidde igennem pudene er minimal. Det er dog vigtigt at sikre sig, at brugeren får tilstrækkeligt støtte og ikke sidder på pudens underlag uden aflastning fra minimum et lag luftceller. Specielt tynde personer er mere tilbøjelige til at sidde igennem pudene end tungere personer. Dette betyder dog ikke, at de tunge brugere ikke er i farezonen. Dette bør undersøges ved ibrugtagning af pudene første gang og derefter tilpasse fyldningsgraden i pudene.

Sådan undersøges, at brugeren ikke sidder igennem pudene

Det kan undersøges, om der er tilstrækkeligt med celler i pudene under brugerens siddeknuder ved at mærke under den ene siddeknude samtidig med, at brugeren læner sig lidt forover. Brugeren skal helst have siddet på pudene i minimum 20 minutter. Mærk efter om der er kontakt med underlaget. Der skal være ca. 3 cm afstand mellem siddeknude/haleben og kørestolens sæde.

Med alle nye antidecubitus produkter, er det vigtigt at holde øje med brugerens hud de første par dage. Hvis der opstår rødme eller ømhed i huden, skal brugeren ikke fortsat sidde på pudene. Kontakt da straks terapeuten for yderligere hjælp. Pudene bør efterses hver 3. måned for ødelagte celler, da dette vil kunne reducere aflastningen og stabiliteten.

Brug af Vicair® Academy pudene i højere luftlag

Ved brug af **Vicair® Academy** pudene i højder, hvor lufttrykket ændres (eks. i fly), er der risiko for, at pudene ikke fungerer tilstrækkeligt, da cellerne i pudene indeholder luft. Det kan derfor være en god ide ikke at benytte pudene under disse omstændigheder. Pudene kan dog anvendes uden problemer, når lufttrykket er normalt igen.

Brandrisiko

Vicair® Academy pudene lever op til gældende standard vedrørende brandrisiko. Dog må pudene ikke ligge i nærheden af åben ild eller kraftig varme.

Beskadiget pude

Hvis **Vicair® Academy** pudene er ødelagt, bør pudene ikke anvendes. Kontakt terapeuten for nærmere oplysninger om brug af samme eller ny pude.

Transport

Hvis brugeren transporteres i bil siddende i kørestolen, skal **Vicair® Academy** pudene altid være forsvarligt fastspændt til kørestolen. Hvis pudene ikke fastspændes, kan dette resultere i, at pudene og brugeren glider ud af stolen og brugeren kommer til skade. Fastgør pudene ved hjælp af en rem.

Vedligeholdelse og rengøring

Vicair® Academy pudene er designet med henblik på lav vedligeholdelse og på at være nemt at benytte. Yderbetrækket kan maskinvaskes og tørretumles med vrangen ud – følg vaskeanvisningen på mærkatet inden i betrækket. Det blå inderbetræk kan tørres med en fugtig klud.



Yes, you can.®

Bemærk: Inderbetrækket og Softcells™ kan ikke maskinvaskes eller autoklaveres, da de dermed ødelægges. Læg ikke puden i blød i vand eller anden form for væske Hvis puden skal benyttes af en anden bruger anbefales det at bruge et antibakterielt rengøringsmiddel til betrækket.

*Bemærk: Eftersom **Vicair® Academy** puderne er fyldt med hundredvis af Softcells™ vil punktering af enkelte celler ikke have indflydelse på trykaflastningseffekten. Dette ændres dog hurtigt, hvis mange celler ødelægges. Undersøg puden hver 3 måned for ødelagte celler. Hvis brugeren pludselig sidder igennem puden, kan for mange ødelagte celler være årsagen.*

Begrænset holdbarhed på yderbetrækket

Ved normal brug anbefaler vi, at yderbetrækket udskiftes én gang årligt. Intensiv eller forkert brug kan afkorte betrækkets levetid væsentligt. Det er vigtigt ikke at benytte puden, hvis yderbetrækket er ødelagt.

Garanti

Invacare A/S giver 2 års garanti mod fabrikations- og materialefejl regnet fra den oprindelige købsdato, forudsat at produktet udelukkende er anvendt efter sit formål. Ved skade opstået på baggrund af unormalt brug, eksempelvis forkert håndtering, uhensigtsmæssig rengøring eller skødesløshed frafalder garantien. Skulle en fabrikations- og materialefejl opstå inden for 2 år regnet fra den oprindelige købsdato, vil Invacare A/S efter eget valg reparere eller bytte produktet uden beregning. Garantien omfatter ikke punktering, revner eller brandmærker. Betrækket er ligeledes ikke omfattet af garantien, men nyt betræk kan købes separat.

For yderligere produktinformation inkl. standardpuder, størrelser og fyldningsgrader se venligst Invacares hjemmeside: www.invacare.dk



Yes, you can.®