



**Sonic Alert**  
Amerikas leder i visuelle alarm systemer

Model SBP100

### Sonic Alert's 1 års begrænsede garanti

Sonic Boom vækkeuret model SBP100 har garanti mod fabriktionsfejl i materialer og fremstilling 1 år fra købsdato. Inden for denne periode reparerer eller erstatter Sonic Alert SBP100 efter vores eget valg uden omkostning for produktdele og arbejde. Send SBP100 (forudbetalt) sammen med en kopi af jeres kvittering som bevis for købet til:

**Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, USA**


### Sonic Shaker bærbar vibrationsvækkeur

#### Generel data:

Strøm: DC 3V (1.5V x 2 stk. AA størrelse) og DC 1.5V (1.5V x 1 stk. AAA størrelse)

Bærbart vibrationsvækkeur SBP100  
Oversigt og instruktionsvejledning

**VIGTIGT** – Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt før brug og gem dem til fremtidig reference.

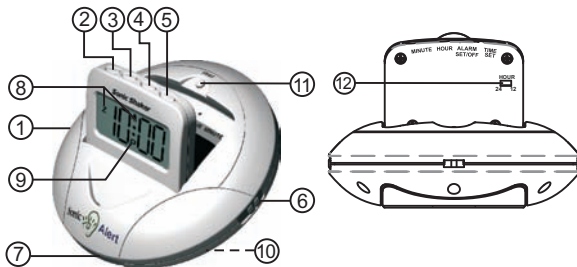

#### Funktioner:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) Alarm on/off         | 7) Snooze og lysfunktion            |
| 2) Indstilling af tid   | 8) Alarmindikation                  |
| 3) Indstilling af alarm | 9) Indikation af PM-tidsindstilling |
| 4) Timer                | 10) Batterium                       |
| 5) Minutter             | 11) Testknap                        |
| 6) Alarmindstilling     | 12) Skift af tidsindstilling        |

#### Installation

(Se oversigt for yderligere vejledning om indstilling)

#### 1) Sådan isætter du batterier

- 1.1 Fjern låget til batterirummet (10), isæt 1 AAA batteri til uret og 2 AA batterier til vibratoren/alarmen.
- 1.2 Vær sikker på, at du placerer batterierne korrekt og sæt dem i henhold til polariseringerne i batterirummet.

#### 2) Når batterierne skal udskiftes

- 2.1 Når LCD skærmen bliver utydelig, er det tid til at skifte AAA batteriet.
- 2.2 Når vækkeurets lyd kvalitet bliver dårlig, lyden lav eller vibratoren meget svag, er det typisk en indikation på at AA-batterierne bør skiftes. Skift batterierne for at undgå mulige lækager.

#### 3) Vedligeholdelse

- 3.1 Hvis produktet ikke har været brugt i en lang periode, skal batterierne fjernes for at undgå mulige lækager.
- 3.2 Når du rejser med produktet, anbefales det, at fjerne batterierne for vibratoren/alarmen (2 AA batterier). Derved undgås det, at batterierne bruges, hvis der ved en fejl bliver trykket på lysknappen under rejsen.

#### Indstilling af tid og alarm (se oversigten)

##### 4) Indstil tid

- 4.1 Tryk og hold "Indstilling af tid" knappen (2) og tryk og hold derefter "Timer" knappen (4) indtil den korrekte time er indstillet på uret. Hvis (AM/PM) anvendes, husk da at sætte den korrekte tidsindstilling (AM/PM). Når den er indstillet til PM-tid, vil et "P"(9) kunne ses på displayet.
- 4.2 Tryk og hold "Indstilling af tid" knappen (2) og tryk og hold derefter "Minut" knappen (5) indtil det korrekte minut er indstillet på uret.
- 4.3 Når du skal skifte tidsindstilling mellem 12 timer (AM/PM) og 24 timer, skal du anvende skift af tidsindstilling knappen (12).

##### 5) Indstil alarm

- 5.1 Tryk og hold "Indstilling af alarm" knappen (3) og tryk og hold derefter "Timer" knappen (4) indtil den korrekte time er indstillet på uret. Hvis (AM/PM) anvendes, husk da at sætte den korrekte tidsindstilling (AM/PM). Når den er indstillet til PM tid, vil et "P"(9) kunne ses på displayet.
- 5.2 Tryk og hold "Indstilling af alarm" knappen (3) og tryk og hold derefter "Minut" knappen (5) indtil det korrekte minut er indstillet på uret.

#### Alarm (se oversigt)

##### 6) Indstil alarm tidspunktet som vist i indstil alarm afsnittet

- 6.1 Slå alarmen til ved at sæt "Alarm on/off" knappen til "on". Alarmsymbolet vil ses i toppen af displayet (8), som indikation på, at alarm funktionen er slået til. Alarmen er nu sat til at tænde automatisk på den valgte tid.
- 6.2 Du kan vælge om du vil vækkes med lyd, vibration eller lyd og vibration ved at sætte "Skift alarm indstilling" knappen (6) til den ønskede opsætning.
- 6.3 Når alarmen ringer, afbryder du alarmen ved at trykke på "Indstilling af alarm" knappen (3). Alarmen starter igen næste dag på samme tid.
- 6.4 Når alarmen ringer, afbryder du alarmen ved at trykke på "Snooze" knappen (7). Alarmen vil starte igen efter cirka 4 minutter. Du kan gentage dette så mange gange, som du ønsker.
- 6.5 For at stoppe alarmen permanent, sæt da "Alarm on/off" knappen til "off".

##### Natlys (se oversigt)

- 7) Du kan se tiden i mørke ved at trykke og holde "Snooze og lysfunktion" knappen (7) inde.

#### Testknappen

- 8) Testknappen (11) kan bruges til at demonstrere lyd og vibration uden at sætte alarmen til. For at bruge testknappen skift alarmindstillingsknappen til lyd, vibration eller lyd og vibration og tryk testknappen ind for at demonstrere lyden eller/og vibration.

Distribueret af:



Phonic Ear Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark  
For produkt support: 0045 39 17 71 01 eller [www.phonicear.com](http://www.phonicear.com)

### Genanvendelse og WEEE direktivet

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med produktet, skal produkt, indpakning og batterier bortskaffes gennem passende genbrugscentre. Bortskaffelse må ikke ske sammen med dit normale køkkenaffald. Lad være med at brænde det.

#### Genbrug

Alle plastik- og metaldele er genanvendelige. PCB kan blive sendt til enhver PCB genbrugsleverandør for at genbruge nogle af komponenterne i forhold til metaller som guld og sølv.

Lokal genbrug: Dit lokale bibliotek eller borgerservice vil også have information om genbrug i dit område

#### WEEE står for Waste Electrical and Electronic Equipment / Elektrisk affald og elektronisk udstyr

Direktivets målsætning er at reducere det affald, der opstår fra elektrisk og elektronisk udstyr; og forbedre genbrugs og miljøbevidstheden hos alle, der er involveret i livscyklusen omkring elektriske og elektroniske produkter.

