

Cadex klokken

Varenr. 402 320



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Funksjoner	3
Klokkens 4 hovedmenyer	4
Slik stilles tid og dato.....	5
Alarmbanken	5
Slik settes en alarm	6
Å slå av en enkelt alarm	7
Databanken	8
Slik lagres personlige data	8
Slik aktiveres alarm.....	9
Repetisjon av alarm (Medical Snooze).....	9
ALERT knappen.....	10
Slik slettes informasjon	10
Bytte av batteri	10
Annet	11
Sikkerhet	11

Innledning

Cadex Armbåndsurs er en digital klokke som kan være et godt hjelpemiddel for den som har behov for påminning.

Klokken har mulighet til å sette inntil 12 alarmer i døgnet. Det er også mulig å lagre 11 forskjellige typer informasjon om innehaveren. Dette kan være personnummer, telefonnummer til pårørende og lege etc. Klokken programmeres manuelt.

Funksjoner


Cadex klokken har fire knapper for programmering og en alarmknapp for enkelt å vise innlagte alarmer eller informasjon om brukeren.



- MODE:** Brukes for å bla gjennom klokkens fire hovedmenyer og for å programmere den.
- ADJUST:** Brukes for å kunne gå inn i programmeringsmeny for tid, alarm og brukerinformasjon.
- FORWARD:** Brukes for å bla framover, stenge en alarm og til programmering av klokken.
- REVERSE:** Brukes for å bla tilbake, stenge en alarm og til programmering av klokken.
- ALERT:** Alarmknappen brukes for å vise programmerte alarmer og personlige data om brukeren.

Klokkens 4 hovedmenyer

Tid og dato → alarmbank → databank → aktivering av alarm
MODE knappen brukes for å bla mellom menyene

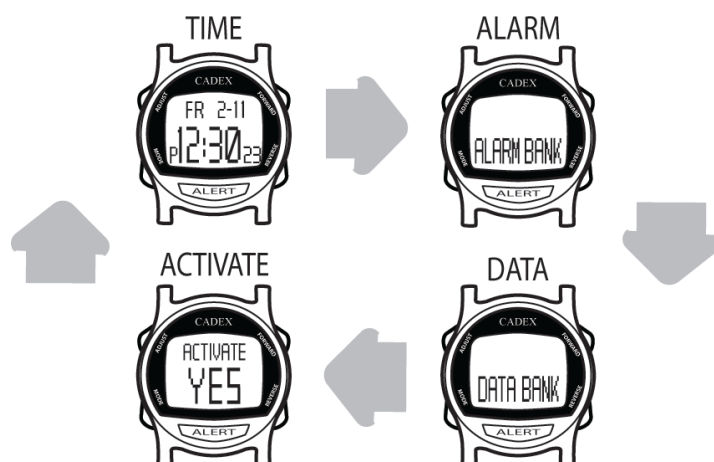

- TIME:** viser tid og dato
ALARM: viser lagret alarm
DATA: viser informasjon om bruker av klokka
ACTIVATE: aktiverer alle alarmer / slår av alle alarmer

Når tidsmenyen er valgt, vises aktuell tid og dato. Tiden vises i timer, minutter og sekunder.
Dato vises i ukedag, måned og dag.

Etter 5 minutter i en av hovedmenyene vil klokken automatisk gå tilbake til tidsmenyen hvis innstillingsknappene ikke er brukt i mellomtiden, eller klokken ikke er i påminnerfunksjon.

Slik stilles tid og dato

1. Trykk på MODE knappen en eller flere ganger til tidsmenyen vises i displayet.
Trykk og hold ADJUST knappen i 5 sek til ”timene” begynner å blinke.
2. Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for å stille inn ønsket time. OBS: Klokken har 12 timers visning. Trykk med FORWARD/REVERSE knappen helt til displayet viser:
A=AM - formiddag
P=PM – ettermiddag foran klokkeslettet.
3. Trykk MODE knappen for å gå videre til minutter.
4. Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for å stille inn minutter og trykk MODE for gå videre til sekunder.
5. Gjør på samme måte for å stille inn år, måned og dag. Klokken vil automatisk stille seg inn på riktig ukedag.
6. Trykk ADJUST knappen for å bekrefte. Denne kan brukes når som helst i programmeringsfasen for å bekrefte endringer som er gjort.



Alarmbanken



Cadex Klokken kan lagre opptil 12 daglige alarmer. Disse er nummererte fra 1 til 12, og behøver ikke benyttes i kronologisk rekkefølge, dvs. at alarm 1 ikke trenger å være dagens første alarm. Hver alarm kan vise en tekst på inntil 36 tegn.

Disse tegnene kan brukes:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . # + - ! [space]

Tips: Hvis du vanligvis er borte fra hjemmet på dagtid, anbefales det at man legger inn en alarm tidlig på dagen, som minner deg på å ta med medisinene.

Slik settes en alarm

1. Trykk MODE knappen en eller flere ganger til ALARM BANK ses i displayet.
Trykk FORWARD eller REVERSE knappen for å velge den alarmen du vil se eller endre. (nummer AL1-AL12)
2. Trykk og hold ADJUST knappen i 5 sekunder til alarmen du vil sette begynner å blinke.
(nummerert AL1-AL12)
Trykk FORWARD og REVERSE knappen for å slå på og av alarmindikatoren, ((*)) i displayet.
Når alarmindikatoren vises i displayet betyr det at alarmen er aktivert. Når alarmindikatoren ikke vises i displayet er alarmen slått av.
3. Trykk MODE knappen og ”timer” blinker.
Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for stille inn ønsket time.
4. Trykk MODE knappen og ”minutter” blinker
Trykk FORWARD eller REVERSE for stille inn ønsket minutt.
5. Trykk MODE knappen og første ”tegn” i alarmteksten blinker.
(Hvis alarmtekst ikke skal legges inn, trykk ADJUST for å bekrefte alarminnstillingene. Trykk på MODE 3 ganger for å komme til klokken.)
6. Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for å sette inn ønsket tegn i teksten.
Tips: Trykk og hold FORWARD eller REVERSE knappene for å bla automatisk til ønsket bokstav.
7. Trykk MODE for å gå til neste tegn eller lage et tomt tegn.
Gjenta pkt. 6 for hvert tegn som settes i teksten.
Tips! Hold nede MODE knappen for å gå tilbake til et av tegnene i teksten.
8. For å slette et tegn, skriv over det med tegnet ”mellomrom”, en blinkende understreking som ligger foran bokstaven A.
9. Trykk ADJUST knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til ALARMBANK.
Trykk FORWARD eller REVERSE for å velge ny alarm. Trykk MODE knappen for å gå videre til annen meny.



Å slå av en enkelt alarm

Man kan slå av en enkelt alarm, for senere å aktivere den igjen. Bruk FORWARD og REVERSE knappene for å velge den alarmen du vil slå av. Hold inne ADJUST knappen i 5 sekunder til alarmen begynner å blinke. Trykk FORWARD knappen. Symbolet ”((*))” forsvinner fra displayet. Trykk ADJUST for å bekrefte at alarmen er slått av.

For å aktivere alarmen igjen, hold ADJUST knappen inne i to sekunder. Trykk REVERSE og ”((*))” ses på displayet. Bekreft med ADJUST.


Databanken

Cadex Armbåndsur kan lagre følgende informasjon:

Name:	Navn og telefonnummer
Alert:	Viktig informasjon om f.eks. brukerens helsetilstand
Allergic:	Allergiske reaksjoner
Doctor:	Lege og telefonnummer
Contact:	Kontaktperson og telefonnummer
Blood:	Blodgruppe
Birth:	Fødsels og personnummer
Insurer:	Forsikringsselskap
Policy:	Forsikringsinformasjon
S.S.#:	Social Security nummer
Card:	Kredittkortnummer og gyldighetsdato

Slik lagres personlige data

1. Velg DATA BANK meny ved å trykke MODE knappen en eller flere ganger til DATA BANK vises.
Bruk FORWARD eller REVERSE knappene for å velge den informasjonen du vil se eller endre.
2. Trykk og hold ADJUST knappen i 5 sekunder til en blinkende strek vises eller det første tegnet begynner å blinke.
Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for å velge ønsket bokstav.
3. Trykk MODE knappen for å gå til neste tegn.
Tips! Hold nede MODE knappen for å gå tilbake til et av tegnene i teksten.
4. Trykk ADJUST knappen for å lagre informasjonen og gå tilbake til DATA BANK.
Trykk FORWARD eller REVERSE knappene for å velge ny DATA BANK.
Trykk MODE knappen for å gå til annen meny.

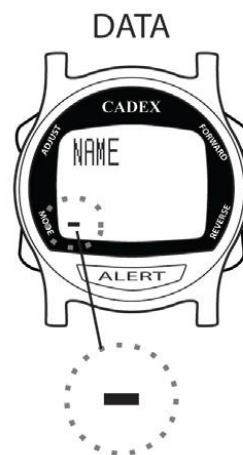

Slik aktiveres alarm

Cadex Armbåndsurs har en hovedinnstilling som kan slå av eller på alle aktiverte alarmer på en gang. Denne kan være grei å bruke dersom man ikke skal bruke klokken over en lengre periode.



Slik slås alle alarmer av og på

1. Trykk MODE knappen en eller flere ganger til ”ACTIVATE” vises. Bruk FORWARD eller REVERSE knappene for å velge mellom YES og NO.
YES =slår på alle aktiverte alarmer
NO =stenger alle aktiverte alarmer
2. Trykk MODE en gang for å komme tilbake til klokken.

Repetisjon av alarm (Medical Snooze)

Når en alarm starter, vil klokken pipe i 1 minutt og alarmteksten kan ses i displayet (hvis lagt inn). Pipingene kan slås av ved å trykke 1 gang på FORWARD eller REVERSE. Klokken vil nå gå i Medical Snooze modus.

Medical Snooze modus innebærer at:

- Alarmteksten vil gli over displayet, hvis det er lagt inn. Hvis det er flere alarmer i Medical Snooze modus vil alarmtekstene gli over displayet etter hverandre.
- Klokken vil pipe 2 ganger hvert tredje minutt. Dette som en subtil påminnelse om å ta medisinen, hvis man er blitt distrauert.
- Med flere alarmer i Medical Snooze modus, kan de 2 pipene komme oftere enn hvert tredje minutt.
- Klokken vil være i Medical Snooze modus i opp til 4 timer (240 minutter) for hver enkelt alarm.
- Når en alarm er i Medical Snooze modus, kan den slås av ved å trykke på FORWARD eller REVERSE. Det anbefales at dette ikke gjøres før medisinen er tatt.

Tips: Hvis du ikke vil at alarmen skal gå i Medical Snooze modus, trykk FORWARD eller REVERSE 2 ganger når alarmsignalet piper første gang.

ALERT knappen

Ved å trykke på den røde ALERT knappen kan man se all informasjon, som ligger i Alarmbanken(ALARM BANK) og i Databanken (DATA BANK). Det eneste som ikke blir vist er informasjonen som er lagret om kredittkort (CARD #).

Slik slettes informasjon

Informasjon kan slettes på to forskjellige måter.

Vanligvis ønsker man kun å slette et medisinnavn eller teksten i enkeltalarmer. Enkeltalarmer eller informasjon i DATABANK kan slettes ved å erstatte med ny tekst eller ved å erstatte med tomme tegn (mellomrom).



Den andre måten er å nullstille hele klokken ved å trykke og holde alle 4 knappene inne i 5 sekunder.



NB! Dette vil slette alle alarmer og all informasjon.

Klokken må stilles på nytt, alle alarmer må legges inn på nytt og all informasjon må legges inn igjen.

Bytte av batteri

Cadex bruker et batteri av typen CR2032. Batteriets varighet er ca. ett år, avhengig av bruk. Ved første tegn på dårlig batteri (svakt display), må batteriet byttes. Vi anbefaler at batteriet byttes av en urmaker eller at klokken sendes inn til Abilia.

VIKTIG! For at klokken skal fungere riktig etter at batteriet er byttet, må den nullstilles. Dette gjøres ved å trykke og holde alle 4 knappene inne i 5 sekunder. Når knappene slippes vil klokken pipe. Klokken må stilles på nytt, alle alarmer og all informasjon må legges inn på nytt.

Annet

Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av informasjon som følge av feil bruk, feil innstilling, dårlig batteri eller lignende.

Cadex klokken anbefales brukt som et supplement til eventuelt epilepsimerke eller annen medisinsk informasjon og må ikke erstatte dette. Det anbefales å oppbevare en skriftlig kopi av alle data som lagres i klokken.

Cadex klokken tåler vannsprut, men kan ikke brukes ved dusjing eller bading.

Klokka er nikkelfri og utført i rustfritt stål og plast.
Ved svært alvorlig allergi bør individuelle vurderinger vektlegges.

Sikkerhet

Abilia har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 14971 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument.

Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS' økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

Abilia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark
Phone +45 70 22 98 08 | Fax +45 48 24 98 08 | info@abilia.dk | www.abilia.dk