



Dansk Høreteknik

...lyd giver liv!

Brugervejledning

NL200

Bluetooth halsteleslynge



Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner.

Tillykke med din nye NL200 Bluetooth halsteleslynge.

Æsken indeholder:

1 stk. Bluetooth halsteleslynge

1 stk. Strømforsyning

1 stk. Dansk brugervejledning

Indhold

Opstart	4
Opladning af batteriet	4
Lav batterispænding	4
Betjeningsknapper	4
Anvendelse af NL200	5
Registrering af NL200 på mobiltelefonen	5
Tænd NL200	5
Sluk NL200	6
Forøg lydstyrken	6
Formindsk lydstyrken	6
Luk for mikrofonen	6
Viderestil samtale	7
Genopkald af sidst indtastede nummer	7
Annullér opkaldsprocessen/afslut samtale	7
Besvar et opkald	7
Afvis et indgående opkald	7
Stemmebetjening	7
Rengøring	8
Garanti	9

Opstart

Opladning af batteriet

Tilslut strømforsyningen til ladestikket (7).

Når NL200 lader, vil statuslampen (3) lyse rødt.

Når NL200 er fuldt opladet, vil statuslampen (3) være slukket.


Lav batterispænding

Ladetiden for et fuldt afladet batteri er 5 timer.

Bemærk: Anvend kun den medfølgende strømforsyning mærket 5 VDC, 200 mA.

Når batterikapaciteten på NL200 bliver lav, høres en akustisk alarm under samtale.

Betjeningsknapper:

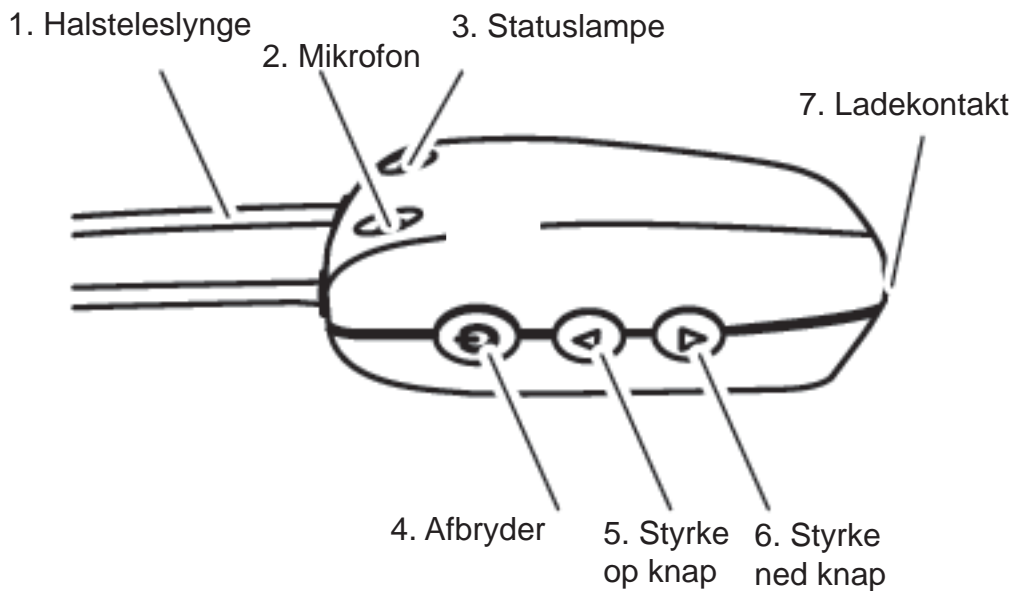

Anvendelse af NL200

NL200 indeholder et teleslyngesystem, der fungerer sammen med høreapparater, der har indbyggede telespoler. Ved anvendelse skal NL200 hænge om halsen samt skabe forbindelse til Bluetoothfunktionen i din mobiltelefon.

De forskellige funktioner beskrives nedenfor.

Registrering af NL200 på mobiltelefonen

Før du kan anvende NL200 første gang, skal den registreres på din mobiltelefon.

1. Tænd for din mobiltelefons Bluetooth funktion. Se brugervejledningen for din mobiltelefon.
2. Tryk og hold afbryderknappen (4) på NL200 til statuslampen (3) skiftevis blinker rød og blå.
3. Aktiver søgefunktionen for Bluetooth enheder på mobiltelefonen.
4. Vent til mobiltelefonen har fundet NL200.
5. Mobiltelefonen skal nu i displayet vise navnet "KSY-01".
6. Vælg denne enhed og tryk koden "0000".
7. Hvis registreringen er afsluttet succesfuldt og NL200 er forbundet til mobiltelefonen, vil statuslampen blinke blå.

Tænd NL200

Næste gang du skal anvende NL200, er der ingen grund til at gennemføre registreringsproceduren igen.

Efter NL200 er tændt igen, vil den automatisk registrere sig til den relevante mobiltelefon.

Bemærk: Bluetooth funktionen skal være aktiveret på mobiltelefonen.

Anvendelse af NL200

- 1 Tryk og hold afbryderknappen (4) nede på NL200 til statuslampen (3) lyser blå.
- 2 Kort tid efter vil statuslampen blinke blå. Dette betyder, at NL200 nu er forbundet til mobiltelefonen.

Sluk NL200

- 1 Tryk og hold afbryderknappen til statuslampen (3) slukker.

Forøg lydstyrken

- 1 Under samtale tryk og hold styrke op knappen (5) til den ønskede styrke er opnået.
- 2 Et akustisk alarmsignal høres, når maksimal styrke er nået.

Formindsk lydstyrken

- 1 Under samtale tryk og hold styrke ned knappen (6) til den ønskede styrke er opnået.
- 2 Et akustisk alarmsignal høres, når minimal styrke er nået.

Luk for mikrofonen

- 1 Under samtale tryk styrke op knappen og styrke ned knappen (5 og 6) samtidig i 2 sekunder. Dette bekræftes af NL200 med et akustisk alarmsignal.
- 2 Når mikrofonen i NL200 er slukket, vil et akustisk signal kunne høres hvert 4. sekund og statuslampen (3) vil blinke 3 gange med korte intervaller.
- 3 For at åbne for mikrofonen igen tryk styrke op knappen (5). Dette bekræftes af NL200 med et akustisk alarmsignal.

Anvendelse af NL200

Viderestil samtale

Du kan skifte samtalen mellem mobiltelefon og NL200 under samtale.

- 1 Under samtale tryk og hold styrke op knappen (5) i 2 sekunder.
- 2 Samtalen bliver nu overført til mobiltelefonen.
- 3 For at viderestille samtalen til NL200, tryk og hold styrke op knappen (5) i 2 sekunder igen. Samtalen bliver nu overført til NL200 igen.

Genopkald af sidst indtastede nummer

Hvis NL200 er i stand-by mode, tryk og hold styrke op knappen (5) i 2 sekunder.

Mobiltelefonen genopkalder det senest indtastede nummer.

annullér opkaldsprocessen/afslut samtale

Tryk tænd/sluk knappen (4) let for at afbryde opkaldsprocessen og/eller afslutte samtalen.

Besvar et opkald

Tryk tænd/sluk knappen (4) let for at tage samtalen.

Afvis et indgående opkald

Tryk tænd/sluk knappen (4) i 2 sekunder for at afvise et opkald.

Stemmebetjening

Du kan anvende stemmestyringsfunktionerne på mobiltelefonen via NL200. En forudsætning for dette er dog, at din mobiltelefon understøtter denne funktion. For yderligere oplysninger henvises til mobiltelefonens brugervejledning.

Hvis NL200 er i stand-by mode, tryk tænd/sluk knappen (4) let. Mobiltelefonen modtager nu stemmekommandoerne via den indbyggede mikrofon i NL200.

Rengøring

NL200 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

Garanti

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationer efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationer gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler