



Dansk Høreteknik

*...lyd giver liv!*

Brugervejledning

---

## NL100

Halsteleslynge



# **Introduktion**

---

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner.

Tillykke med din nye NL100 Halsteleslynge.

Æsken indeholder:

1 stk. Halsteleslynge

1 stk. Batteri AAA/LR03

1 stk. Adapter 2,5mm til 3,5mm

1 stk. Dansk brugervejledning

# ***Indhold***

---

<b>Opstart</b>	4
Isætning af batteri	4
Tilslut NL100	4
<b>Anvendelse af NL100</b>	6
<b>Rengøring</b>	7
<b>Garanti</b>	8

# Opstart

---

## Isætning af batteri

Skub batteridækslet af (bagsiden af NL100).

Indsæt 1 stk. AAA/LR03 batteri i NL100. Vær opmærksom på, at batteriet vendes korrekt. Se markering i batterikammeret.

Skub batteridækslet på igen.

*Bemærk:* Anvend ikke genopladelige batterier.

## Tilslut NL100

Tilslut NL100 til hovedtelefonudgangen på din trådløse telefons håndsat som vist på tegningen. Tag halsteleslyngen over hovedet. Den bedste funktion opnås, hvis halsteleslyngen ligger ud på skulderne, så høreapparaternes lodrette placering er indenfor halsteleslyngen.



# Opstart

---



# Anvendelse af NL100

---

NL100 anvender teleslyngeprincippet, der betyder at NL100 vil fungere med alle høreapparater, der har indbygget telespole (T), således at du hører lyd tydeligere.

1. Skub omskifteren ON/OFF til stilling ON. Den grønne lampe lyser.

Bemærk: Hvis lampen bliver rød, betyder det, at batterispændingen er lav, og skal udskiftes hurtigst muligt.

2. Sæt høreapparatet/erne i stilling "T" eller "MT".
3. Indstil styrken på rulleknappen på NL100 til den er passende.
4. NL100 er nu klar til brug, og du kan kommunikere med opringeren via den indbyggede mikrofon.
5. Skub ON/OFF knappen i stilling OFF for at slukke. "Tændt" lampen slukker.

*Bemærk:* Du kan anvende adapter 2,5mm til 3,5mm fra NL100 pakningen for at tilslutte NL100 til f.eks. MP3, PC, eller til din mobiltelefon. Følg de ovenstående punkter.

# ***Rengøring***

---

NL100 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

## Garanti

Dansk Høreteknik A/S yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik A/S yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningseskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningseskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik A/S gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik A/S. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik A/S, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS  
Østervej 6  
Postboks 114  
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598  
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk  
www.dh-as.dk

Forhandler