

LEMCO SmartStol

BRUGSANVISNING



Unik løsning til personer med behov for optimal ergonomi i forhold til daglige siddebehov ved eks. spiseborde i eget hjem eller institution.

DK 1.1

SIKKERHEDS INSTRUKTION

Sikkerhed kommer altid først.

Læs, forstå og følg altid brugsanvisningen før du begynder at bruge din LEMCO SmartStol

Garantien bortfalder ved anden brug end beskrevet.

Bortskaffelse af din LEMCO SmartStol skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Stolen skal placeres på en plan flade.

Stolen er ikke et legetøj, må ikke bruges af børn under 15 år uden en voksens supervision.

Stolen er ikke børnesikret under selve stolen, lad derfor ALDRIG børn kravle ind under stolen.




Løft aldrig stolen i armlænene alene, vær evt. 2 personer der løfter i hver side, eller løft stolen i ryglænet.

VIGTIG INFORMATION

For test af optimal betjening og ergonomi for brugeren, stilles stolen foran bordet. Stolen drejes 90 grader, hvorefter den skubbes indtil bordet med en håndsbredde afstand fra bord til armlæn - uden person i sædet. (Se ovenstående side)

Derefter er stolen klar til at personen kan sætte sig og evt. klemning af hånd mellem stol og bord undgås.

Håndsbredde

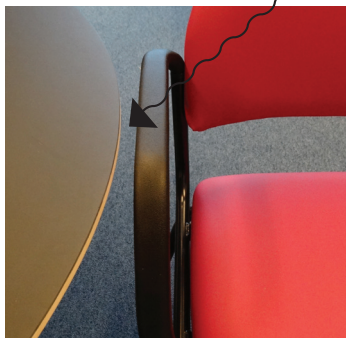

Ved at følge ovenstående sikres at brugeren kan komme til strækkelig tæt på bordet, når stolens sæde og ryg glider fremad.

BETJENING



Håndtaget (Marketeret med rød ring) løftes og sædet skubbes let fremad/bagud.

Der er 3 positioner.

1. Almindelig stol
2. 5 Centimeter frem
3. 15 Centimeter frem

TRANSPORT



Ved transport må stolen IKKE løftes i armlænene.

Lyft i ryggen, og vær evt. to personer om flytning.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brug:	Specialstol til plejehjem og private boliger til indendørs brug med patentanmeldt skydesystem
Låse-Positioner:	3
Rotation:	360 ⁰
Størrelse:	Bredde: 57 cm, Bredde 60 cm , Højde 90 cm
Vægt:	16 kg
Betræk:	Tekstillæder (PUR)
Brandklasse:	AS1530 pt.3 1999
Styrke:	Klasse 5 - Komerciel Ekstra Stærkt
Slid:	50.000+ Martindale (meget stærkt)
Rengøring:	Rengøres med lædersæbe. Eks. Guardian, der fås i flere velassorterede møbelbutikker og hos LEMCO.
Garanti:	I henhold til købeloven
Rengøring	Brug lædersæbe, eks. Guardian. Kan fås hos LEMCO
Vedligeholdelse	Smøres 1 gang om året med 1 dråbe syrefri olie i hver skinne og i dreje rundel.
Patent	Stolen er patentanmeldt

På vores internet side kan du læse mere om andre løsninger, som kan hjælpe personer med bevægelses-besvær i eget hjem.

Skandinavisk Forhandler og distributør

LEMCO (AMT International ApS)

Nordre Strandvej 119A • DK-3150 Hellebæk
Tlf: +45 3325 4002 • Fax: +45 7020 5899
info@lemco.dk • www.lemco.dk