

Brugsanvisning til XXL-Rehab Liften og Sejl


Inden du anvender liften skal du nøje gennemlæse denne brugsanvisning. Som medhjælper / bruger anbefaler vi at du afprøver liften og sejl sammen med en kollega, inden man løfter en patient. Ved introduktion af liften til en patient bør man gennemgå forløbet inden første løft.

OBS! Liftene må kun anvendes til at løfte personer som er indenfor de på liftene angivne max. belastninger på 250 / 300 kg.

Monteringsanvisning

XXL-Rehab Liftene leveres i to dele, underdel (A) og overdel (B) .

1. Placer overdelens mast (C) i firkanttrøret (D) på underdelen.
2. Spænd grebet (E) på den højre side ordentligt.
3. Stikket fra løftmotoren (F) sættes i stikket (G) på batteriboksens bagside. (Med Linak boks ER stikket allerede isat i bunden af styreboksen).
4. Stikket fra benspredningsmotoren sættes i det modsvarende stik i batteriboksens side (H). (Med Linak, i styreboksens bund, stik 2).
5. Sæt håndkontrollens stik (6) i stikket på batteriboksens side.
6. Kontroller at nødstopknappen er oppe.
7. Prøvekør liften.

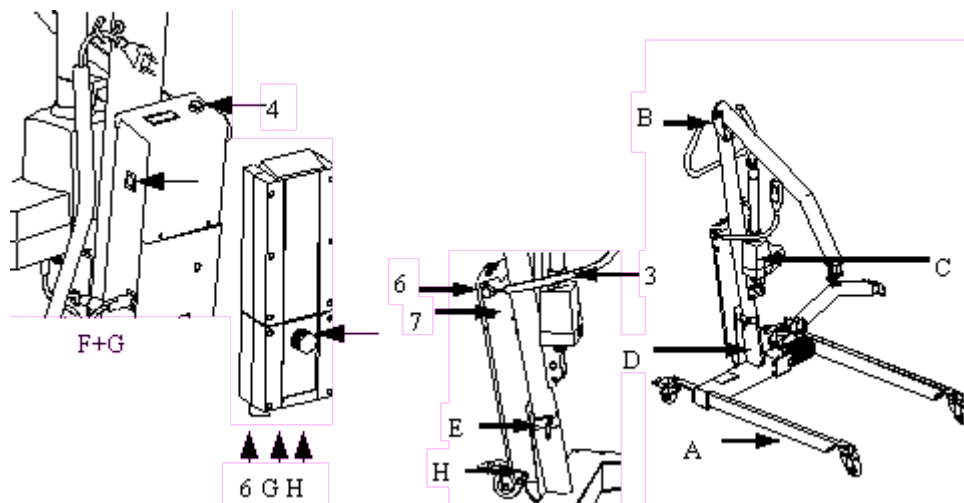

1. Batterialarm
2. Op/Ned
3. Nødsænkning manuel/el
4. Nødstop
5. Batteriindikator/tæller
6. Stik for håndkontrol
7. Sikring



Liftens tekniske funktioner

- Håndkontrol:** Håndkontrollen har 4 funktioner som er markerede med pile, op, ned, ind og ud. Håndkontrollen er forsynet med spiralledning for at du skal kunne være tæt på patienten når du arbejder med liften.
- Batterialarm:** På batteriboksen findes en batterialarm. Alarmen giver signal når der skal lades.
- Batteriindikator:** På batteriboksen findes en batteriindikator. Batteriindikeringen viser hvornår liften skal lades op.
- Sikring:** På batteriboksen findes en overbelastningssikring.
- Nødstop** Batteriboksen er forsynet med nødstop, der afbryder omgående ved tryk. Nødstop tilkobles igen ved at dreje knappen let, hvorved den hopper op. Nødstopknappen er ikke en tænd og sluk knap, og skal altid være oppe.
- Nødfir:** Liften er forsynet med manuel nødfir som sidder i aktuatoren, hvilket gør det muligt at få patienten ned, hvis liften skulle svigte medens den er i brug. Man skal blot løfte i den røde nødfirsknap på aktuatorens yderrør.
- Op / Ned knap:** Anvendes hvis håndkontrollen svigter.
- Ladning:** Opladning foretages ved at sætte elstikket i en alm. stikkontakt. Den grønne lampe på opladeren vil lyse, indtil batterierne er helt opladet. Det er ikke nødvendigt at overvåge liften ved opladning, ide opladeren selv slår fra. Grøn = opladet. Rød = afladet. Det anbefales at indarbejde en fast laderutine for altid at have en brugbar lift.
- Manøvrering:** Ved manøvrering med en patient i liften skal liftens ben spredes ud.
- Ved at trække med liften opnås den roligste bevægelse for patienten, samtidig belastes hjælperen mindst muligt. Derfor skub kun liften ind over sengen.
- Når liften skal drejes, placere hjælperen sig på langsiden af liften og lader liften "dreje om sin egen akse". Med den ene hånd trækker man i liftens håndtag og med den anden hånd skubber man let til løftesejlet eller omvendt (lige under åget).
- Tving aldrig liften til at dreje ved kun at bruge håndtagene, derved kommer patienten let til at "svinge".
- Kørsel:** En lift er **ikke** et transportmiddel. Indarbejd arbejdsrutiner der mindsker kørsel med liften. Når patienten er løftet, og liften er trukket ud fra sengen, flyttes kørestol eller toiletstol ind under patienten. Kør med det hjælpemiddel der har størst hjul.
- Bremser:** Benyt kun bremserne ved parkering af liften. Ved løft vil en ubremset lift selv bevæge sig i position, så løftet bliver lodret og uden forskydninger af tyngdepunktet. Ved nedsenkning til stol er det muligt at skubbe liften væk fra patienten, i takt med at løftesejlets stropper slækkes.

Løftesejl

Halvsejl uden hovedstøtte



Helsejl med hovedstøtte



Placering

Hæv sengen op i en god arbejds højde før anbringelse af løftesejlet.

Løftesejlet skal placeres omhyggeligt for at opnå et godt (behageligt) løft.

Ved løft fra liggende stilling skal den nederste del af rygstykket-X-placeres ud for halebenet. Dette gøres ved at rulle løftesejlet ind under patienten som stiklagen, eller ved at benytte sengens elevation således, at patienten løftes fra siddende stilling.

Benstøtterne lægges pænt og glat under patientens lår og krydses foran.

Løftet

Løftesejlets stropper hægtes på liftens løfteåg. Vigtigt: Kontroller at stropperne er korrekt påhægtet før løftet begynder.

Ved løftets start holder hjælperen fast i benstøtterne for at hindre disse i at trække op i skridtet.

For at sikre sig at benstøtterne er helt glatte under lårene (vigtigt), kan man afbryde løftet, når benstøtterne strammes til, for med den ene hånd at løfte patientens lår og trække løftesejlet glat med den anden hånd.


Ved løft fra siddende stilling skal løftesejlet blot trækkes så langt ned bag patienten som muligt. Patienten skal ikke sidde på sejlet.

Løft ikke højere end højst nødvendigt.



Løftesejl

Toiletsejl (det med bæltet)

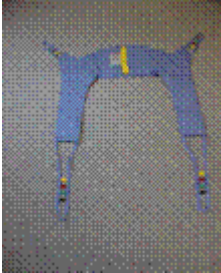

Toiletsejl

Toiletsejlet giver mulighed for at løfte den påklædte patient direkte til toilet eller toiletstol uden besværlige mellemforflytninger, da af- og påtagning af bukser er mulig, mens patienten sidder i sejlet.

Forbered evt. løftet ved at åbne bukserne inden løftet.

Da sikkerheden i toiletsejlet ikke er den samme som i halv og helsejyl, er det vigtigt at foretage en vurdering af patienten, inden der løftes.

Placering

Løftesejlet placeres bag om patienten, så de påsyede puder hviler under armhulerne, hvorefter bæltet lukkes, gerne lidt stramt.

Færdiggør løftet rigtigt !

Alle sejlene er forsynet med styrestropper på ydersiden. Disse bruges til at placere patienten rigtigt i seng eller kørestol. Ikke mindst i kørestole er det vigtigt at slutte løftet korrekt for at undgå at skulle rette på patienten manuelt.

I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt blot at trække lidt tilbage i rygstroppen, lige inden patienten når sædet. I andre tilfælde kan man fælde ryglænet på stolen lidt ned eller vippe stolen lidt bagover, hvorefter man styrer patientens bagdel ned ad ryglænet, så patienten kommer til at sidde godt tilbage i sædet. En tredje metode er at trykke foran på patientens knæ, så siddevinklen i sejlet ændres, og placeringen i stolen bliver korrekt.

Løftesejlets forskelligfarvede løftestropper bruges til at justere patientens siddevinkel med.

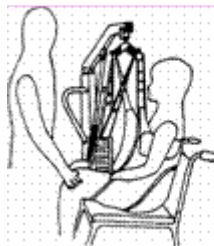


Fig. C