

# Vejledning til Doff N Donner

## Strømpepåtager

### 0. Fjern skarpe genstande så som smykker mv.

1. **Introduktion - Doff N Donner** er fremstillet i silikone og er fyldt med saltvand med tilbehøret **keglen**, som bruges til at rulle strømper på med. Doff N Donner kan anvendes til knæstrømper, høje strømper samt strømper med åben tå.



Keglen

Doff N Donner

### 2. Sæt keglen fast

- a. Nedeunder keglen sidder en sugedop og et håndtag.
- b. Sørg for at håndtaget peger mod højre, før keglen skal sættes fast.
- c. Sæt keglen på en ren bordplade eller et rent gulv med en nogenlunde glat overflade (træoverflader med for meget struktur kan være et problem).

- d. Lås sugekoppen fast ved at dreje håndtaget mod urets retning, så det peger mod venstre (Gode råd: giv evt. et tryk ned på keglen, mens du lukker sugekoppen. Have en fugtig klud i nærheden, så du kan tørre sugekoppen før montering).



### 3. Kør strømpen ned over keglen

- a. Sørg for at strømpens hæl er vendt ind mod dig.

### 4. Rul Doff N Donner ned over keglen

- a. Rul Doff N Donner helt ned til strømpekanten.
- b. Vær opmærksom på, hvor hælen i strømpen er.
- c. Træk strømpen op omkring Doff N Donner og stram til.
- d. Rul Doff N Donner helt op, så det ligner en lille tromme.



### 5. Påfør strømpen

- a. Sæt den ende, der ligner en tromme, mod tærne og hold strømpens hæl nedad.
- b. Rul Doff N Donner op indtil strømpen er rullet helt af. Vær forsigtig ved hælen.
- c. Rul Doff N Donner af igen.
- d. Om nødvendigt, hiv forsigtigt strømpen på plads evt. med handsker.

### 6. Tag strømpen af

- a. Rul Doff N Donner op ad benet til lige før strømpekanten.
- b. Træk strømpen udover Doff N Donner og rul strømpen af.

### 7. Pleje af Doff N Donner

Daglig rengøring af Doff N Donner og keglen med varmt vand og sæbe (gerne antibakteriel sæbe). Desinfektion med isopropylalkohol.

Har du spørgsmål eller feedback, så kontakt [support@encostore.dk](mailto:support@encostore.dk) eller tlf. 42 50 43 80

2017 © EncoStore, Scicess Medicon