

BRUGSANVISNING

**Amigo Star
FM-apparat**



Tak

Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille din nye Amigo Star i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og et minimum af vedligeholdelse.

Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt for at få det maksimale udbytte af dit nye hjælpemiddel.

For at imødekomme dine behov, kan forskellige funktioner indstilles i din Amigo Star.

FM-apparatets aktuelle indstilling er markeret af din hørekonsulent i de relevante afsnit i denne manual. På sidste side findes et overblik over alle de funktioner, der er indstillet i dit apparat.


Kontakt din hørekonsulent, hvis du har spørgsmål til brug eller vedligeholdelse af din Amigo Star.

Retningslinjer for brug

Amigo Star er beregnet til at dirigere lyd, der er modtaget fra en FM-sender, til øret.

Amigo Star er beregnet til mennesker med normal hørelse, som kan drage fordel af assisterende lydgivere. Det er designet til at levere et klart talesignal under forskellige dagligdags aktiviteter for at afhjælpe de negative virkninger fra afstand, dårlig rumakustik og baggrundsstøj.

Amigo Star kan ikke bruges alene. Det skal bruges sammen med en FM-sender.

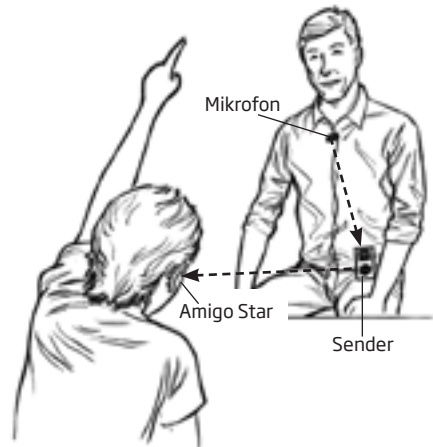

VIGTIGT

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge din Amigo Star. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af dit FM-apparat og batterier.

Indhold

Amigo Star	7
Advarsler	8
Således aktiveres Amigo Star for første gang	15
Sådan udskiftes batteriet	16
Således tændes og slukkes din Amigo Star	18
Markering af højre og venstre øre	20
Således påsættes Corda ² (tyndslange)	21
Således sættes Amigo Star på øret	22
LED-indikator	23
Kanalsøgningsknap	24
Volumenkontrol	25
Mulighed for børnesikret batteriskuffe	26
Således bruges din Amigo Star	27
Således vedligeholdes din Amigo Star	29
Rengøringsværktøjer	30
Således rengøres Corda ² (tyndslange)	31

Fortsætter på næste side

Daglig vedligeholdelse af Corda ² -tipper	32
Udskiftning af Corda ² -tip	33
Håndtering af Corda ²	34
Dvale- og slukindstillinger	35
Amigo Star og vandafvisning	36
Undgå varme, fugt og kemikalier	39
Almindelige problemer og deres løsninger	40
International garanti	44
Teknisk information	46
Oversigt over din Amigo Stars indstillinger	49

Amigo Star


Din øreprop/tip:




Corda²-slange:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Venstre størrelse 0 | <input type="checkbox"/> Højre størrelse 0 |
| <input type="checkbox"/> Venstre størrelse 1 | <input type="checkbox"/> Højre størrelse 1 |
| <input type="checkbox"/> Venstre størrelse 2 | <input type="checkbox"/> Højre størrelse 2 |

Åben tip:

- | | |
|---|---------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> Small: |
|  | <input type="checkbox"/> Medium |
|  | <input type="checkbox"/> Large |

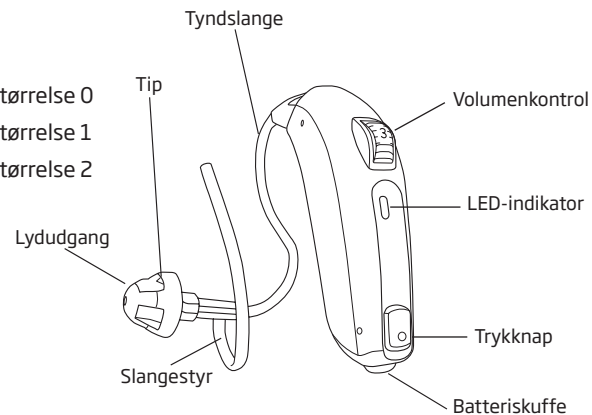

Batteristørrelse: 312

Advarsler

Amigo Star kan ikke erstatte et høreapparat.

Kontakt din hørekonsulent, før du begynder at bruge Amigo Star for at sikre dig, at det er et passende apparat for dig at bruge.

Advarsler

Før du tager din Amigo Star i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning.

Sådan bruges Amigo Star

- Amigo Star må kun anvendes som anvist og tilpasset af din hørekonsulent. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab
- Lad aldrig andre bruge din Amigo Star, da forkert brug kan forårsage permanent skade på deres hørelse
- Bemærk, at tippen kan falde ud i øregangen. Tag den forsigtigt ud, hvis du kan. Skub ikke tippen videre ind i øregangen. Skub ikke slangen tilbage i øret, før tippen er fjernet fra øret. Spørg din hørekonsulent, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal fjerne tippen

Advarsler

Risiko for kvælning

- Amigo Star, tilbehør og batterier er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn og alle andre, der kan komme til at sluge disse eller på anden måde komme til skade
- Skift aldrig batterier og justér aldrig kontrollerne på Amigo Star, mens babyer, små børn eller personer med mentale handicap ser på det
- Bortskaf brugte batterier på et sted, så de ikke er tilgængelige for babyer, små børn eller personer med mentale handicap. Amigo Star kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis FM-apparatet skal bruges af babyer, små børn eller mentalt handicappede

Søg straks læge, hvis nogen kommer til at sluge et batteri eller FM-apparat.

- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du sluger piller
- Tag under ingen omstændigheder FM-apparater eller batterier i munden De er glatte og kan let sluges ved et uheld

Advarsler

- Amigo Star kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis FM-apparatet skal bruges af babyer, små børn eller mentalt handicappede

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din hørekonsulent har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden
- Forsøg ikke at genoplade dine batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skade

Amigo Star fungerer ikke

- Amigo Star kan ophøre med at fungere, for eksempel hvis batterierne er brugt op, eller hvis slangen er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Du bør være opmærksom på denne mulighed, særligt når du er afhængig af alarm-lyde
- Amigo Star kan ophøre med at fungere, for eksempel hvis batterierne er udløbet, eller hvis Corda² tyndslangen eller tippen er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Hvis dette sker, henvises der til problemløsningsafsnittet på side 40

Advarsler

Aktive implantater

- Oticon tager forbehold og anbefaler, at følge samme retningslinjer som producenter af icd-enhed og pacemaker anbefaler vedrørende brugen af mobiltelefoner
- Hvis du har et aktivt implantat, skal FM-apparaterne holdes min. 15 cm fra dette. Dvs. de må fx ikke puttes i brystlommen. Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for information om risiko for forstyrrelser
- Multiværktøjet har en indbygget magnet. Såfremt du har et implantat, fx en pacemaker eller icd, må multiværktøjet ikke placeres i brystlommen eller på anden måde tæt ved brystet

Eksplodingsrisiko

- Batteriet indeholder ikke nok strøm til at forårsage ild under normale betingelser
- Amigo Star er dog ikke testet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at Amigo Star ikke bruges på steder med eksplosionsfare

Advarsler

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi

- Tag din Amigo Star af inden fx røntgen, CT-, MR-, PET-scanning eller elektroterapi, da apparatet kan tage skade af kraftig stråling

Mulige bivirkninger

- Brug af Amigo Star kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks.
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i Amigo Star, som ellers ikke er allergene, irritere huden. Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger

Interferens

- Din Amigo Star er blevet grundigt testet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan interferens med dit Amigo Star og andre enheder forekomme for eksempel i forbindelse med nogle mobiltelefoner, interne trådløse systemer og butiksalarmssystemer. Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde.

Således aktiveres Amigo Star for første gang

Amigo Star er en elektronisk enhed, der drives af et batteri størrelse 312. For at aktivere Amigo Star, skal du indsætte et nyt batteri i batteriskuffen.

Amigo Star vil starte op, når batteriskuffen er lukket og volumenkontrollen står på alt andet end 1. Sæt Amigo Star på øret, efter du har lukket batteriskuffen.

En opstartsjingle høres, mens apparatet starter op.

Tryk på trykknappen på Amigo Star, hvis ingen lyd modtages fra FM-senderen. Amigo Star vil derefter søge og synkronisere med senderens kanal.

LED-indikatoren vil begynde at lyse, så snart kanalen er fundet, og FM-signalet modtages.

Sådan udskiftes batteriet



Dit FM-apparat bruger et batteri størrelse 312.
Batteriet virker i ca. 55 timer.

Et slidt batteri skal fjernes øjeblikkeligt og bortskaffes
i henhold til lokale regler.

Du hører to bip-toner, når batteriet skal udskiftes.
Denne varsling vil blive gentaget regelmæssigt,
indtil batteriet er fladt.


Batteriet kan blive fladt lige efter en varsling eller
et par timer derefter afhængig af batteriet.

Hvis batteriet bliver fladt, vil apparatet slukke.
LED-lampen slukkes, når batteriet er helt faldt.
LED-lampen kan fortsat være tændt et kort stykke tid,
men Amigo Star vil ikke sende lyd.

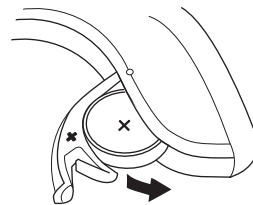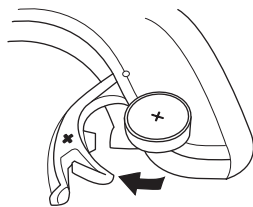

Udskift batteriet efter følgende retningslinier:

- Batteriskuffen åbnes fuldstændigt ved at skubbe til den ophøjede kant på apparatets bund. Fjern det gamle batteri. Magneten i bunden af multiværktøjet kan bruges til at håndtere batterierne
- Fjern mærkatet fra +siden af det nye batteri. Hvis batteriets overflade er fugtigt, bør det aftørres, før det bruges. Vent et par sekunder efter etiketten er blevet fjernet, så batteriet kan begynde at virke
- Det nye batteri kan indsættes ved at brug Multiværktøjets magnetiske ende. Sørg for at den + mærket på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen. Luk batteriskuffen

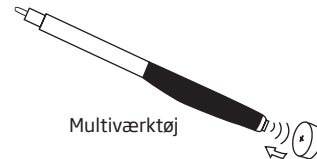

Således tændes og slukkes din Amigo Star

Tænd din Amigo Star ved at lukke batteriskuffen helt med et batteri isat. FM-apparatet vil starte med en opstartsjingle, når batteriskuffen lukkes. Dette viser, at både batteriet og apparatet virker.

Sluk din Amigo Star ved at åbne batteriskuffen lidt, indtil du hører et klik.



Amigo Star kan også tændes og slukkes med volumenkontrollen. Tænd din Amigo Star ved at rulle volumenkontrollen op, forbi position 1. Sluk din Amigo Star ved at rulle volumenkontrollen ned til position 1.



For at spare på batteriet, skal du sørge for, at der er slukket for Amigo Star, når du ikke bruger det. Batteriskuffen skal åbnes helt, for at lade luften cirkulere når du ikke bruger apparatet, specielt om natten eller hvis det ikke er i brug gennem længere tid!


Markering af højre og venstre øre

Corda² tyndslangens form gør, at din Amigo Star kun kan bæres på højre eller venstre øre.

For nemt at kunne identificere, om det er et venstre- eller højre-apparat, kan dette være markeret med en farve inde i batteriskuffen.

Et blå mærke indikerer VENSTRE apparat.
Et rødt mærke indikerer HØJRE apparat.

Du kan også se den lille tekst på Corda² tyndslangen.
Blå tekst indikerer VENSTRE apparat.
Rød tekst indikerer HØJRE apparat.

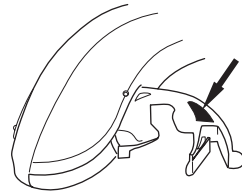

Således påsættes Corda² (tyndslange)


Sæt en Corda² tyndslange og tip på din Amigo Star for at sætte det på øret.

Din Amigo Star leveres med et Corda² startkit, der indeholder 4 slanger og 4 tipper.

Nye slanger og tipper kan bestilles hos Oticon.

Således sættes Corda² på Amigo Star



1. Vælg Corda² tyndslangen. Højre slanger har røde numre, og venstre har blå. De små slanger er mærket 0-0,9, store slanger er mærket 1-0,9)
2. Skub slangen ind i Amigo Star.
3. Vælg tippen. Tipper findes i 2 størrelser, small og medium. Skub tippen på slangen.
4. Amigo Star er nu klar til brug.

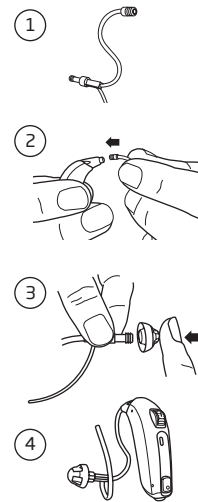

Således sættes Amigo Star på øret

Det kræver lidt øvelse at påsætte Amigo Star med en tyndslange korrekt:

1. Anbring Amigo Star bag øret.
2. Hold slangens bugtning mellem din tommel- og pegefinger. Tippen bør pege mod øregangens åbning. Tryk tippen forsigtigt ind i øregangen, indtil slangen ligger tæt mod dit hoved.
3. Anbring slangestyret i ørets concha ved hjælp af pegefingeren. Se i et spejl. Hvis lydslangen stikker ud fra øret, sidder tippen ikke korrekt i øregangen. Hvis slangestyret stikker synligt ud af øret, sidder det ikke korrekt. Fjern Amigo Star ved at trække i slangen, hvor den bøjer.

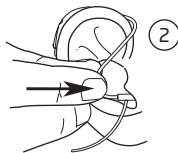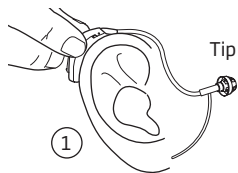


LED-indikator

Din Amigo Star har en LED-indikator.

LED-indikatoren bruges til at vise følgende:

Konstant eller langsomt blinkende lys	FM-signalet modtages fra senderen
3 hurtige blink	Amigo star er blevet synkroniseret med sendekanalen

Din hørekonsulent kan programmere LED-indikatoren til at være slukket, blinke eller være tændt, når det modtager et FM-signal.

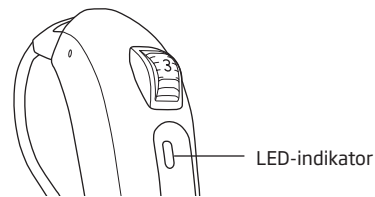


Kanalsøgningsknap

Din Amigo Star har en trykknop.

Trykknappen bruges til at finde den kanal, som FM-senderen er på.

Når knappen trykkes ned, begynder Amigo Star at søge efter kanaler. Du vil høre enkelte bip, indtil sendekanalene er fundet. Når kanalen er fundet, vil du høre to hurtige bip og derefter lyden fra FM-senderen.

Kanalsøgningsprocessen kan tage op til 20 sekunder.

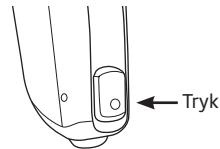

Trykknappen på din Amigo Star kan deaktiveres af hørekonsulenten.


Volumenkontrol

Din Amigo Star har en volumenkontrol.

Volumenkontrollen er nummereret 1 til 4.

Når volumen er i position 1, er Amigo Star slukket.

Når volumen er i position 4, er Amigo Star på højeste lydstyrke.

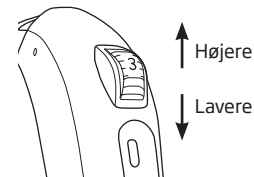


Din hørekonsulent kan slå volumenkontrollen fra. Selvom det er deaktiveret, fungerer det stadig som tænd/sluk-knap.

Mulighed for børnesikret batteriskuffe

En særlig batteriskuffe kan sættes på din Amigo Star, som beskytter mod utilsigtet adgang til batteriet.

Dette kan stærkt anbefales, hvis FM-apparatet skal bruges af babyer, små børn eller mentalt handicappede.

Batteriskuffen kan åbnes med en lille skruetrækker. Åbn batteriskuffen ved at sætte en skruetrækker ind i hulrummet i skuffens side og derefter vippe den op.

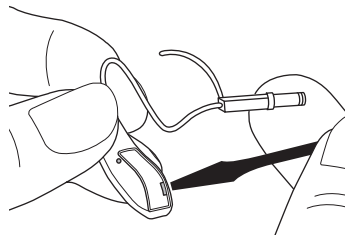

Således bruges din Amigo Star

Amigo Star kan ikke bruges alene. Det skal bruges sammen med en FM-sender.

Amigo Star er designet til at blive brugt sammen med Amigo T30/T31-senderen eller Amigo T5-senderen.



Amigo T30/T31



Amigo T5

Amigo Star kan bruges sammen med FM-sendere fra andre producenter.

Således bruges din Amigo Star

Bed læreren tage en FM-sender på og sikre sig, at mikrofonen er placeret tæt ved munden, og at senderen er tændt.

1. Således tændes Amigo Star.
2. Hvis LED-indikatoren ikke lyser, skal du trykke på knappen for at synkronisere Amigo Star med senderens kanal.
3. Sæt Amigo Star på øret.
4. Juster lydstyrken, så lærerens stemme høres på et behageligt niveau.

Således vedligeholdes din Amigo Star


Din øregang fremstiller ørevoks (cerumen), som kan tilstoppe lydudgangen på din Amigo Star. For at forhindre, at ophobning af ørevoks forårsager en ændring i ydeevnen, skal du være særlig opmærksom på Corda² tyndslange og tip, som kræver jævnlig rengøring og udskiftning.

Hold Amigo Star over en blød overflade, når det håndteres, så det ikke går i stykker, hvis du taber det.

Inden du går i seng, bør du åbne batteriskuffen, så luften kan cirkulere.

Rengøringsværktøjer

Der medfølger særlige rengøringsværktøjer til at rengøre Amigo Star. Disse bør anvendes for at sikre den bedste pleje og ydeevne.

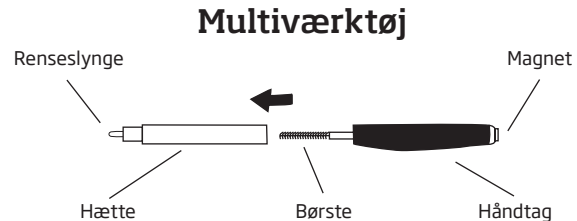


Multiværktøjet indeholder en særlig børste og en trådlykke til at fjerne ørevoks fra Amigo Star. Brug kluden til at rengøre apparatets overflade.

Amigo Star leveres også med et værktøj til rengøring af Corda² tyndslangen. Dette forklares på de følgende sider.

Således rengøres Corda² (tyndslange)

Sådan fjernes ørevoks (cerumen) fra tyndslangen:

- Træk slangen ud af Amigo Star (1)
- Skub rengøringsredskabet hele vejen gennem slangen (2+3)
- Fjern redskabet og skub slangen ind i apparatet igen (4)

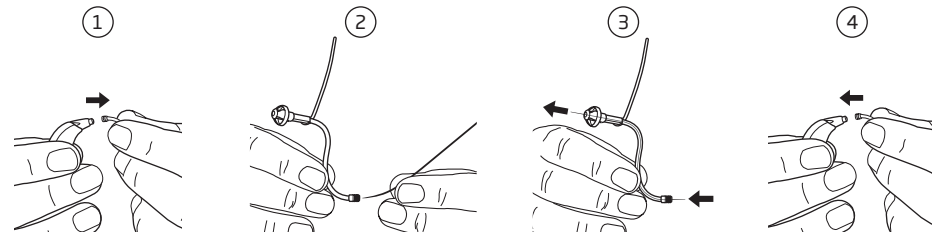


Daglig vedligeholdelse af Corda²-tipper

Tippen skal efterses, hver gang Amigo Star bruges. Lydudgangen skal være ren og fri for ørevoks. Hvis du ønsker en ren, frisk tip, skal du fjerne den eksisterende og påsætte en ny.

Vi anbefaler, at tippen udskiftes mindst en gang om måneden eller som anbefalet af din hørekonsulent.

Udskiftning af Corda²-tip

Tippen er nem at udskifte. Hold på den bredeste del af tippen og træk den af slangen (1). Sæt den nye spids på slangen (2) og sørg for, at den sidder ordentligt fast (3).

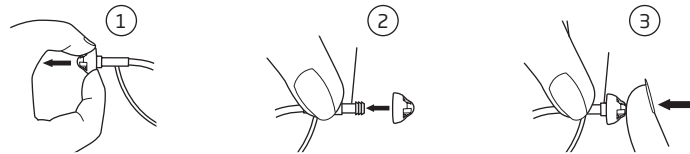

VIGTIGT

Tippen er lavet af et blødt materiale. Tippen vil ikke forårsage skade, hvis den falder ud i øregangen. Tag den forsigtigt ud, hvis du kan. Bed evt. en anden person om hjælp. Skub ikke tippen videre ind i øregangen. Skub ikke slangen tilbage i øret, før tippen er fjernet fra øret. Spørg din hørekonsulent, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis tippen falder af.

Håndtering af Corda²

VIGTIGT

- Brug kun dele, der er designet til din Amigo Star
- Rengøringsværktøjerne bør kun anvendes til rengøring af slangen, når den er taget af apparatet og ikke sidder på øret
- Tippen skal sidde ordentligt fast på tyndslangen, inden den sættes ind i øret. Undladelse af at følge anvisningerne kan medføre personskaade
- Tyndslangen må aldrig anvendes uden en tip
- Brug ikke Amigo Star, hvis du har meget ørevoks eller en øreinfektion
- Korrekt pleje og vedligeholdelse vil have stor indflydelse på pålidelighed og sikker ydelse
- Rengør din tyndslange jævnligt
- Lad ikke andre bruge din Amigo Star eller dele hertil
- Sørg for, at dine hænder er rene, når du rører ved Amigo Star og dele hertil

Dvale- og slukindstillinger

Din Amigo Star er udstyret med en intelligent dvale- og slukindstilling, der forlænger batteriets levetid.

Dvaleindstilling

Hvis Amigo Star ikke registrerer et FM-signal i mere end 60 sekunder, vil den gå i en dvaletilstand, der kun bruger lidt strøm.

Hver 6-7 sekunder vil Amigo Star "vågne" og søge efter et FM-signal. Denne proces gentages, indtil et FM-signal er fundet.

LED er slukket under dvaletilstand.

Slukket tilstand

Efter 90 minutters dvaletilstand falder batteriforbruget til et endnu lavere niveau. Genstart Amigo Star ved at trykke på knappen eller åbne og lukke batteriskuffen.

Amigo Star og vandafvisning

Selvom dine nye FM-apparater har opnået en IP57*-klassifikation, benævnes de vandafvisende, ikke vandtætte.

Skulle dit FM-apparat komme i kontakt med vand og holde op med at virke, skal du følge disse anvisninger:

- Tør forsigtigt vand på apparatet af
- Åbn batteriskuffen og tag batteriet ud
- Aftør forsigtigt batteriskuffen
- Lad apparatet tørre med batteriskuffen åben i ca. 30 minutter
- Isæt et nyt batteri - herefter burde dit apparat fungere normalt igen

Generelle instruktioner vedrørende vandafvisning

- Tag apparatet af, inden du går i bad
- Tag apparatet af, mens du svømmer, snorkler eller dykker, da det er ikke designet til den slags aktiviteter
- Nedsænk ikke apparatet i vand eller andre væsker

** IP Code klassificerer og vurderer graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande, støv, utilsigtet kontakt og vand i mekaniske hylstre og med elektriske tilslutninger.*

VIGTIGT

Batteriskuffen skal åbnes helt for at lade luften cirkulere, når du ikke bruger Amigo Star, specielt om natten.

Undgå varme, fugt og kemikalier

Udsæt aldrig din Amigo Star for ekstrem varme ved fx at efterlade det i en bil parkeret i solen. Selvom din Amigo Star er vandafvisende, må det aldrig udsættes for fugt, såsom dampbade, brusebade, voldsomt regnvejr eller nedsænkes i vand. Det kan heller ikke tørres i mikroovn eller konventionel ovn.

Batteriet skal aftørres, hvis det er fugtigt, da dette ellers kan påvirke dets ydeevne. Disse problemer kan undgås ved at bruge et tørresæt, som endda kan forlænge din Amigo Stars levetid. Kontakt din hørekonsulent, hvis du har brug for yderligere information.

Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dine apparater. Du bør altid tage dit apparat af, inden du bruger denne slags produkter og lade dem tørre, inden du tager Amigo Star på.

Tør hænderne godt efter brug af creme, før du tager din Amigo Star på.

Almindelige problemer og deres løsninger		
Symptom	Mulige årsager	Løsninger
Ingen lyd	Fladt batteri i Amigo Star	Udskift batteriet side
	Amigo Star er ikke indstillet på den rigtige kanal	Tryk på kanalsøgningsknappen og vent på, at LED-indikatoren tænder side 24
	Amigo Star er slukket	Luk batteriskuffen og sæt volumenkontrollen over 1 side 18
	Afladt batteri i senderen	Oplad batteri
	Blokeret lydudgang i Corda ² tyndslange eller tip	Rengør/udskift slange eller tip side 31

Hvis ingen af løsningerne ovenfor løser problemet, kan du bede din hørekonsulent om hjælp.

Almindelige problemer og deres løsninger		
Symptom	Mulige årsager	Løsninger
Intermittent eller reduceret lyd	Blokeret lydudgang i Corda ² tyndslange	Rengør/udskift slange eller tip side 31
	Fugt i Corda ² tyndslange	Rengør eller tør slange side 31
	Afladt batteri i senderen	Oplad batteri
	Mikrofonen på senderen er ikke tæt nok på lærerens mund	Sikr dig, at knaphulsmikrofon er 10-15 cm fra munden eller boom-mikrofon er 1-5 cm fra munden.
	Lydstyrken er sat til lav	Indstil volumenkontrollen på et kraftigere niveau side 25
Statisk lyd	FM-kanal er udsat for interferens	Skift kanal på FM-senderen, synkroniser derefter med Amigo Star, eller tryk på kanalsøgningsknappen side 24

Hvis ingen af løsningerne ovenfor løser problemet, kan du bede din hørekonsulent om hjælp.

International garanti

Din Amigo Star har en begrænset produktgaranti omfattende produktionsfejl i 12 måneder fra leveringsdatoen. Denne begrænsede garanti dækker fabrikations- og materialefejl i selve apparatet, men ikke tilbehør som batterier, slanger og tipper osv.

Garantien dækker IKKE skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, eller fremmede objekter inde i enheden.

Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørekonsulent for yderligere information.

Service

Tag kontakt til din hørekonsulent, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer af Amigo Star.

Oticons servicecenter:
Oticon A/S
Tilstedvej 73 • 7700 Thisted
Telefon: 39 17 71 00 eller 39 13 89 15

Garantibevis

Brugerens navn:

Hørekonsulent:

Adresse:

Tlf. nr.:

Købsdato:

Garantiperiode:

Måned:

Model venstre:

Serienr.:

Model højre:

Serienr.:

Batteristørrelse: 312

Teknisk information

FM-apparatet indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer med 3,714 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er $< -40 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er apparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra fx halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Apparatet opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

Din Amigo Star indeholder et modul med mærkningen:

FCC ID: U28FU2ALD01

IC: 1350B-FU2ALD01

Apparatet opfylder reglerne i afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af apparatet er underlagt følgende tre betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Apparatet skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Oticon, kan annullere apparatets garanti.
3. Apparatet må ikke forstyrre tv-modtagelse eller føderal regeringsradar.

Oticon erklærer hermed, at dette FM-apparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Overensstemmelseserklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
www.oticon.dk

CE 0543 0682

IP57



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



NI 175

Oversigt over din Amigo Stars indstillinger

Amigo Star indstillinger		
Volumenkontrol	<input type="checkbox"/> Aktiveret	<input type="checkbox"/> Deaktiveret
Kanalsøgnings-knap	<input type="checkbox"/> Aktiveret	<input type="checkbox"/> Deaktiveret
LED-indikator	<input type="checkbox"/> Aktiveret	<input type="checkbox"/> Deaktiveret
Bip-toner	<input type="checkbox"/> Aktiveret	<input type="checkbox"/> Deaktiveret

127010DK / 12.12

127010DK / 12.12

People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt

child
friendly
hearing
care

Det kræver en målrettet indsats at hjælpe børn med nedsat hørelse eller andre høreproblemer til at nå deres fulde potentiale. Det er derfor, vi leverer de løsninger og serviceydelser, som fagfolk og pårørende har brug for til at give børnene de muligheder, de fortjener. Det er, hvad børnevenlige løsninger handler om.



oticon
PAEDIATRICS