

Prevalon Hælaflastningsstøvle

Minimerer tryk, friktion og shear på fod, ankel og hæl.

- Aflaster hælen og modvirker tryksår på hæl og malleol
- Nem at pålægge og bliver på foden
- Reducerer risikoen for dropfod og udad rotation



Kan bruges med DVT-kompressionsudstyr.

De indbyggede puder i støvlen yder en maksimal støtte til foden.

Mærket viser visuelt hvordan man korrekt anvender/påsætter støvlen.

Prevalon Hælaflastningsstøvle lægges nemt på foden, og en sikker pasform opnås på få sekunder med de justerbare stretch-stropper.

Reducerer rotation af foden. Det bløde Dermasuede inderfoer minimerer friktion og shear, samtidig med at foden holdes i en korrekt position.

Stretch-stroppen under foden hjælper med at reducere risikoen for plantar fleksion, og giver en maksimal støtte under foden.


Støvlebundens ponton-design, hjælper med at holde foden i oprejst stilling.

Yderstoffet er lavet af stærkt ripstop nylon, det samme materiale som bruges til faldskærme. Stoffet har en meget lav friktion, og glider derfor let hen over lagenunderlag, hvorved bevægelsesfriheden bevares. Det glatte yderstof afviser væsker og gør derfor Prevalon let at tørre af.



Sådan anvendes Prevalon Hælaflastningsstøvler

Hælaflastningsstøve

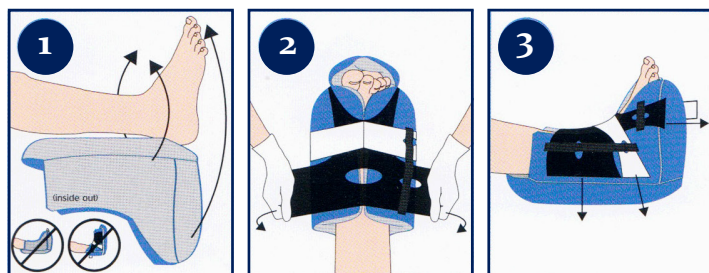

Stabilisator kile



Sådan virker Prevalon Hælaflastningsstøve

Den åbne hæludformning aflaster hælen mod tryk, og giver muligheden for en nem overvågning af hælen. Den indbyggede polstring giver et optimalt underlag, og det bløde inderstof minimerer friktion og shear, holder foden i den rette position og forhindrer rotation. Den justerbare stretch-strop giver en maksimal støtte under foden, og hjælper med til at reducere risikoen for plantar flexion. Prevalon Hælaflastningsstøve lægges nemt på foden, og en sikker pasform opnås på få sekunder med de justerbare stretch-stropper. Yderstoffet har en meget lav friktion og glider derfor let hen over lagenunderlag, hvorved bevægelsesfriheden bevares. Sved transporteres væk fra huden v.h.a. det unikke Dermasuede inderfoer.

Fordele ved anvendelse af Prevalon Hælaflastningsstøve

- Hælen svæver frit fra underlaget
- Vægten fordeles
- Stretch-stropper som modvirker yderligere traumer
- Åndbart Dermasuede stof sørger for at fod og ben holdes på plads
- Maksimal støtte af fod og ben
- Fodens bevægelsesfrihed bevares
- Passer til begge fødder
- Kan bruges med DVT- kompressionsudstyr
- Reducerer risikoen for beskadigelse af peronealnerven
- Reducerer risikoen for kontrakturer, nervebeskadigelse og hælsår
- Kan bruges sammen med vekselryksmadrasser

Anvendelsesområder

Anlægges forebyggende på alle risikopatienter samt i forbindelse med behandling af alle fire stadier af hæltryksår.

Sortiment

Produktkode	Størrelse	Antal stk./ks
100313	Small	1
100272	Medium	1
100735	Large med indbygget kile	1
100621	Small	8
100200	Medium	8
100705	Large med indbygget kile	8
100310	Løs stabiliseringskile	1