



K.C. Pedersen
Stenalderen 38
2640 Hedehusene
Tilf. 46562968 – fax. 46562966
www.kcpedersen.dk
e-mail: info@kcpedersen.dk

Brugsanvisning på baraHEALTH baraSNAKE



baraSNAKE leveres liggende fladt.
Ved anvendelse som halskrave kan baraSNAKE snos om halsen,
og snos så baraSNAKE lægger sig ovenpå det lag som er under.



Start med den tykke ende – læg den foran på halsen
lidt til den ene side. Det er ligegyldigt om du snor
den ene eller den anden vej rundt.



Læg næste lag oven på laget under. Læg laget så det
følger halsens form og der stadig er en god fornemmelse
for at kunne få luft og god støtte.



Når du ikke kan lægge flere lag, og du evt. er nået til
enden af baraSNAKE – skal du gerne føle en god
støtte og ikke føle du stranguleres. Den løse ende
lægges ind imellem huden og øverste lag.

Der må IKKE strammes til, og man skal hele tiden
føle at man ikke hæmmes i vejrtrækning eller
hovedet kommer i en uheldig stilling.



K.C. Pedersen
Stenalderen 38
2640 Hedehusene
Tilf. 46562968 – fax. 46562966
www.kcpedersen.dk
e-mail: info@kcpedersen.dk



Her ser du desuden forskellige forslag til en dekorativ anvendelse af baraSNAKE – til de dage hvor du måske har brug for støtten ”on/off”.

baraSNAKE anbefales IKKE til personer som ikke selv kan anlægge baraSNAKE.

Vi anbefaler ikke at anvende baraSNAKE til børn.

Kontakt os ved spørgsmål om anvendelse af baraSNAKE.

K.C. Pedersen fralægger sig ethvert ansvar for misbrug af baraSNAKE.