


Brugervejledning

Handi 5

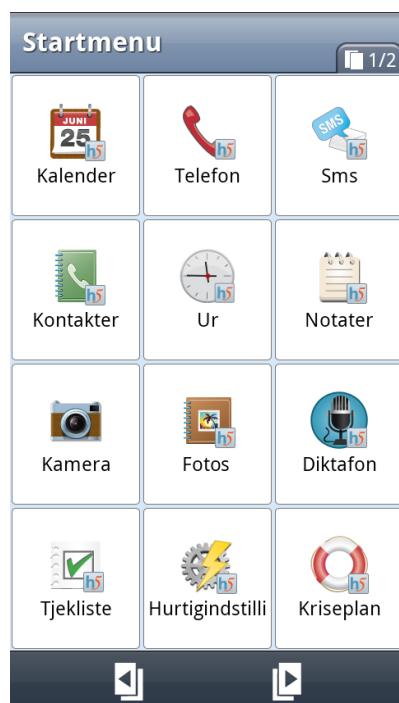

Software version 5.3.1 eller nyere



Indhold

1. Indledning	5
2. Generelle principper.....	6
2.1 Handi-skallen.....	6
2.2 Handi-principper	7
2.3 Android-begreber.....	8
3. Apps i Handi 5	9
3.1 Kortfattet beskrivelse af Handi-apps'ene	9
3.2 Download apps	13
3.3 Fjern apps.....	13
4. Startmenuen	14
4.1 Startmenu med Handi-layout.....	14
4.2 Startmenu med Standard-layout.....	14
4.3 Tilpas Startmenuen	15
5. Hurtigindstillinger	19
6. Indstillinger.....	20
7. Systemindstillinger.....	21
7.1 Kodebeskyt indstillinger.....	21
7.2 Tema	22
7.3 Talesyntese	22
7.4 Lister.....	24
7.5 Batteri	25
7.6 Importer Handi4-data.....	26
7.7 Backup.....	27
7.8 Genindstilling	27
7.9 Om Handi	28
7.10 Log	29
7.11 Automatisk crash-rapportering.....	29
8. Billedarkiv	30
8.1 Redigere billedarkivet via HandiTools	30
8.2 Redigere billedarkivet i Handi	31
9. Tastaturet.....	33
9.1 Tilpasse tastaturet	35
10. Handi Web	36
11. Opdater Handi	37
11.1 Bekræft og installer.....	37
12. Grundindstillinger	38

1. Indledning

Handi 5 er tilpasset software for personer med kognitive funktionsnedsættelser, og kan installeres på Android-baserede smartphones.

Med Handi 5 får man adgang til alle de applikationer, der tilbydes på markedet, f.eks. e-mail, sociale medier, rejseplanlægning, kort, tv-guide m.m., men samtidigt også den tilpassede støtte fra Handifunktionerne.

Ved hjælp af indstillingerne kan man "afskærme" sin Handi 5, dvs. sætte nogle begrænsninger på, hvordan startmenuen skal se ud. Man kan også beslutte, om brugeren selv skal have adgang til at downloade nye applikationer.

Grundtanken med Handi 5 er at begrænse brugen af den på en kontrolleret måde. På den måde kan man give en struktureret oplæring af dens brug og stille og roligt en tilpasset og effektiv funktionalitet.

I Handi 5 indgår flere af de Handifunktioner, der er udviklet gennem mange år og gennem praktisk erfaring i et tæt samarbejde med brugere. Handifunktionerne er Afspiller, Album, Diktafon, Hurtigindstillinger, Kalender, Kontakter, Kriseplan, Min Status, Notater, Prisberegnener, Sms, Statusvar, Telefon og Tjekliste.

Dette dokument indeholder en beskrivelse af principper, funktioner og indstillinger i Handi 5. Hver Handifunktion har sin egen brugsanvisning, der findes som pdf-dokumenter på den USB-nøgle med HandiTools, der følger med Handi 5.

Dette dokument beskriver kun den rene Handifunktionalitet og fortæller ikke noget om den generelle Android-funktionalitet eller om de apps og indstillinger, der findes i den specifikke Android-telefon. Dette beskrives i stedet i *Håndbogen*.

For at overføre billeder etc. fra en pc til Handi anvendes pc-programmet HandiTools. Via HandiTools kan man også oprette og håndtere formularer. Andre vigtige funktioner i HandiTools er, at man kan sikkerhedskopiere indholdet i Handi samt få logfiler, der kan bruges i forbindelse med fejlsøgning.

2. Generelle principper

2.1 Handi-skallen

Grundtanken med Handi 5 er, at man skal have en "Handi-skal", som begrænser antallet af funktioner, der skal være tilgængelige for brugeren.

Skallen er i praksis Startmenuen, som dels bestemmer hvilke apps, der skal vises, og dels er den eneste vej til siderne med indstillinger.

Handi-skallen gør det muligt at styre og begrænse brugen på en pædagogisk måde, sådan at brugeren får så meget som muligt ud af sin Handi. Skallen gør det også muligt at forhindre *fejlanvendelse*, f.eks. at downloade urimeligt mange apps, og at øge *sikkerheden*, idet risikoen for virus m.m. dermed mindskes betragteligt.

Handi-skallen kan symboliseres med billede til højre.

Handi 5 kan ses som en "boble" i operativ-systemet Android, en boble med en kontrolleret låge, igennem hvilken man kan hente hvad som helst fra Android-verdenen.

Man kan forsyne denne låge med en kodelås.

Det er ikke muligt med kodelåsen at give en helt sikker lukning, det bygger på en tillid mellem støtteperson/ordinerende læge og bruger.



Tanken er, at en bruger får hjælp med at opbygge og strukturere sin anvendelse i begyndelsen. Målet er oftest, at brugeren herefter selv skal kunne håndtere størstedelen af indstillinger og funktioner.

Man kan i stor udstrækning styre den grad af kompleksitet, som brugeren kan få adgang til.

2.2 Handi-principper

Den mest grundlæggende forskel på **Handi-apps** og ”almindelige” apps er, at **Handi-apps'ene** har betydeligt mindre information og færre valgmuligheder pr. billede. Dette nedsætter kravet om kognitiv formåen ved brug. Brugen af symboler og talestøtte gør det også enklere at modtage information.

Der er tydelig besked i forbindelse med alarm, sms/mms og mistede samtaler.

Man skifter mellem *brugerfunktion* og *indstillingsfunktion* ved at trykke Knapkombinationen, se *Håndbogen*. Det er også muligt at oprette en ikon for dette på Startmenuen. I indstillingsfunktionen indstiller man hvilke apps, der skal være tilgængelige i brugerfunktionen, og hvordan Handi-apps'ene skal fungere.

Hver Handi-app har en lille fælles markering med ikonet: .

I øvrigt bygger funktionaliteten i **Handi 5** på en række grundlæggende principper:

- Valget foretages i to trin. Først peger du på en linje/et ikon, som da markeres. Nu kan du få det valgte læst op med talesyntese, hvis det er valgt i indstillingerne. Derefter bekræfter du dit valg ved at trykke på *Næste*  eller *OK* afhængigt af, hvor i en sekvens du befinner dig. Du kan også bekræfte dit valg ved at trykke yderligere en gang på den markerede linje. Det bliver som en slags ”dobbeltklik”. (Denne mulighed for »dobbeltklik« findes gennemgående i programmet, men vejledningen vil fremover kun beskrive den førstnævnte metode.)
- Talestøtten kommer ikke automatisk, kun når du aktiverer den.
- Når du foretager handlinger, der omfatter en sekvens af sider, fx indsætter en aktivitet i kalenderen, betyder *Næste*  ”fortsæt i sekvensen” og *Tilbage*  betyder ”gå et skridt tilbage i sekvensen”. Når du kommer til den sidste side i en sekvens, bekræfter du ved at trykke på *OK*. Hvis man holder funktionsknappen *Tilbage* inde, kan man afbryde sekvensen og komme tilbage til udgangsfunktionen.
- Kun relevante knapper vil blive vist. Det betyder, at alle knapper, der vises, har en funktion. Nogle gange er du nødt til at markere en linje/et ikon for at en knap skal vises. Se eksemplet nedenfor:



I billedet til venstre er der ikke markeret et ikon og derfor vises ingen knapper i bunden.

I billedet til højre er skemaet ”Min vægt” markeret og derfor vises de aktuelle knapper for *Oplæsning* og *Næste*, som nu er blevet relevante.

2.3 Android-begreber

Nedenfor beskrives nogle begreber i Android, som det er godt at kende.

Begreb	Forklaring
Startskærm, Home Screen Launcher	Det samme som Startmenu. Handi 5 har sin egen Startmenu med to forskellige layouts.
Applikation, forkortet "app"	Et program, som man kan starte fra Startmenuen. I dette dokument nævnes Handi-apps, standardapps og tredjeparts-apps. Se kapitel 3. <i>Apps i Handi 5</i> .
Play Butik, tidl. Android Market	En app til download af apps, f.eks. spil, rejseplanlægning og lydbogslæser.
Hjem-knap	En funktionsknap, se <i>Håndbog</i> , som altid fører til Startmenuen.
Tilbage-knap	En funktionsknap, se <i>Håndbog</i> , som altid fører til forrige billede.
Scrolle	En måde hvorpå man kan navigere i forskellige lister ved at holde fingeren på skærmen og herefter trække opad/nedad eller højre/venstre. Erstatter ofte knapperne Næste/Forrige.
Zoom	Hvor billederne vises i fuld skærm kan du zoome, forstørre billedet, ved at placere to fingre på skærmen og trække dem fra hinanden.
Statusfelt	Et felt øverst på skærmen, som viser klokken, batteriniveau, status for modtagelse og information om indkomne meddelelser m.m. (Denne liste vises ikke i Handi-apps'ene).
WiFi	Teknik til trådløst netværk. Gør det muligt at tilslutte trådløst til internettet via f.eks. en router. Gratis WiFi kan forekomme i offentlige miljøer.
Mobildata	Den datatrafik, der sendes til/fra en mobil enhed (gælder ikke samtale/sms).

3. Apps i Handi 5

Apps, forkortelse af "applikationer", er de programmer, der er installeret i telefonen. Man kan skelne mellem følgende apps i Handi 5:

- **Handi-apps.** De apps, der er udviklet specielt til Handi 5: Kalender, Min Status, Kontakter, Kriseplan, Hurtigindstillinger etc.. De har alle den samme lille markering nederst til højre på ikonet: 
- **Standard-apps.** De apps, der indgår i Android og adskiller sig lidt mellem forskellige telefonmodeller. F.eks. Opkald, sms, Lommeregner, Maps og E-mail.
- **Tredjeparts-apps.** Apps, der er downloadet via *Play Butik*. F.eks rejseplanlægning, lydbogslæser, nyheder, Spotify og Facebook.

I dette kapitel gives en oversigt over samtlige Handi-apps. For en mere detaljeret beskrivelse, se brugsanvisning for de forskellige Handi-apps.

Der er en oversigt over standard-apps'ene i *Håndbog*.

Der er en generel beskrivelse af download af apps sidst i dette kapitel.

3.1 Kortfattet beskrivelse af Handi-apps'ene

3.1.1 Afspiller

I *Afspiller* kan du lytte til musik, lydbøger og film.

Mediafilerne kan kun sorteres "fysisk" i mapper, men ikke på nogen anden måde (fx efter albumtitel, komponist etc).

Afspiller har automatiske spillelister. Alle musiknumre, som ligger i samme mappe, indgår i en spilleliste. Musiknumrene i mappen bliver automatisk afspillet i den rækkefølge, de ligger i mappen.

Det er muligt at gemme et "bogmærke". På den måde kan du nemt finde tilbage til dét sted, hvor du sluttede i fx en lydbog.

Mediafilerne lægges ind via pc-programmet *HandiTools*. Her kan du strukturere filerne i mapper og vælge billeder til numrene/mapperne.

3.1.2 Album

Med funktionen *Album* kan du lave diashow med billeder og indspillet lyd. Det kan være sociale diashow af typen "Min familie" eller diashow, der fortæller en historie, fx. "Ferie 2010". Funktionen *Album* kan også anvendes til mere praktisk betonede diashow som opskrifter og arbejdsinstruktioner.

Et diashow i *Album* oprettes direkte i Handi eller via pc-programmet *HandiTools*.

3.1.3 Diktafon

Med *Diktafon* indtaler du information. Det er enkelt at gemme og åbne *Diktafon*-notater.

Du skal ikke kunne skrive for at benytte *Diktafon*, men funktionen kan også anvendes som en meget enkel og hurtig måde at lægge informationer ind på, selv om du kan skrive.

3.1.4 Hurtigindstillinger

I Hurtigindstillinger kommer man til de mest grundlæggende indstillinger som volume, flytilstand og.lign. på en letforståelig måde. Man kan slukke for lyden og indstille det tidspunkt, hvor den skal sættes til igen. Se også kapitel 5. *Hurtigindstillinger*.

3.1.5 Kalender

Kalender er en elektronisk kalender som viser planlagte aktiviteter med alarm ved aktivitetens start- og sluttidspunkt. Aktiviteterne symboliseres med tekst og/eller billeder. Start og sluttidspunkt for en aktivitet vises med kvarturs-princippet. Talestøtte kan ges i alle situationer ved hjælp af talesyntese.

Kalender giver brugeren et betydningsfuldt værktøj til at planlægge og strukturere sin dag.

Kalenderen kan tilpasses fra at fungere som et enkelt tidshjælpemiddel (som Kvarturet) til en nærmest komplet elektronisk kalender (som Microsoft Outlook). Forskellen fra en almindelig kalender er, at brugerfladen er tydeligere med betydeligt færre informationer og valgmuligheder pr. side, hvilket derfor kræver mindre af brugerens kognitive evner.

Kalenderen giver også mulighed for at tilknytte information til en aktivitet. Det kan være information, som understøtter aktiviteten (fx en indkøbsliste), eller det kan være et hukommelses-notat (fx om filmen, du, så var god). Du kan også knytte andre apps til aktiviteten og dermed fx kunne foretage et telefonopkald direkte eller tilknytte et skema i Kalenderen.

3.1.6 Kontakter

I funktionen *Kontakter* kan du gemme information om forskellige personer. Informationen gemmes som en "kontakt" og kan indeholde navn, billede, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse og ekstra information. Via kontaktbilledet kan man ringe op og sende sms/e-mail direkte til kontaktpersonen.

Kontaktlisten kan vises på to måder. Enten sorteret efter bogstav eller sorteret i mapper (fx "Familien" og "Venner") Hvilket gør det mere overskueligt at finde rundt i, hvis man har mange kontakter.

Der findes desuden en søgefunktion, der gør det hurtigt og nemt at finde den ønskede kontakt.

Via pc-programmet HandiTools kan du overføre billeder til Handi som kan anvendes i *Kontakter*. Man kan også tage billedet direkte med det indbyggede kamera.

3.1.7 Kriseplan

Kriseplan er en tryghedsfunktion for brugere, der risikerer at blive akut syge eller havne i en alvorlig krisesituation.

Kriseplanen er en side med en handleplan ved akut krise. Informationen vises som tekst, der kan læses op med talesyntese.

Hvis funktionerne *Telefon* og *Sms* anvendes kan du i *Kriseplan* oprette en knap som direkte ringer up til 1-3 foruddefinerede telefonnumre samt en knap som gør det muligt at sende en færdigskrevet sms-tekst til 1-3 mobilnumre.

Det er muligt at oprette en knap som direkte ringer up til 1-3 foruddefinerede telefonnumre samt en knap som gør det muligt at sende en færdigskrevet sms-tekst til 1-3 mobilnumre.

3.1.8 Min Status og Statussvar

Med funktionen *Min Status* kan du oprette forskellige typer af individuelle skemaer med mange anvendelsesmuligheder, fx:

- Selvvurderende spørgsmål om fx symptomer (selv-diagnosticerende). Afhængig af hvordan du besvarer spørgsmålene, vises forskellige handlingsplaner. Skemaet udgør dermed et tilpasset beslutningsstøtte, men fungerer også som en selvhjælp i krisesituationer.
- Skema med tydelige og konkrete KBT-strategier til opnåelse af personlige mål fx spørgsmål om kost, motion, skolearbejde. (Kognitiv adfærdsterapi (KBT), med spørgsmål om fx motion og kost.)
- Spørgsmål til at indsamle data om fx søvnkvalitet, bivirkninger, blodsukkerværdi osv.

Med funktionen *Statussvar* kan du efterfølgende selv kigge på de svar, som er skrevet ind i skemaet. Du kan både se svarene enkeltvis eller sammenkørsler i form af diagram, point og ”karakter”. Via pc-programmet HandiTools kan du få yderligere statistik samt udskrive svarene og fx vise det til lægen eller anden terapeut.

Når Handi er tilsluttet en pc med HandiTools, kan du oprette og håndtere skemaer direkte i HandiTools. Du kan arbejde med skemaer på alle pc'er med HandiTools. Ingen oplysninger bliver automatisk gemt på pc'en, når du er tilsluttet, med mindre du selv aktivt vælger at gemme oplysningerne på pc'en.

3.1.9 Notater

Med *Notater* kan du skrive informationer med det indbyggede tastatur (på skærmen). Det er enkelt at gemme og åbne notater.

Informationen kan læses op med talesyntese.

Med pc-programmet HandiTools kan du skrive, redigere og printe notater i pc'en.

3.1.10 Prisberegneren

Funktionen *Prisberegneren* er beregnet til at give støtte, når du handler. Brugeren skal selvstændigt kunne vælge varer og kontrollere, om han har tilstrækkeligt med penge, samt kunne kontrollere, hvor meget han bør få tilbage.

Prisberegneren indeholder også en valgfri støttefunktion, som hjælper brugeren med at vælge passende sedler og mønter (valører) ved at vise grøn baggrund ved valøren.

Pris-beregneren forudsætter, at brugeren selv kan aflæse og indskrive prisen på de forskellige varer.

3.1.11 Sms

Med funktionen *Sms* kan du skrive og tage imod sms-beskeder. Den store fordel, sammenlignet med en sædvanlig mobiltelefon er, at kan du få teksten læst op, både når du skriver egen tekst og når du læser modtagne beskeder. Desuden kan du få hjælp når du skriver ved at anvende forskrevne *standardbeskeder*.

Det er muligt at lave indstillinger for *Symbol-sms*. Du kan vælge om du vil skrive og/eller læse sms med billeder. Du kan altså skrive sms med billeder, men modtage sms med tekst og herefter få dem læst op med talesyntese.

3.1.12 Telefon

Funktionen *Telefon* er en forenklet telefon-app. Via *Telefon* kan du ringe og tage imod samtaler. Fra den enkle telefonmenu kan du blandt andet se ubesvarede opkald og saldo for taletidskort. Du kan også se hvem det er der ringer og hvem du ringer til.

For samtale bruges Androids indbyggede telefon.

3.1.13 Tjekliste

Med *Tjekliste* kan du lave afkrydsningslister fx indkøbslister eller "to-do"-lister.

Tjeklisterne kan være tekstbaserede, billedbaserede eller en blanding af tekst og billede.

Tjeklisterne anvendes enkeltvis, men også knyttes til en aktivitet i Kalenderen. Du kan lave enkeltstående aktiviteter og tilbagevendende aktiviteter med *Tjekliste*.

Der findes to måder at oprette Tjeklister: En "hurtig" for personer, der skriver uhindret og en hvor du trin for trin opretter en Tjeklist med billede og tekst.

3.2 Download apps

Hvis man vil have adgang til andre apps end Handi-apps og standard-apps, skal man downloade dem via *Play Butik*. Det kan være apps som Spotify, Facebook, rejseplanlægning, lydbogslæser, osv.

For at komme til Play Butik trykker man knapkombinationen, se *Håndbogen* og vælger *Play Butik* i indstillingsmenuen.

For at man kan downloade, er det nødvendigt, at man har en Gmail-konto koblet til telefonen, se *Håndbogen*.

Der er meget, man skal overveje, før man downloader en app, bl.a.:

Hvordan finder jeg den rigtige app i Play Butik?

Brug passende søgeord. Hvis man ønsker bedre overblik, når man leder efter en app, kan man via en PC surfe på <https://play.google.com/store>.

Koster app'en noget?

Selv om der står, at den er gratis, kan der af og til støde udgifter til, såkaldte "in app purchases", hvor man tilbydes at betale for forskellige opgraderinger inde i app'en.

Er app'en god og sikker?

Læs anmeldelserne af app'en. Apps fra store virksomheder er oftest sikre.

Disse aspekter vil ikke blive taget op i denne brugsanvisning.

3.3 Fjern apps

Man skal tænke på ikke at have installeret for mange apps. Hvis man har downloadet flere apps, for at prøve hvilken, der passer bedst, er det godt at fjerne de apps, som man ikke kommer til at bruge. Man har måske downloadet og prøvet forskellige vejrapps eller lydbogslæsere og fundet en, som man er tilfreds med. Så er det godt at fjerne de andre. Se *Håndbogen* for instruktioner.

I indstillingerne til Startmenuen vælger man hvilke apps, der skal vises i Startmenuen og i hvilken rækkefølge. Der kan man også bestemme, at en app ikke vises i Startmenuen, hvilket kan være godt, hvis man vil indføre en app senere. Se 4.3.2 *Organisere apps*.

4. Startmenuen

Startmenuen er en enkel og tydelig hovedmenu, som alle apps starter fra: "Handi-skallen".

Det er muligt at indlægge genveje til funktioner i Handi-apps'ene, f.eks. Kalenderens "Ugevisning" eller Kontakters "Søg kontakt". Man kan også have en genvej direkte til f.eks. en kontakt eller et skema.

Når man får en sms/mms eller har mistede samtaler, viser Startmenuen tydelige meddelelser.

Startmenuen kan have forskellige layouts; *Standard*, *Handi Rudenet* eller *Handi Rækker*. Startmenu med Handi-layout er enklere og renere med mindre information og med mulighed for talestøtte. Startmenuen kan vises med rækker eller som rudenet. Startmenu med standard-layout ser ud som en almindelig startskærm i Android og viser ud over tilgængelige apps også statusfeltet.

De forskellige layouts, samt hvordan man tilpasser Startmenuen, beskrives herunder.

4.1 Startmenu med Handi-layout



I Startmenuen vises ikoner for apps og genveje. Når man markerer et ikon og trykker på *Næste* ➤ starter den valgte app. (*Næste* vises først, når et ikon er markeret.) Man kan også dobbeltklikke for at starte app'en.

Man kan have flere sider med apps. I rubrikken **1/2** vises, hvor mange sider, der er, og hvilken side der vises nu. Man skal trykke på *Bladre*-knapperne ⌂ ⌂ for at skifte side.

Handi-layout kan vises i rudenet eller rækker. Valget foretages, når man vælger layout, se 4.3.1 *VælgStartmenu*.

Hvis der er indkomne sms/mms eller mistede telefonsamtaler, vises det med et symbol ! på ikonet for Handi-apps Sms og Telefon.

Ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen ☎ læses det op, som man har markeret (forudsat at der er valgt talestøtte i menuer).

4.2 Startmenu med Standard-layout



I Startmenuen vises ikoner for apps og genveje. Når man trykker på et ikon, starter den valgte app.

Man kan have flere sider med apps. Symbolet med hvide prikker ● ● viser hvor mange sider, der er, og hvilken side der vises nu. For at skifte side skal man anbringe fingeren på skærmen og trække til siden.

Den første side har et stort ur med dato. Øverst vises Androids statusfelt.

Nederst er en favoritliste, hvor man kan lægge 1-3 apps, som man altid ønsker at have let adgang til uanset hvilken side, der vises.

Det er muligt at skifte baggrundsbilledet, se 4.3.3 *Vælg baggrundsbilledet*.

Der gives ingen talestøtte i dette layout.

4.3 Tilpas Startmenuen

For at tilpasse Startmenuen skal du gå ind i *Indstillinger*. For at komme til *Indstillinger* trykker du knapkombinationen (eller vælger ikonen *Handi Indstillinger* på Startmenuen), se *Håndbogen*.



For at komme til Startmenu-indstillinger vælger du funktionen øverst på første side. Redigeringsiden til højre vises.

Hvordan du tilpasser Startmenuen, beskrives nedenfor.



4.3.1 Vælg Startmenu



Via **Indstillinger|Startmenu|Vælg startmenu** vælger du hvilken layout startmenuen skal have.

- Standard
- Handi Rudenet
- Handi Rækker

De tre varianter beskrives i *4.2 Startmenu med Standard-layout* og *4.1 Startmenu med Handi-layout*.

4.3.2 Organisere apps

Via **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps** vælger man hvilke ikoner, der skal vises i Startmenuen, og i hvilken rækkefølge, de skal vises.

På billedet vises ikonerne og en knaprække foroven med redigeringsfunktionerne *Ny*, *Favorit* (kun Standard-layout) og *Flytte*. (Hvis intet ikon er markeret, vises kun knappen *Ny*.)

Organisere apps med Handi-layout valgt:

Handi Rudenet




Handi Rækker



Organisere apps med Standard-layout valgt:

Første side

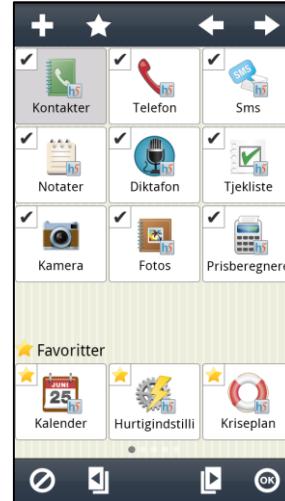

Øvrige sider



4.3.2.1 Ny genvej/app



Via knappen *Ny* kan man oprette genveje i Startmenuen til visse funktioner i Handi-apps. Man kan downloade og installere nye apps fra *Play Butik*, oprette en genvej til *Handi Indstillinger* og *Opdater Handi*.

Når man vælger *Play Butik* i det første billede, kommer man direkte dertil og kan downloade og installere nye apps.



For at oprette en ny genvej til en Handi-app skal man vælge funktion i det første billede, f.eks. "Kalender".


I "Vælg genvej" vises en liste over funktionens mulige genveje.

Når du trykker på *OK* oprettes genvejen sidst efter de markerede ikoner.

Genveje, der allerede findes i Startmenuen, vises ikke i listen.

4.3.2.2 Vælg/fjern app

Alle installerede apps er med i **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps**, men ikke alle er forvalgte.

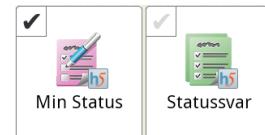


Hvis du ønsker, at en app skal vises i Startmenuen, trykker du på fluebenet i ikonets tjekboks, så det bliver sort, og vælger hermed funktionen.

For at fravælge en app, fjerner du blot markeringen i tjekboksen ved at trykke på den, så den bliver grå.

Indstillingerne gemmes, når du trykker på *OK*.

4.3.2.3 Flyt ikon med Flyt-knapper

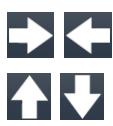

For at flytte et ikon markerer du det og trykker herefter på knappen *Flyt til venstre/højre* eller *Flyt op/ned*. Herefter ændres ikonernes placering i Startmenuen. (Hvis layoutet for Startmenuen er Handi Rækker, vises knapperne op/ned, ellers vises venstre/højre.)

Indstillingerne gemmes, når du trykker på *OK*.

4.3.2.4 Flyt ikon med "drag & drop"

Man kan ændre rækkefølgen af ikoner ved hjælp af "drag & drop".

Man trykker og holder på det ikon, der skal flyttes, og herefter trækker man ikonet til dets nye placering og slipper.

Man kan flytte ikonet til en anden skærmside ved at trække det til venstre eller højre.

4.3.2.5 Favorit (kun Standard-layout)

- ★ For at tilføje en ny favorit i favoritlisten nederst på skærmen, skal man markere det ønskede ikon og trykke på knappen *Favorit*. Hvis der allerede er 3 iconer i favoritlisten, vil ikonet længst til højre i favoritlisten bytte plads med det markerede ikon.

4.3.2.6 Slet genvej

- ☰ For at slette en genvej fra listen, markerer du den og trykker herefter på *Slet*-knappen. Du skal bekræfte, at du ønsker at slette ikonet. Ikonet slettes herefter fra listen. Indstillingerne gemmes, når du trykker på *OK*.

OBS! Man kan kun fjerne genveje, ikke apps. Hvordan man fjerner apps beskrives i *Håndbogen*.

4.3.2.7 Opdater

- ⟳ Med *Opdater*-knappen flyttes alle forvalgte iconer, så de ligger først, og det er dermed muligt at organisere rækkefølgen.

4.3.3 Vælg baggrundsbillede

Via **Indstillinger|Startmenu|Vælg baggrundsbillede** vælger man det baggrundsbillede, der skal bruges ved Standard-layout.

Man kan vælge de eksisterende billeder eller tage et nyt billede med kameraet.

Man kan ikke vælge baggrundsbillede til Handi-layout.

Baggrundsbillede kan også vælges via *Hurtigindstillinger*, se *Håndbogen*.




4.3.4 Nulstil Hjemknappen

Når man trykker på *Hjem*-knappen kommer man til den startskærm der er valgt for Handi. Det mest almindelige er at have Handi Startmenu som startskærm, men andre startskærme kan også bruges. Via **Indstillinger|Startmenu|Nulstil Hjemknappen** kommer man til Androids indstillinger og kan vælge en anden startskærm. Se i *Håndbogen* for din Handi-model hvordan du gør.

5. Hurtigindstillinger

Handi-appen *Hurtigindstillinger* er et udvalg af de Android-indstillinger, der findes. De indstillinger, som man kan have brug for at have til rådighed i den daglige anvendelse.

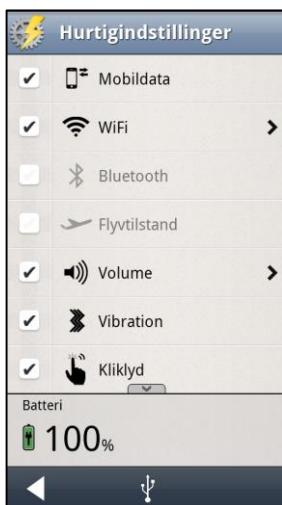

Når du starter *Hurtigindstillinger* vises de indstillinger, man har valgt at have til rådighed.

De valg, der er aktiverede (*Mobildata*, *WiFi*, *Volume*, *Vibration* og *Kliklyd*), er markeret med et flueben, de, der ikke er aktiverede (*Bluetooth* og *Flyvtilstand*), er gråmarkerede.

Nogle af indstillerne har en pil længst ude til højre, som viser, at man skal trykke på linjen for at komme videre til Android-indstillerne, f.eks. for at logge ind på et WiFi-netværk.

Hvis der findes flere indstillerne end der er plads til på skærmen vises *Vis mere*-symbolerne øverst/nederst for at vise at listen fortsætter i den retning.

Hurtiginstillinger beskrives mere udførligt i Håndbogen.

6. Indstillinger

Handi 5 kan indstilles til at passe til behovene for mange forskellige typer af brugere og til at give brugeren mulighed for at udvikle sig med sin Handi. For at kunne støtte en bruger i anvendelsen af Handi 5, er det vigtigt, at du forstår, hvordan funktionen *Indstillinger* fungerer.

Du kommer til Indstillinger ved at trykke på *knapkombinationen*, eller via ikonen på Startmenuen, se *Håndbogen*.

I Indstillingsmenuen vælger du, hvilken funktion du vil lave indstillinger for.



I denne brugervejledning beskrives indstillinger for følgende funktioner:

- **Startmenu** (se kapitel 4.3 *Tilpas Startmenuen*)
- **System** (se kapitel 7. *Systemindstillinger*)
- **Billedarkiv** (se kapitel 8. *Billedarkiv*)
- **Tastatur** (se kapitel 9. *Tastaturet*)
- **Handi Web** (se kapitel 10. *Handi Web*)

Android Indstillinger, Hurtigindstillinger og Play Butik beskrives i *Håndbogen*.

Indstillinger for de specifikke Handi-apps **Kalender, Kontakter, Sms, Telefon, Kriseplan, Album, Tjekliste, Diktafon, Afspiller** og **Prisregneren** beskrives i de respektive brugervejledninger.

7. Systemindstillinger

For at foretage systemindstillinger, skal du gå til Indstillinger. Du kommer til Indstillinger ved at trykke på *knapkombinationen*, eller via ikonen på Startmenuen, se *Håndbogen*.




For at komme til systemindstillinger vælger du System på side 1.

Der bliver vist en menu, se billedet til højre.

Nedenfor beskrives de forskellige indstilingsfunktioner.



7.1 Kodebeskyt indstillinger

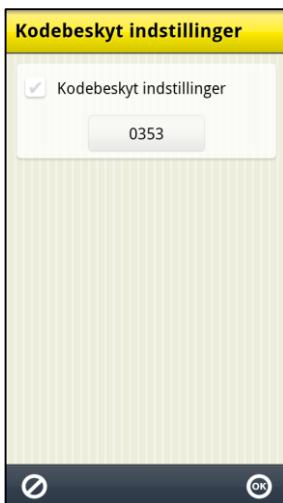


Via **Indstillinger|System|Kodebeskyt indstillingen** kan du beskytte indstillingerne med en kode.

Det betyder at når du trykker *knapkombinationen* vises siden til højre og du skal nu indtaste en angivet kode for at komme til Indstillinger.

Koden skal forhindre, at brugere ved en fejl går ind i Indstillinger og ændrer indstillingerne eller downloader apps fra Play Butik.

For at vælge kodebeskyttelse markerer man "Kodebeskyt indstillingen". Hvis man ønsker en anden kode end den oprindelige **0353** trykker man på knappen med koden og angiver en anden kode.

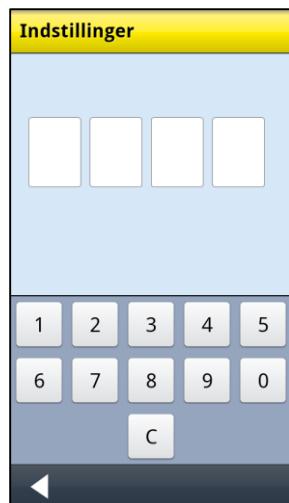

7.2 Tema




Via **Indstillinger|System|Tema** bestemmer du hvordan knaprækken skal se ud i alle Handi-appar. Du kan vælge mellem:

- Moderne Værktøjslinje
- Klassisk Værktøjslinje

Klassisk Værktøjslinje har farvede knapper med tydligere kontraster og konturer. Moderne Værktøjslinje ligner mere en "almindelig" smartphone

Eksempel på de to tema på Kalendersiden:

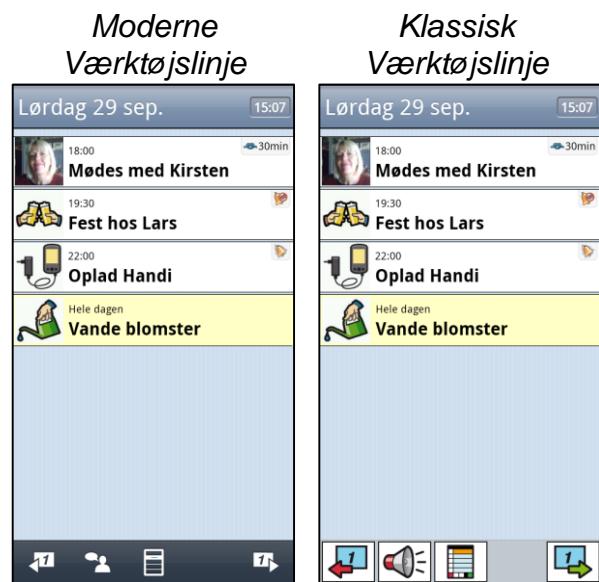

7.3 Talesyntese




Når du vælger **Indstillinger|System|Talesyntese** vises en menu med følgende indstillingsfunktioner:

- Talesyntese indstillinge
- Vælg stemme

De forskellige indstillingsfunktioner beskrives nedenfor.

7.3.1 Talesyntese indstillinger

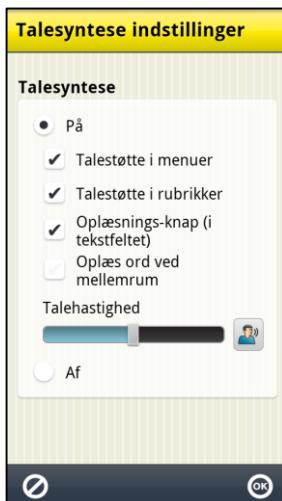

Via **Indstillinger|System|Talesyntese|Talesyntese indstillinger** vælges hvornår og hvordan talestøtte skal bruges i tastaturet og i menuer. Når talesyntese er valgt kan man foretage følgende indstillinger:

- Talestøtte i menuer
- Talestøtte i rubrikker
- Oplæsnings-knap (i tekstuelt)
- Oplæs ord ved mellemrum
- Talehastighed

Indstillerne beskrives nedenfor.

OBS! Når indstillingen er sat til "Talesyntese Af" gives ingen talestøtte overhoved.

7.3.1.1 Talestøtte i menuer

Når **Talestøtte i menuer** er valgt vises

Oplæsnings-knappen i alle Handi-menuer og lister, se eksemplet til højre.

For at *Oplæsnings-knappen* kan vises skal et ikon eller en række være markeret. Når du trykker på *Oplæsnings-knappen* læses ikonet/linien op af talesyntesen.

(Talestøtte på Kalendersiden fungerer anderledes, se *funktionsvejledning Kalender*.)



7.3.1.2 Talestøtte i rubrikker

Når **Talestøtte i rubrikker** er valgt læses det der står i rubrikfeltet op af talesyntesen, fx navn, dato og tid.

7.3.1.3 Oplæsnings-knap i tekstuelt

Når **Oplæsnings-knap (i tekstuelt)** er markeret, vises en *Oplæsnings-knap* ved siden af tekstueltet som vist i venstre billede.

Når **Oplæsnings-knap (i tekstuelt)** ikke er markeret, vises ingen *Oplæsnings-knap*. Se billedet til højre.

Når du trykker på *Oplæsnings-knappen* læses hele teksten op.




7.3.1.4 Oplæsning af ord ved mellemrum

Når **Oplæsning ord ved mellemrum** er valgt læses ordet op samtidig med, at du skriver på tastaturet. Foregående ord læses op, når du taster mellemrum.

7.3.1.5 Talehastighed

Du kan ændre talehastigheden ved at dra på regulatoren. Sætningen "Test af talehastighed" læses op, så du kan teste hastigheden.

7.3.2 Vælg stemme

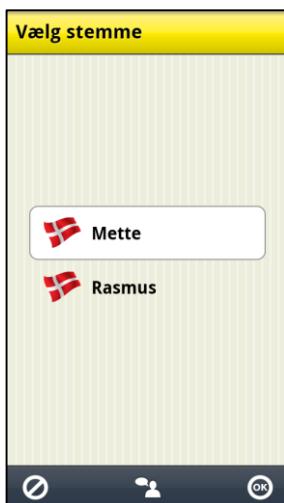

Via **Indstillinger|System|Talesyntese|Vælg stemme** vælger du hvilken talesyntese stemme som skal anvendes.

Du kan vælge mellem stemmerne Mette (kvindestemme) og Rasmus (mandestemme).

Når du trykker **OK** installeres den markerede stemmen.

7.4 Lister



Via **Indstillinger|System|Lister** vælges hvordan man skal bladre sider i Handi.

Man kan vælge mellem:


- Brug scroll-lister
- Brug fingerscroll

Indstillingerne beskrives forneden.

7.4.1 Brug scroll-lister

Når ”Brug scroll-lister” er valgt vises *Vis mere*-symboler  øverst/nederst i en liste, hvis hele listen ikke kan være på skærmen, for at vise, at listen fortsætter i den retning.

Man placerer fingeren på skærmen og trækker den i den retning, listen skal rulle.

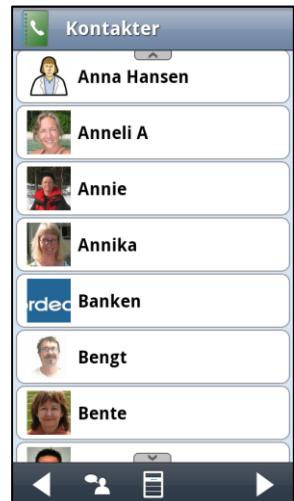


7.4.2 Brug fingerscroll

Når ”Brug fingerscroll” er valgt kan man bladre til næste side ved at placere fingret på skærmen og trække til venstre/højre. Det går også at bladre med *Bladre*-knapperne .

Fingerscroll er endnu ikke indført i alle Handi-funktioner.

7.5 Batteri

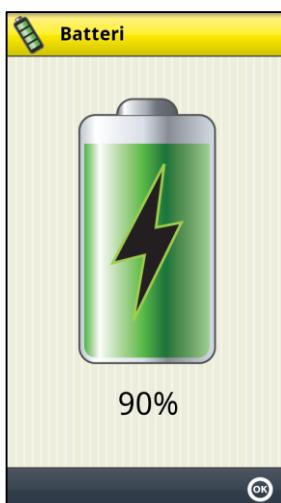

Via **Indstillinger|System|Batteri** kan du se batteriniveauet. Det vises både grafisk og i procent.

Grønt betyder, at batteriet har god opladning (71-100%), orange betyder, at det begynder at trænge til opladning (21-70%), rødt betyder, at der er akut behov for opladning (0-20%).

Batteriniveauet kan også vises i Hurtigindstillinger, se kapitel 5. *Hurtigindstillinger*.

Batteriniveauet kan også vises som et ikon på startmenuen, se kapitel 4. *Startmenuen*.

I Standard-layout vises batteristatus i statusfeltet.

Hvor lang tid batteriet rækker til, afhænger naturligvis af, hvor meget du anvender Handi, men det er god rutine at oplade Handi hver nat, så den kan fungere pålideligt hele dagen.

7.6 Importer Handi4-data



Via **Indstillinger|System|Importer Handi4-data** kan man overføre diverse brugerdata fra sin gamle Handi 4.

Importen sker i to trin, først i HandiTools (fra versjon 2.6) og derefter i Handi 5.

Sådan overfører man brugerdata:

1. Tilslut den **Handi 4**, hvis brugerdata skal indlægges i Handi 5.
2. Start HandiTools.
3. Gå til **Filer**-menuen, vælg **Sikkerhedskopiering**. Følg instruktionerne i HandiTools.
4. Afslut HandiTools.
5. Kobl Handi 4 fra.
6. Tilslut Handi 5 til computeren. (Se *Håndbogen*.)
7. Start HandiTools.
8. Gå til **Filer**-menuen og vælg **Importer Handi4 brugerdata**. Følg instruktionerne i HandiTools.
9. Kobl Handi 5 fra.
10. Tryk knapkombinationen for at komme til Handi-indstillingerne.
11. Gå til **Indstillinger|System|Importer Handi4-data**.
12. Tryk på **Start importering**, og vent, mens Handi 4 brugerdata importeres i Handi 5.
I billedet ser man hvilke data, der bliver overført.
13. Færdig!

7.7 Backup



Ved Backup kopieres indstillinger og data for Handi-funktionerne Kalender, Kontakter og Sms til hukommelseskortet. Systemindstillinger som lydstyrke og baggrundsbillede følger ikke med.

Det anbefales, at du en gang imellem foretager en sikkerhedskopiering til en pc via HandiTools. Det vil betyde, at du kan genskabe det meste, selv om du helt skulle miste din Handifon, eller hvis hukommelseskortet går i stykker.

I forbindelse med backup laves en gennemsøgning af kalenderdatabasen for at fjerne aktiviteter, som er indstillet til "slet bagefter".

Med knappen *Se logfil* kan du se information om den sidste backup, og om den var vellykket.

Automatisk backup sker hver nat klokken 03:15.

Du kan manuelt foretage backup ved at trykke på knappen *Lav en backup nu!* i **Indstillinger|System|Backup**. Det kan være praktisk at gøre, før en sikkerhedskopierung via HandiTools så de sidste ændringer i kalenderen kommer med i sikkerhedskopien.

7.8 Genindstilling



Via **Indstillinger|System|Genindstilling** kan du foretage genindstilling til følgende tilstand:

- Seneste backup
- Til grundindstilling


De forskellige genindstillinger beskrives nedenfor.

7.8.1 Genindstilling fra backup

Total genstart betyder at alle databaser og indstillinger fra sidste backup lægges ind igen. Tryk på knappen **Genindstil nu!** for at starte genindstilling.

Hvis du trykker på knappen **Tilpasset genindstilling** kan du vælge hvilke funktioner der skal genindstilles fra backup, *Sms*, *Kalender*, eller *Kontakter*, se billedet til højre.

Genindstilling fra backup er kun tænkt til at skulle foretages, hvis der har været problemer med en eller flere af databaserne.

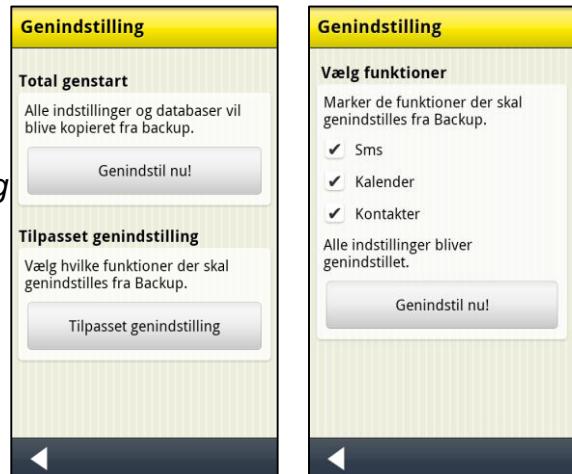

7.8.2 Genindstilling til grundindstilling

Genindstilling til grundindstilling betyder at Handi går tilbage til de indstillinger, som den havde til at starte med, mht. hvilke apps, der skal vises. Ingen databaser, dvs. billeder, kontakter, meddelelser osv. fjernes.

Genindstilling til grundindstilling bruges gerne til at komme tilbage til et udgangspunkt, når man har prøvet sig lidt frem.

Man må vælge mellem *Nivå 1* (*Handi-layout*) og *Nivå 2* (*Standard-layout*).

Grundindstillingen er defineret i kapitel 12. *Grundindstillinger*.



7.9 Om Handi

Via **Indstillinger|System|Om Handi** kan du se hvilken version du har i din Handi.

Via knappen *Søg opdatering* kan man finde ud af, om der findes en nyere version af softwaren eller setupfiler.

Setupfiler bruges ved konfiguration af nye brugere og ved genindstilling til grundindstilling.

(Oppringningen koster næsten ingenting, da det er så få data, der hentes.)



Hvis "Søg opdatering" giver besked om, at der er en nyere version tilgængelig, startes funktionen "Opdater Handi" automatisk, se kapitel 11. *Opdater Handi*.

Hvis man vælger "Vis information om opdatering" kontrollere Handi om der findes en nyere version, samtidig med backup, hver nat.

Hvis der findes en nyere version vises det på ikonen for system  i Indstillinger. Hvis man har en genvej til "Opdater Handi" på startmenuen får den en symbol . En besked "Der er en ny version af Handi tilgængelig" bliver vist. Du kan derefter opdatere Handi som beskrevet i kapitel 11. *Opdater Handi*.

7.10 Log



Via **Indstillinger|System|Log** kan du håndtere logfiler i Handi. Logfiler oprettes i baggrunden af Handi og bruges først og fremmest ved fejlsøgning.

Logfilerne gemmes automatisk i telefonens interne hukommelse, hvor de er utilgængelige. Med **Kopier til hukommelseskort** kopieres logfilerne til hukommelseskortet i Handi. Brug derefter PC-programmet HandiTools for at håndtere logfiler. Tryk på knappen **Kopier** for at starte kopieringen.

Vælger du **Upload til server** så uploades logfilerne til Abilias supportserver via mobilnettet eller WiFi. Tryk på knappen **Upload** for at starte.

Handi har indbygget automatisk crash-rapportering, se nedenfor.

7.11 Automatisk crash-rapportering

Handi har indbygget automatisk crash-rapportering. Hvis der går noget galt i dine Handi-apps, vises en fejlmeldelse og samtidig sendes information om fejlen automatisk til udviklingsafdelingen. Der sendes ingen personlige oplysninger. Dette er til stor hjælp i arbejdet med at udvikle et stabilt og velfungerende program.

Ved et eventuel crash vises en meddeelse. Bekræft meddeelsen for at starte Handi-programmet igen.

Hvis man får flere crash på én dag, så kan det være en god idé at undersøge, om der er kommet nyere versioner af programmet. Se kapitel 11. *Opdater Handi*.


8. Billedarkiv

Når du vil knytte billeder til aktiviteter, kontakter, checklister etc. henter du dem fra billedarkivet. Da vises siden "Vælg billede", se det venstre billede.

Du kan også anvende billedarkivet til at skrive billed-sms'er, se det højre billede.

Billedarkivet er oprindeligt organiseret i kategorierne (mappene) *Handi*, *Tøj*, *Badeværelse*, *Skole*, *Standardbilleder*, *Smileys*, *Personer* (tom) og *Baggrundsbilleder*.

Billeder som gemmes fra fx. Sms og email gemmes i mappen *Modtaget*. Mappen vises kun hvis der ligger gemte modtagne billeder.

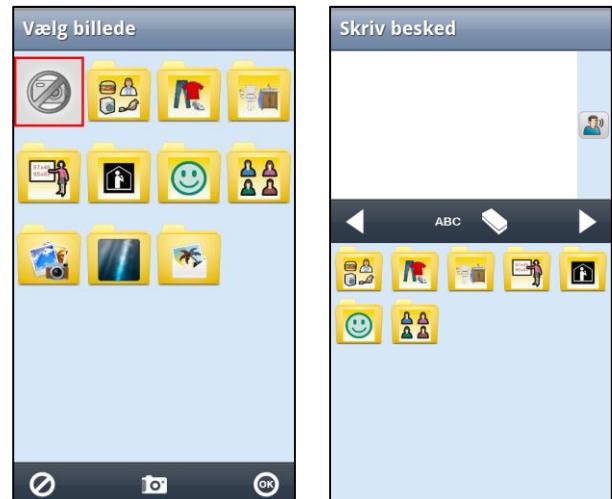

Billedarkivet består af *mapper* og *billeder*.

Når du trykker på en mappe, kommer du til en ny side med ikoner, se siden til højre. For at komme tilbage til foregående niveau trykker du på *Tilbage*.



8.1 Redigere billedarkivet via HandiTools

Via PC-programmet HandiTools kan man redigere bl.a. billedarkivet. Man kan tilføje nye billeder og mapper, samt ændre billedernes navn og placering. Se *Brugervejledning HandiTools*.

Eksempel på hvordan man lægger ind billedbasen *Handi Coop-billeder*:

Med HandiTools medfølger billedbasen Handi Coop-billeder. Hvis du vil bruge disse billeder i Handi skal du gøre sådan her:

1. Tilslut Handi til computeren. For fx tilslutningsalternativ, se *Håndbogen*.
2. Start HandiTools.
3. Gå til **Billedarkiv**-fanen.
4. Klik på knappen **Ny** og vælg **Mappe**, tryk på **Næste**.
5. Vælg et billede der skal symbolisere mappen, *Billede fra billedebæse/Handi AIR-billeder/Kategori Handle*, navngiv billedet "Handle".
6. Markere den kategori du lige har oprettet, klik på **Ny** og vælg **Billede**.

7. Klik på *Billede fra billedbase* og vælg *Handi Coop-billeder*. Markér alle billede (markér det øverste billede, hold <Shift> nede og markér den nederste billede) og klik på *OK*.
8. Klik på *Næste* og derefter på *Udfør*.
9. Nu findes Coop-billederne i din Handi. Afslut HandiTools og frakoble Handi.

8.2 Redigere billedarkivet i Handi

Via **Indstillinger|Billedarkiv** laver du indstillinger for billedarkivet direkte i Handi. Her kan du se hvilke billede der ligger i billedarkivet og redigere det. En redigeringsside for Billedarkiv vises.



For at redigere billedarkivet anvender du redigeringsknapperne i den øverste knap-række: *Ny*, *Ændre*, *Slet*, *Flyt til venstre* og *Flyt til højre*. (Hvis du ikke har markeret et ikon vises blot knappen *Ny*).

Via *Ny*-knappen kan du lægge nye mapper ind. Man kan ikke lægge nye billede ind på den her måde, det skal gøres via HandiTools, se foroven.

Hvordan du redigerer billedarkivet beskrives nedenfor.

8.2.1 Opret en mappe

+ For at oprette en ny mappe trykker du på knappen *Ny*.



På den første side vælger du et billede for mappen (eller tager et nyt billede med det indbyggede kamera). På den næste side navngiver du mappen.

Mappen lægges ind sidst i billedarkivet. (Hvis et ikon er markeret, når du opretter en ny mappe, lægges mappen ind efter det markerede ikon.)

Billedarkivet gemmes, når du trykker på *OK*.

8.2.2 Ændre mappe



For at ændre en mappe markerer du den og trykker på knappen *Ændre*. Samme procedure som i 8.2.1 *Opret en mappe* vises.

8.2.3 Ændre navn på billede



For at omdøbe et billede markerer du det og trykker på knappen *Rediger*. Tastaturet vises og du kan nu indtaste et nyt navn.

8.2.4 Slet mappe/billed



For at slette en mappe/billede markerer du det og trykker på knappen *Slet*. Når du har bekræftet sletningen fjernes mappen/billedet.

8.2.5 Flyt mappe/billed



For at flytte mappe/billed til venstre eller højre markerer du den og trykker på knappen *Flyt til venstre* eller *Flyt til højre*. Mappen/billedet flyttes.

Hvis du flytter et billede/mappe, så det kommer til at ligge før/efter en mappe, får du spørgsmålet: "Vil du flytte billede/mappen x til mappen x?"

Hvis du svarer *JA* flyttes billedet til mappen x. Hvis du svarer *NEJ* lægges billedet før/efter mappen i det nuværende niveau.



9. Tastaturet

I Handi-app


Når Handi-tastaturet er valgt vises det i alle apps der bruger tastatur, ikke kun i Handi-apps.

Når Handi-tastaturet bruges i Handi-apps vises det i en særlig tekstdindtastningside med rubrik, mulighed til talestøtte samt knapper for *OK* og *Annuler*.

Når Handi-tastaturet bruges i andre apps dækker det en del af skærmen, og vises i den størrelse appen tillader (standard, web, numerisk, e-post). Der er ingen knapper for *OK* og *Annuler*.



I standardapp

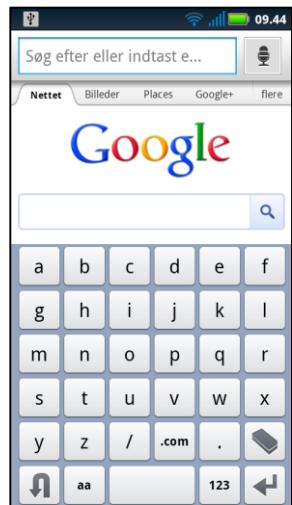

ABC-tastatur

Handi-tastaturet kan vises **stående** med *ABC-tastatur* eller **liggende** med *ABC-* eller *QWERTY-tastatur*.

Når man skriver med versaler alt. små bogstaver vises disse på tastaturet. (Man ser altså det der vil komme op i tekstfeltet.)

Når man trykker på

Oplæsnings-knappen læses den indskrevne tekst op (hvis denne indstilling er valgt).



QWERTY-tastatur



ABC-tastatur



Tastaturet har fem varianter:



For at skifte til Numerisk tilstand trykker man på knappen . I numerisk tilstand skifter man mellem side 1, 2 og 3 ved at trykke på knappen . For at komme tilbage til Bogstavtilstand trykker man på knappen eller på mellemrum.

Skifttilstandsknappen viser hvad der vil ske næste gang man skriver et bogstav.

- betyder at næste bogstav bliver versal (A) og derefter små bogstaver (a).
- betyder at næste bogstav bliver gemen (a) og fortsætter derefter med små bogstaver (a).
- betyder at næste bogstav bliver versal (A) og fortsætter derefter med versaler (A). Dvs CapsLock.

Når automatisk skifttilstand er valgt, ændres tastaturets funktion automatisk. Man kan også trykke på knappen selv og derved bestemme hvordan man vil at tastaturet skal fungere.


- Slet det sidst indtastede tegn.
- Skjul tastaturet.
- Giver ny linie.

Smiley-symbolet i Handi er ordnede i et farvesystem. For mere info om Smileys, se *Brugervejledning Sms*.

Grøn	Glad, positiv følelse
Rosa	Kærlig følelse
Orange	Neutral følelse
Blå	Ked af det, negativ følelse
Rød	Vred, negativ følelse

Hvis du vælger en Smiley fra Smiley-tastaturet tilføjes den i tekstdfeltet. Smileys kan også bruges i Handi-funktionen Sms, se *Brugervejledning Sms*. Det er valgfrit om "Numerisk side 3 Smileys" skal være tilgængeligt.

9.1 Tilpasse tastaturet

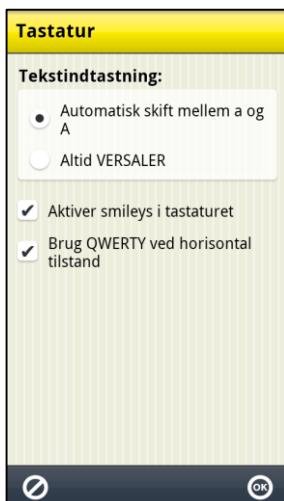

Via **Indstillinger|Tastatur** vælger du om bogstaverne på tastaturet automatisk skal ændres fra versaler til små bogstaver og omvendt.

Når alternativet "Automatisk skift mellem a og A" er valgt, bliver det første bogstav efter punktum eller ny linje automatisk stort. Resten af sætningen bliver skrevet med små bogstaver.

Når alternativet "Altid VERSALER" er valgt vises store bogstaver på tastaturet indtil du trykker på knappen .

Når "Aktiver smileys i tastaturet" er valgt, kan du bruge Smileys i Handi.

Hvis indstillingen i **Hurtigindstillinger|Roter skærm** er afkrydset vil tastaturet vises som et liggende tastatur hvis Handi bruges liggende. Hvis indstillingen i

Hurtigindstillinger|Roter skærm er afkrydset, vil tastaturet vises som et liggende tastatur hvis Handi bruges liggende. Hvis "Brug QWERTY ved horisontal tilstand" er valgt, vises det liggende tastaturet som et QWERTY-tastatur, ellers vises et ABC-tastatur.

Via **Indstillinger|System|Talesyntese|Talesyntese indstillinger** kan man indstille om *Oplæsnings*-knappen skal vises i tekstfeltet.

For valg af tastatur (Handi eller standard), se *Håndbogen*.

10. Handi Web

Handi Web er en webtjeneste der gør det muligt at håndtere sin kalender fra en computer eller tablet. Den giver også mulighed for et godt overblik over dagens, ugens og månedens aktiviteter.

En anden fordel med *Handi Web* er at andre personer, fx pårørende, kan få adgang til kalenderen direkte fra deres computer/tablet/smartphone. På den måde kan brugeren få hjælp med planlægning ”på distance”.

Det kræves internettiltræfning for at *Handi* skal kunne synkronisere med webserveren. Synkroniseringen gøres kun ved behov – ved ændringer i *Handi* eller på *Handi Web*.

Hvis der ikke er internettiltræfning kan man bruge *Handi* uden problemer alligevel, da laves synkroniseringen bare senere.

Handi kan bruges uden *Handi Web*. Da gemmes kalenderen kun i enheden, og ingen internettiltræfning kræves.

Hvordan man bruger *Handi Web* beskrives i en separat brugervejledning.

10.1 Registrering af brugere

Før *Handi* kan tilsluttes *Handi Web* skal brugeren registreres. Dette skal gøres centralt af fx din kommunale sagsbehandlere.

10.2 Logge ind

For at *Handi* skal synkronisere med *Handi Web* skal enheden være logget ind. Indlogging gøres ved **Indstillinger|Handi Web**. Følgende side vises:

Handi Web
Log ind her Skriv dit brugernavn og adgangskode. Klik derefter på Log ind. <input type="text" value="Brugernavn"/> <input type="text" value="Adgangskode"/> <input type="button" value="Log ind"/>
Ø

Her skal man skrive brugernavn og adgangskode og derefter trykke på *Log ind*.
Hvis indlogging til *Handi Web* mislykkes får du fejlbesked om årsagen.
Når *Handi* er indlogget vises siden til højre. Sørg for at ”Synkronisering” er afkrydset og tryk på *OK* for at lukke siden.

Handi Web
Log ind på Handi Web Du er nu logget ind på Handi Web Logget ind som: user@abilia.se <input type="button" value="Log ud"/>
Synkronisering Ved synkronisering bliver alle data der findes på <i>Handi</i> også gemt på internettet (og omvendt). <input checked="" type="checkbox"/> Synkronisering <input type="button" value="OK"/>

10.3 Logge ud

Handi forbliver logget ind på *Handi Web* til man selv aktivt logger ud. Selv om enheden genstartes fortsætter den at være logget ind.

For at logge ud skal man gå til **Indstillinger|Handi Web** og trykke på knappen *Log ud*.

En besked ”Du er logget ud” vises og indloggingssiden vises.

11. Opdater Handi

Softwareen i Handi udvikles kontinuerligt. Det angår både retning af småfejl, fx bugs, og nye og forbedrede funktioner. Det er derfor en god idé at opdatere softwaren med jævne mellemrum.

Funktionen "Opdater Handi" kan startes via **Indstillinger|System|Om Handi** eller via en genvej på Startmenuen. (Med genvejen kan du ikke vælge at downloade setupfiler.)


Hvordan man indsætter en genvej beskrives i 4.3.2.1 Ny genvej/app.

Setupfiler bruges ved konfiguration af nye brugere og ved genindstilling til grundindstilling.

Mængden af data for softawaren er omkring 12 MB og nye setupfiler kan helt være omkring 35 MB, hvilket indebærer en vis udgift, hvis man ikke har et telefonabonnement med fri surf eller er tilsluttet til WiFi.

Nedenfor beskrives, hvordan man opdaterer. (Billederne forneden viser hvordan det ser ud i en Handi Defy+. Det kan se lidt anderledes ud på andre modeller, fremgangsmåden er dog den samme.)

1. Start "Opdater Handi".
2. Vent på besked om, hvorvidt der findes en nyere version af softwaren eller setupfilerne.
3. Tryk på *Hent*.
4. Tryk på *Installer* når opdateringen er downloadet.
5. Meddelelsen "Erstat programmet" vises, tryk på *OK*. Et billede med "Bekræft og installer" kan vises, se 11.1 Bekræft og installer nedenfor.
6. Tryk på *Installer* i billedet "Ønsker du at installere dette program?"
7. Tryk på *Udfør* i det sidste billede.

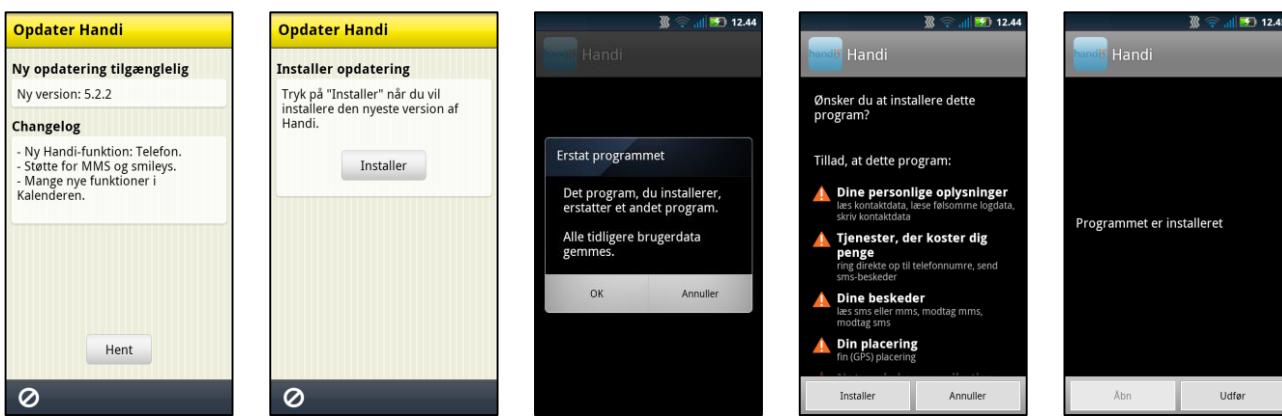

11.1 Bekræft og installer

Fra om juni 2013 har Google indført en ny, mere sikker funktion for at installere downloadede apps. Den kaldes "Bekræft og installer" og aktiveres på telefonen i forbindelse med opdatering af *Play Butik*. Funktionen indeholder en slags virusscanner og når en applikation som fx Handi5 skal opdateres (eller installeres) vises følgende side (Handi Defy+):

Det er en god idé at sætte hak i "Brug som standard til denne handling" og derefter vælge *Bekræft og installer*. Da slipper man for at gøre dette valg næste gang en app skal installeres.



12. Grundindstillinger

Når Handi startes for første gang, og når du foretager en Genindstilling eller Total genstart, omstilles Handi i henhold til en grundindstilling. Dette for at give rimelige udgangspunkter til den individuelle tilpasning, som altid bør finde sted. Nedenfor beskrives, hvad disse indstillingsniveauer indebærer.

				Niveau 1 Handi	Niveau 2 Standard
Startmenu	Kalender			X	X
	Telefon			X	X
	Sms			X	X
	Kontakter				
	Ur (genvej)			X	X
	Notater			X	X
	Kamera			X	X
	Foton (genvej)			X	X
	Diktafon			X	X
	Tjekliste			X	X
	Hurtigindstillinger			X	X
	Kriseplan			X	X
	Album			X	X
	Afspiller			X	X
	Prisberegneren			X	X
	Min Status			X	X
	Statusvar			X	X
	Lommerregner			X	X
	Batteri			X	X
	Handi Indstillinger			X	X
		Startmenu	Standard		X
			Handi Rudenet	X	
			Handi Rækker		
		Baggrundsbillede			Standard
System	Tema	Værktøjslinje	Moderne	X	X
			Klassisk		
	Talesyntese	På/Af		På	På
			Talestøtte i menuer	X	
			Talestøtte i rubrikker	X	
			Oplæsnings-knap (i tekstmfeltet)	X	X
			Oplæs ved mellemrum		
			Talehastighed	55%	55%
	Lister	Brug scroll-lister			X
		Brug fingerscroll			X
	Tastatur	Altid VERSALER			
		Automatisk skift mellem a og A		X	X
		Aktiver smileys		X	X
		Brug QWERTY ved horisontal tilstand		X	X
Kalender	Kalendersiden	Visning	Liste	X	X
			Tidssølje		
		Bladre bagud den samme dag		X	X

		Bladre fremad i dage	Ikke tilladt		
			Maks 6 dage		
			Ubegrænset	X	X
		Bladre bagud i dage		X	X
		Vis digital tid for aktiviteten		X	X
		Vis Ur ved tryk på uret			
		Vis tekst for aktiviteten		X	X
Aktivitetssiden	Vis Slet-knap			X	X
	Vis Redigér-knap			X	X
	Vis sidste kvarter som fem punkter			X	X
	Digital nedtælling			X	X
Indsæt aktivitet	Tillad passeret starttid			X	X
	Forvalgt alarm	Alarm+vibration		X	X
		Alarm			
		Vibration			
		Stille alarm			
		Ingen alarm			
	Forvalgte påmindelser	Ingen		X	X
Indsæt aktivitet via Redigér-siden	Indsæt aktivitet via Redigér-siden	Valgt		X	X
		Vælg aktivitetstype		X	X
		Standardaktivitet-knap		X	X
Indsæt aktivitet via sekvens	Indsæt aktivitet via sekvens	Valgt			
		Vælg dato		X	X
		Vælg aktivitetstype		X	X
		Vælg Standardaktivitet		X	X
		Vælg billede		X	X
		Navngiv aktiviteten		X	X
		Info-menu		X	X
		Slet bagefter		X	X
		Vælg Kvittering og Alarm		X	X
		Vælg påmindelse		X	X
		Vælg tidslængde			
		Indstil sluttid			
Redigér-siden	Dato			X	X
	Navn			X	X
	Starttid			X	X
	Sluttid			X	X
	Tidslængde				
	Hele dagen			X	X
	Kvittering			X	X
	Billede			X	X
	Info-menu			X	X
	Påmindelse			X	X
	Slet bagefter			X	X
Info-menu	Notater			X	X
	Diktafon			X	X
	Tjekliste			X	X
	Min Status			X	X
	Kontakter			X	X

		Billede		X	X
		Timer		X	X
		Hurtigindstillinger			
		Adresse			
		Link			
		Album			
		Afspiller			
		Prisberegneren			
		Sms			
		Telefonnummer			
	Kalendermenuen		Indsæt aktivitet	X	X
			Månedsoversigt	X	X
			Ugevisning	X	X
			Start timer	X	X
			Tidsmåler	X	
			Tidsbog	X	
			Ur	X	X
			Søg aktivitet	X	X
			Standardaktiviteter		X
			Standardtimere		X
			Alarmlyd		X
	Tidvisning	Ur	Analog	X	
			Digital		X
		Månedssymbol/Ugenummer	Handisymbol	X	
			Pictogram		
			Ugenummer		V
			Intet		
		Vis ugedagsfarver		X	
		Vis helligdage		X	X
	Tidsindtastning	Metode til at vælge tid	Digital (med tal)		
			Analog (med urskiver)		
			Digital m. Analog-knap	X	X
			Analog m. Digital-knap		
		Analog døgninddeling	formiddag og eftermiddag		
			dag och natt	X	X
	Klokken	Vis dato		X	X
		Vis tid på døgnet		X	X
		Vis knap for oplæsning hvert kvarter (chimefunktion)			
		Ur	Analog	X	X
			Digital		
			Både analog og digital		
	Månedsoversigt		Vis markering for gentagede aktiviteter		
	Ugevisning	Antal dage i ugevisning	7 dage	X	X
			5 dage		
		Vis aktivitetens:	Tid		
			Billede	X	X
		Vis gentagede aktiviteter		X	X
		Vis knap for Timevisning		X	X

		Vis knap for Ny aktivitet		X	X
	Start timer	Vælg standardtimer		X	X
		Vælg billede		X	X
		Navngiv timeren		X	X
		Timertid	1-99 minutter	X	X
			1-999 minutter		
			Timer og minutter		
	Tidsmåler	Sekund-visere		X	X
		Vis Pause-knap		X	X
	Tidsbog	Ny tidsmåling		X	X
		Vis Tidsbog i Standardaktiviteter			
		Vis Tidsbog i Standardtimere			
	Standardaktiviteter	Stå op		X	X
		Gå på toilettet		X	X
		Tage brusebad		X	X
		Kaffe		X	X
		Mad		X	X
		Handle		X	X
		Oplad Handi		X	X
	Standardtimere	Børste tænder	3 minutter	X	X
		Spille	30 minutter	X	X
		Vaskemaskinen færdig	60 minutter	X	X
		5 minutter (blå punkt)	5 minutter		
		10 minutter (rød punkt)	10 minutter		
		15 minutter (gul punkt)	15 minutter		
		20 minutter (grøn punkt)	20 minutter		
	Alarmslyd	Aktiviteter uden kvittering	Piezo Alarm (D)/ Ticktac alarm (X)	X	X
		Aktiviteter med kvittering	Buzzer Alarm (D)/ Tickety-tock (X)	X	X
		Timere	BeeBeep Alarm (D)/ Beep once (X)	X	X
		Påmindelser	Bells (D)/ Temple bell (X)	X	X
		Vibration ved påmindelse		X	X
		Alarmtid		30sek	30sek
	Alarmsiden	Vis snooze-knap		X	X
	Rejsetilstand	Aktiver rejsetilstand			
Kontakter	Kontaktliste	Liste-type	Handi Rækker	X	X
			Handi Rudenet 4x3		
			Handi Rudenet 3x2		
		Vis konto	Handi	X	X
		Sortering	Mapper og egen rakkefølge		
			Mapper og alfabetisk rakkefølge	X	X
			Kun alfabetisk		
	Vis i Kontakter	Adresse		X	X
		Billede		X	X
		Telefonnummer		X	X
		Mobilnummer		X	X

		E-postadresse		X	X
		Info		X	X
		Slet		X	X
		Redigér		X	X
		Bekræfte udgående opkald		X	X
T elefon	Kontaktmenu	Ny kontakt		X	X
		Søg kontakt		X	X
		Sorter kontakter			
		Vælg konto			
		Kopier kontakter			
	Telefon-indstillinger	Vis i kontaktlisten	Skriv telefonnummer	X	X
		Ubesvarede			
		Indgående			
		Udgående			
		Vis i "Skriv telefonnummer"	Sidste opkald	X	X
Hurtig-indstillinger	Telefonmenu	Ubesvarede		X	X
		Indgående		X	X
		Udgående		X	X
		Net		X	X
		Saldo			
		Slet samtalelister			
	Mobildata			X	X
	WiFi			X	X
	Bluetooth			X	X
	Flytilstand			X	X
	Volume			X	X
	Vibration			X	X
	Kliklyd			X	X
	Roter skærm			X	X
	Skærmens tidsgrænse			X	X
	Ringetone			X	X
	Vælg baggrundsbilledet			X	X
	Batteri			X	X
	USB-tilslutning			X	X
A lbum	Albumliste	Visa i listen	Fotos	X	X
			Videoklip	X	X
			Modtaget	X	X
		Vis i menu	Nyt album	X	X
			Rediger album		
	Billedmenu	Slet		X	X
		Oversigt		X	X
		Ændre navn		X	X
		Ændre album			X
		Dele			X
Tjekliste	Opgavesiden	Indtastning	Hurtig		
			Tillpasset	X	X
		Redigér-knap		X	X
		Slet-knap		X	X

		Talesyntese	Opgave færdig/ ikke færdig	X	X
			Kun oppgave		
Tjeklistemenu	Ny tjekliste			X	X
	Ordne tjeklister				
Listeindstillinger	Liste-typ	Rækker		X	X
		Handi Rudenet			
	Sortering	Mapper og egen rækkefølge			
		Egen rækkefølge		X	X
		Alfabetisk rækkefølge			
Diktafon	Vælg billede				
	Navngiv diktafon-notat				X
	Navneforslag	Röstanteckning		X	X
	Maks indspillingstid	30 sekund			
		5 minut		X	
		30 minut			
		90 minut			X
	Lyt direkte fra listen				X
Afspiller	Artistinformation i spillelisten			X	X
	Mediainformation ipå afspillingssiden			X	X
	Mappe for øvrige media				X
Prisberegneren	Kvitteringsliste ved indtasting			X	X
	Antal-knap			X	X
	Foreslå nærmeste valør			X	X
Sms	Meddelses- indstillinger	Visning	Konversation	X	X
			Mapper		
<i>Hvis Android <v4.4</i>		Sms-advisering	På	X	X
			Af		
		Lydsignal	Standard ringtone	X	X
		Vibration			
		Vis beskeden i notifikationsvinduet			
<i>Hvis Android ≥v4.4</i>		Vis MMS-knapp		X	X
	Skriv besked	Brug standardbeskeder		X	X
		Skriv med billeder (Billed- sms)			
		Lange sms		X	X
		Ekstra bekræftelse før afsendelse		X	X
	Læs besked	Vise links		X	X
		Læs med billeder (Billed- sms)			
	Standard-sms	Ring til mig!		X	X
		Jeg har brug for hjælp med at handle ind!		X	X
		Vil du gå i biografen med mig?		X	X
		Jeg er kommet hjem.		X	X

	Tillykke med fødselsdagen!	X	X
	Knus!	X	X
	Kan du hjælpe mig?	X	X
	Tak for hjælpen!	X	X
	Hvornår kommer du?	X	X
	Hvor er du?	X	X
	Skal vi lave noget sammen?	X	X