

Batteri kapacitet og opladning

Ved fuldt opladet batteri, kan der udføres min. 2 x 10 på/- og aftagning af strømper (i alt 20 operationer).

Ladning:

Når lysdiode i håndtaget begynder at blinke, er der en reserve på ca. 6 operationer tilbage.

Start ladning hurtigt muligt efter dioden begynder at blinke.

Sæt stikket i motoren, og herefter i kontakt (230V)

Lysdioden lyser herefter konstant, og ladetiden er ca. 6-8 timer.

Der må gerne lades hver dag uanset om dioden ”kalder” på opladning.

Batteritype: Lithium ion



Rengøring:

Kan rengøres med fugtig klud når enheden IKKE er tilsluttet 230V

Sikkerhed:

Må ikke betjenes af børn.

Når der ikke trykkes på betjeningsknap, kan selen frit trækkes ud af motor.

Motoren afbryder automatisk ved belastning + 25 kg

NØDFIR: Slip trykket på betjeningsknappen, og selen kan frit trækkes ud af motor.

Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S | Sønderbyen 7 | 9510 Arden
www.bjorn-nielsen.dk | mail@bjorn-nielsen.dk | tlf.: +45 8692 7955



WWW.ON-OFFSTOCK.COM

Manual og brugsanvisning

”On & Off AKKU”

Kompressions-strømpe på/- og aftager



Hjælpemiddel ved stol/- og sengebrug

Opstilling

*Støttefoden vippes ud, og indstilles i højden.
Tryk på venstre side og træk bagud til der lyder et klik.



*Fold sædepladen ud, og placer benstøtten opad en stabil, og gerne lidt høj stol.



*Hælstøtte med basemodhold låses i den ønskede afstand ifh. benlængde/ hæl placering.



Påtagning af kompressionsstrømpe med base

Kun ben str. medium & large, strømpe klasse 1 & 2
(forudsætter at bruger kan bøje knæet, og styre fod i base)

Afmonter armene på basen, og monter strømpen herefter som anvist ved brug af on & Off manuel.



Træk selen ud af motoren, sæt strømpelåsen fast på basen, og læg basen på hælstøtte/modhold.
VIGTIGT ! selerne må ikke sno !



Basen skubbes imod modholdet, foden stikkes ind i strømpen/basen, OBS sikre at lukkegrebet er løsnet.



Tjek at foden er helt inde i strømpen, og tryk herefter på betjeningen, og basen trækkes opad benet, mens strømpen rulles glat på benet.



Basen og seler trækkes tilbage, og benet er frit.



Påtagning af kompressionsstrømpe

Som ”hjælpende hånd” ved brug af bl.a. spilerduk



*Placere benet på støtten, og fastgør låsene.



*Lad motoren trække strømpen på, mens der løbende justeres.



* Træk glidestoffet af/ud med låsene monteret.

Aftagning af kompressionsstrømpe

**Opstilling og indstilling som ved påtagning. herefter*

Træk selerne omkring rullerne, og hæng strømpelåsene i holder på motor.
VIGTIGT ! selerne må ikke sno !



Læg benet op på benstøtten, og fastgør strømpelåsene.



Ombuk strømpkant | låsene monteres | placer låsene kl.:”20 i16”



Tryk på betjeningen, og strømpen trækkes af benet.

On & Off AKKU ved sengebrug



Samme procedure som ved brug i stol



Dog særlig opmærksom med:

- ✓ Støttefoden skal ikke vippes ud.
- ✓ Sædepladen skubbes godt ind under balle/lænden.
- ✓ Min. afstand mellem selerulle og sengegavl = 10 cm.
- ✓ Undgå at lagen krøller under sele.