

Brugsvejledning for STABILO

1. Tag den lille slange i pumpens håndtag ud og begynd at forme puden



2. Skru slangen på pudens ventil. Ønskes en blødere pude - vent indtil puden er tilpas blød.

3. Ønskes en hårdere pude - sæt pumpen på slangen og sug luft ud, indtil den ønskede hårdhed er opnået.



4. For at ændre formen - sæt slangen på ventilen og vent indtil puden bliver blød



HandVacumaker - håndpumpe til puder.



ElectroVakumaker - elektrisk pumpe til madrasser.

HANDiGEAR

Individuelle løsninger