

Brugsanvisning Stimulite 3-zone madras

Anvendelsesområde

Stimulitemadrassen er udviklet til at forebygge og behandle tryksår. Anvendes som topmadras ovenpå eksisterende undermadras.

Brugsanvisning

Stimulitemadrassen er fremstillet i ét stykke og ligger i et inkontinens betræk. Betrækket har elastik i alle fire hjørner, så den kan fastgøres til underliggende madras.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ HOVED-/FODENDE

Madrassen skal vende således at de åbne celler vender opad og den glatte side nedad, i betrækket.

Fastgør stimulitemadrassen til undermadrassen i hvert hjørne ved hjælp af elastikkerne. For optimal trykaflastende effekt, læg da kun et lagen løst på.

Vaskeinstruktion

Betræk

- Kan maskinvaskes ved 95° og tørretumbles. Anvend mild sæbe uden blegemiddel.

Madras – maskinvask*

- Åben lynlåsen og tag madrassen ud af betrækket.
- Vask madrassen alene i maskinen ved 40°.
- Tørretumbling i ca. 30 min ved lav varme.

OBS: Er madrassen meget snavset, kan den vaskes ved 60° i 30 min.

Hvis maskinvask ikke er mulig

- Stimulitemadrassen kan også vaskes i badekar eller overbruses.
- Ryst madrassen og lad den tørre efterfølgende.

*Madrassen bør kun vaskes, hvis den er synligt snavset eller kontamineret. Vask og desinfektion af betræk er ofte tilstrækkeligt.

Bortskaffelse	Madrassen bortskaffes efter genbrugspladsens anvisninger
Brandsikkerhed	Produktet er brandtestet og godkendt i henhold til ISO 7176-16
Garanti	2 år ved skader opstået på grund af produktionsfejl eller fejl i materialer
Materialer	Madras: thermoplastisk poleurethan Betræk: poleurethan/polyester