

# Vejledning til Optima Go lyslup




Luppen gøres klar til brug ved at holde om den violette del, og trække i det lille håndtag for enden: Når luppen er trukket helt ud, tændes den indbyggede LED-lampe automatisk.

Efter brug skubbes luppen sammen, så linsen er beskyttet inde i håndtaget. Dette slukker samtidig automatisk for den indbyggede lampe.

## Batteriskift

Optima Go lysluppen benytter to batterier af typen LR44, som sidder under batteridækslet på bagsiden af luppens håndtag.

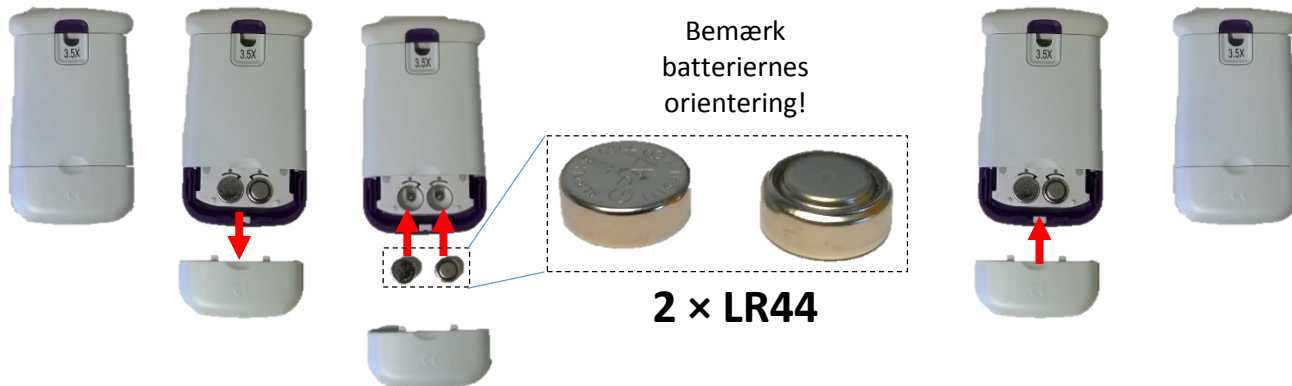

## ADVARSEL!

Lad aldrig luppen ligge fremme i sollys – under uheldige omstændigheder kan den fokusere sollyset på samme måde som et "brændeglas", og starte en brand!

Undlad at se direkte på den indbyggede lyskilde, da den er ganske stærk.

## Montering af bærestrop

Optima Go leveres med en aftagelig strop, så den kan bæres om halsen, parat til brug. Før først den sorte snor med låsen igennem "øjet" på den violette side af luppens håndtag nær bagenden, og træk låsen igennem trådløkken som vist. Derefter kan den violette bærestrop "klikkes" fast i låsen og er klar til brug.



Vejledning for

# OPTIMA GO

lyslup



Lys og lup ApS – Erhvervsvej 30 – 2610 Rødovre  
Tlf. 43 451 451 – [www.lysoglup.dk](http://www.lysoglup.dk) – [lysoglup@lysoglup.dk](mailto:lysoglup@lysoglup.dk)