



Robert fra SpeakRead – Brugervejledning

Robert fra SpeakRead er det nye hjælpemiddel, til svært hørehæmmede eller døvblevne. Robert oversætter tale og præsenterer det som tekst på skærmen af din iPhone eller iPad umiddelbart efter den enkelte sætning er blevet sagt.

Robert benyttes i ansigt til ansigt samtale mellem to personer. Den virker overalt, hvor der er adgang til Mobilt Bredbånd eller Wi-Fi. Når du en gang har oprettet adgang til et Wi-Fi, husker din iPhone det næste gang du er samme sted.


Brug Robert hjemme, i køkkenet, på besøg hos andre, i supermarkedet, hos lægen, på apoteket, hos kommunen, ved lægen, ved check in i lufthavnen – alle steder. Når det er blevet en vane, at bruge Robert viser det sig, at den kan hjælpe med at reducere afhængigheden af andre og samtidigt spares en masse af den energi, der dagligt går til at koncentrere sig om hvad andre siger.

Robert gør det muligt *”at høre med dine øjne”*.


1. Klik på dit Robert ikon på din iPhone eller iPad:



2. Klik på " Start Robert " - og du er i gang:

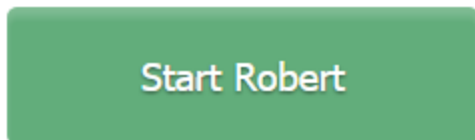

3. Hold en finger på knappen "Tryk her når du taler", når du selv taler – og kun når du selv taler. Så længe knappen holdes nede optages ingen tale – heller ikke hvis den anden siger noget samtidigt med dig. Slip knappen igen, når Robert skal begynde at optage og skrive det, den anden siger:

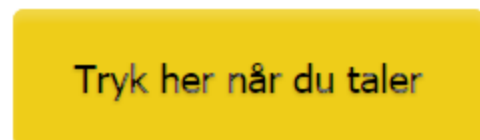

4. Klik på " Stop Robert " når samtalen er slut:

Stop Robert

5. Gør brug af Robert til en af dine gode vaner

Sådan får du størst glæde af Robert

1. **Anvendelsessituationer:** Benyttes i alle situationer, hvor to taler sammen – ikke i gruppesamtaler og undlad at tale i munden på hinanden.
2. **Placering:** I skal være overfor hinanden eller ved siden af hinanden indenfor en afstand af 1½ meter
3. **Mikrofonen:** Mikrofonen sidder i bunden af telefonen, i samme ende som stikket til opladning. Hold gerne din iPhone så mikrofonerne peger vendt mod den du taler med. Når du holder enden af din iPhone lidt opad vender teksten på skærmen, så den bliver retvendt for dig, som skal læse den.
4. **Baggrundstøj:** Der må ikke være for meget baggrundstøj.
5. **Tal tydeligt:** Bed den du taler med om at tale et tydeligt dansk.
6. **Korte hele sætninger:** Der skal tales i relativt korte hele sætninger uden lange ophold mellem ordene i samme sætning. Ophold opfattes som besked til Robert om at begynde at oversætte det brudstykke af en sætning, der netop er blevet sagt.
7. **Gem samtale ved at sende som e-mail:** Med knappen "Email tekst", kan du sende en samtale du gerne vil gemme, som en e-mail. Når du vil gemme en samtale må knappen "Tryk her når du taler" ikke bruges. Det kræver, at begge taler tydeligt og gør et lille ophold efter hver sætning. Robert får så de 1 - 2 sekunder, der skal bruges til at skrive teksten inden, der tales igen.

Hvis du har nogle yderligere spørgsmål eller kommentarer kan du gå ind på vores hjemmeside: www.speakread.dk og se om du kan finde svaret der – enten under spørgsmål og svar - eller du kan kontakte os gennem hjemmesiden. Har du et nyt spørgsmål, som kan komme til glæde for andre brugere vil vi både svare dig og lægge dit spørgsmål og svaret op på vores hjemmeside.