

Brugsanvisning



Aqua™ Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214



Indholdsfortegnelse:

1. Introduktion
2. Anvendelsesområde
3. Ibrugtagning
4. Betjeningsvejledning
5. Vedligeholdelse
6. Fejlfinding
7. Teknisk data
8. Garanti

15.02.01

1. Introduktion:

Aqua Bruseleje med el-betjent løfte- og liggeflade funktioner.

- 125 mm hjul med centralbremse.
- Trinløst nedfældelige sengeheste i begge sider.
- Håndbetjening til el-funktioner.
- Aftagelige hoved- & fodgærde
- Integreret batteri med væg ladestation.
- Muligt ekstraudstyr: Ekstra batteri.


Aqua Bruseleje sikrer både plejer og svage brugere problemfri brusebadning. Lejet er komfortabelt at ligge i takket være madrassen og trinløst nedfældelige sengeheste. Herved kan langt de fleste brugere opnå god kropsstøtte. Aqua fås også i en ekstra lang udgave, som betyder, at der altid er adgang til hår- & fodpleje, selv med høje brugere.

Den elektriske løftefunktion garanterer, at plejeren har en optimal arbejdsstilling både ved forflytning til og fra lejet og under selve brusebadningen. Lejet kan tiltes elektrisk. Dette sikrer både komfort og øger sikkerheden. Ved ildebefindende kan en bruger hurtigt bringes i Trendelenburg position.

2. Anvendelsesområde: Ved patientvask.

3. Ibrugtagning: Ved modtagelsen pakkes lejet ud og kontrolleres straks for evt. beskadigelser. Sæt stikket i stikkontakten og afprøv alle el-funktioner. Såfremt der kan konstateres beskadigelser/mangler, kontakt da venligst leverandøren snarest og inden ibrugtagning.

4. Betjeningsvejledning:

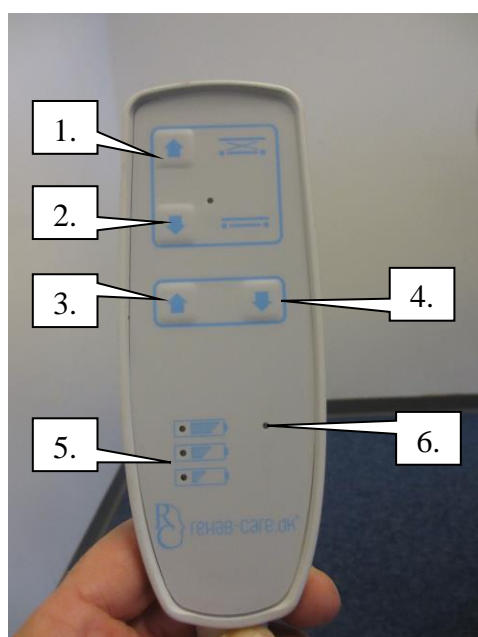


Lejets elektriske funktioner betjenes via håndbetjeningen (se billede)

1. Hæver lejet
2. Sænker lejet
3. Tilter lejet i Trendelenburg
4. Tilter lejet tilbage
5. Batteristatus
6. Oplad nu

Alle 4 køre-hjul på lejet er forsynet med centralbremse, som kan betjenes med foden.

Ved tryk på pedalen med den røde markering – bremses alle 4 hjul.
Ved tryk på pedalen med den grønne markering – aktiveres retningslåsen på de 2 hjul i fodenden.

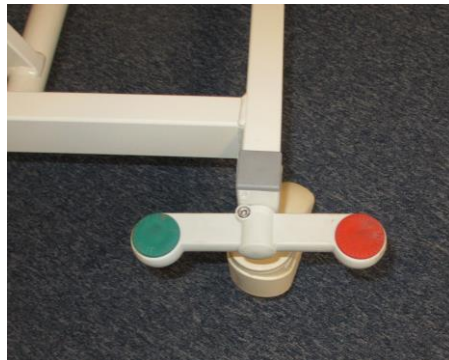


Justering af sengeheste:

1. Tryk udløserhåndtaget ned (med fod eller hånd) og hold det nede.
2. Indstil sengehest med den anden hånd.
3. Slip udløserhåndtag.

NB.: Kan ikke justeres ved 14 grader Trendelenburg.

Sengegavle:

Kan afmonteres eller fjernes fra lejet.
Senge gavlene er monteret med 2 spændegreb, under liggefladen i begge ender.

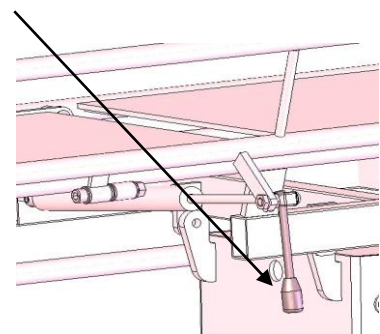

5. Vedligeholdelse: Lejet holdes fri for snavs og hår.

Bevægelige dele kontrolleres, efterspændes og smøres hvor det er nødvendigt.

Rengøring:

Lejet rengøres med sæbevand ved hjælp af børste eller svamp. Tørres grundigt efter vask.

Rengøringsmidler:

- Lejet: Alle flydende rengøringsmidler, eksklusiv sprit og klor.
- Betræk: Sæbeopløsning

Lejet tåler ikke autoklavering!

Årligt eftersyn anbefales.

Serviceaftale kan indgås med Winnocare på telefon 4913 8855

6. Fejlfinding:

Funktionssvigt:

1. Er stikkontakten tændt?
2. Er der strøm i stikkontakten?
3. Er batteriet ladet op?
4. Er alle stikforbindelser i styreboksen presset helt ind? (er placeret under hjulrammen).
5. Er der deformationer på lejet?
6. Er der synlige brud på ledninger?

Kontakt Winnocare for yderligere hjælp.

7. Teknisk Data:

Mål og vægt:

• Længde, udvendigt (Lang udgave)	2430 mm
• Længde, liggeflade (Lang udgave)	2140 mm
• Længde, udvendigt (Kort udgave)	2190 mm
• Længde, liggeflade (Kort udgave)	1900 mm
• Bredde, liggeflade	550 mm
• Bredde, Sengeheste slået op	780 mm
• Totalbredde, sengeheste vandret	1000 mm
• Totalbredde, 1 sengehest vandret	890 mm
• Sengehestens højde	150 mm
• Madrassiders højde	240 mm
• Hjul med totalbremse	125 mm
• Madras højde i vandret position	430-960 mm
• Maks. Højde ved Trendelenburg	1340 - 1410 mm
• Laveste frihøjde, under lejet	130 mm
• Længde/bredde understel	1390/670 mm
• Madras tykkelse	30 mm
• Afløbs slange længde	1000 mm
• Vægt	80kg
• Strøm krav	230V~50Hz.
• Lejet må maksimalt belastes med en personvægt på	200kg

8. Garanti:

Der ydes garanti på:

1. Stel.
2. Øvrige dele.

Garantien er iflg. Dansk købelov. På madras og stel ydes 2 års garanti. På forbrugsartikler, dvs. hjul, batterier & motorer ydes 1 års garanti. Garantien er betinget af, at lejet er blevet anvendt korrekt.

9. Ordrenumre og HMI-Numre:

Aqua bruseleje, 190 cm liggeflade: **Ordrenr.:** BA M14 190 **HMI-Nr.:** 86834

Aqua bruseleje, 214 cm liggeflade: **Ordrenr.:** BA M14 214 **HMI-Nr.:** 86833