

# Underbuske-påtager

## Brugermanual



Varenr: 180003 – HMI: 88277

Varenr: 180004 – HMI: 88278

1. Læg underbukse-påtageren på dit skød med håndtagene opad
2. Sæt underbukserne på underbuske-påtagerens hjørner
3. Sæt underbuske-påtageren foran dine ben
4. Træd ned i underbukserne med begge ben og træk underbukserne op over knæene.
5. Tag underbukserne af underbukse-påtageren, træd ud af underbukse-påtageren og træk underbukserne helt op.

For yderligere hjælp henvises til video: [https://www.youtube.com/watch?v=UpHxt0sB\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=UpHxt0sB_w)