

Fastmonteret toiletforhøjer

Montage- og brugervejledning for 301702



Fabrikant:

MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for en siddeforhøjelse og/eller støtte under toiletbesøg.

Ved spørgsmål bedes de henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Placer ikke produktet udenfor.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Den faste toiletsædeforhøjer kan enkelt placeres direkte på toilettet. Den fastgøres på toiletkummen med justerbare beslag. Siddehøjden kan justeres i 3 højder ved at flytte højdereguleringen på siden af sædet. De stabile armlæn giver støtte til brugeren og kan svinges op for at tillade forflytning. Armlænet kan stå i opret position og kan fjernes uden brug af værktøj. Sædet kan fjernes fra toilettet for rengøring.

Montagebeskrivelse

Montage af armlænen

- ~~Fjern~~ skruerne bag på aluminium profilen.
- ~~Skub~~ armlænene ind i aluminium profilen.
- ~~Sørg~~ for at hullet i armlænsrøret sider ud for hullet i profilen.
- ~~Indsæt~~ og fastgør skruerne på bagsiden af aluminium profilen.

Fastgør sædet til toiletkummen

- ~~Fjern~~ det eksisterede toiletlæg og erstat det med det fastmonterede sæde ved stikke de 2 gevindstænger i hullerne på den bageste del af toiletkummen.
- ~~Fastgør~~ sædet ved at skrue de 2 plastbøsninger helt fast.
- ~~Kontroller~~ at sædet er helt stabilt før anvendelse.

Transport beskrivelse

Hvis nødvendigt kan det faste sæde enkelt aftages for transport.

Tilbehør

Det faste toiletsæde har ikke noget tilbehør.

4. Tekniske data

Toiletforhøjer	301702
Total bredde	65,0 cm
Total længde	47,0 cm
Bredde mellem armlæn	54,5 cm
Siddehøjde	10 cm
Indvendig bredde	21,0 cm
Indvendig længde	26,5 cm
Total vægt	4,0 kg
Max. belastning	120 kg
Pakke dimensioner (L x B x H)	49 x 41 x 26 cm

Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af produktet



Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Armlænene er ustabil	Armlænene er ikke fastgjort korrekt	Kontrollere om hullet i armlænsrøret sidder ud for hullet i profilen og fastgør skruen.
Sædet er ikke stabilt.	Plastbøsningerne under toiletkummen er ikke fastgjort	Skru plastbøsningerne helt fast

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Fast toiletsædeforhøjer 301702

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr, Del I fra 14 Juni 1993**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S



.....
underskrift

Skanderborg, the 2/2 - 2010