

## On & Off ”manuel”

Benyttes af selvhjulpne brugere, med mindre eller ingen funktionsnedsættelser.

## On & Off ”manuel”



Følgende produkter indgår også i On & Off AKKU serien,



## On & Off AKKU

On & Off AKKU fungerer som benstøtte med ”hjælpende hånd”  
Unikt APV hjælpemiddel for personale. Personer med væsentlige funktionsnedsættelse kan typisk selv tage strømpen af.  
Take Off er hjælpemiddel for personale eller pårørende ved aftagning. Et simpelt og prisbilligt produkt-



## Take Off

Se mere: [www.on-offstock.com](http://www.on-offstock.com) (engelsk)

Eller: [www.bjorn-nielsen.dk](http://www.bjorn-nielsen.dk) (dansk)

Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S | Sønderbyen 7 | 9510 Arden  
[www.bjorn-nielsen.dk](http://www.bjorn-nielsen.dk) | [mail@bjorn-nielsen.dk](mailto:mail@bjorn-nielsen.dk) | tlf.: +45 8692 7955



[WWW.ON-OFFSTOCK.COM](http://WWW.ON-OFFSTOCK.COM)

## Manual og brugsanvisning

## On & Off ”manuel”

Kompressions-strømpe på/- og aftager.  
Anvendes til størrelse medium & large, samt klasse 1 & 2



## Påtagning af kompressionsstrømpe

Basen placeres på stabilt underlag i god højde, med bagside mod personen.  
Armene foldes ud til siden.



Basen klemmes sammen med lukkegrebet.  
Strømpen sænkes ned i basen med hælen mod personen.



Strømpen trækkes/glides nedover basen indtil "hælen" kommer til syne helt oppe ved på basekanten.



**VIGTIGT !** start påsætningen fra bagkanten af basen. Brug evt. handsker.

Lukkegrebet løsnes, og personen sætter sig på en stabil, og gerne lidt høj stol.



Armene/klemmepuderne trykkes mod strømpen, Foden stikkes ind i strømpen mens trykket holdes.  
OBS; sikre at foden er helt på plads i strømpen.



Slip trykket på armene/klemmepuderne, Træk herefter basen opad benet.  
Strømpen rulles blidt og glat på benet.



## Aftagning af kompressionsstrømpe

Personen sætter sig på stolen, evt. med lille skammel under foden for bedre at kunne nå.



Basen placeres på skamlen/gulvet, og foden stikkes ned i den.  
Strømpekanten trækkes længst muligt ned over basen.



Armene/klemmepuderne trykkes mod strømpen.



Tryk på PUSH knappen samtidig med at armene trækkes tilbage mod personen.



Når der lyder et klik, er armene låst.



Skub herefter basen ud mod foden/ bøj knæet, mens der samtidig fastholdes et tryk mod strømpen med armene/klemmepuderne.

